



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA VETERINARIA - MEDIA**  
**DIGITAL VET SCALE - MEDIUM**  
**BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE**  
**BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA**  
**ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA**  
**VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT**  
**ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - ΣΡΕΔΕΗ**  
**VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR**  
**ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ**  
**ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN**  
**ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS**  
**SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA**  
**SCALA VETERINARĂ – MEDIE**  
**VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER**

**REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)**

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/  
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

**Momert Zrt.**

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/  
Distribuovaný/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

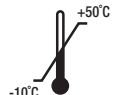



Моля, проучете внимателно цялото ръководство за експлоатация, преди да започнете да използвате продукта. Съхранявайте ръководството на сигурно място за бъдещи справки. Уверете се, че други хора, които използват продукта, са запознати с тези инструкции.

### ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Уверете се, че спазвате маркираната полярност на батерията, когато я поставяте и заменяте.
- Ако уредът няма да се използва за по-дълго време, извадете батерията.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато се използва.
- Този уред не е предназначен да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под надзор или не са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Използвайте продукта само за предназначението, което е посочено в ръководството за експлоатация.
- Използвайте уреда само върху стабилна хоризонтална повърхност.
- Преди почистване, сглобяване или разглобяване на капака изключете уреда и извадете батерията!
- Не използвайте абразивни или химически агресивни вещества за почистване на уреда.
- Не използвайте уреда, ако то не работи правилно или ако е било изпуснато, повредено или изложено на въздействието на течности. Отнесете уреда в оторизиран сервизен център за тестване и ремонт.
- Уредът е предвиден само за домашна употреба. Не е предназначен за търговска експлоатация.
- Дръжте уреда далеч от източници на топлина, като радиатори, фурни и др. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или влага.
- Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце.
- Продуктът е чувливо измервателно устройство. Пазете го от удар или падане.
- Не ремонтирайте уреда сами. Свържете се с оторизиран сервизен център.

### НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЧИНА ЗА ОТКАЗ ОТ РЕМОНТ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИЯТА!

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Прецизна измервателна система
- Автоматично нулиране
- Автоматично изключване
- Индикатор за ниска мощност
- Индикатор за претоварване

#### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Напрежение: 1бр. 3V, CR2032 литиева батерия (включена)  
Максимално тегло за измерване: 3-100 kg  
Стъпки за теглене: 100 g  
Размер на дисплея: LCD диаметър = 8,0 cm, 3,15 инча  
Платформа: 6680 (GIMA 27258): 635x355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830x620 mm  
Мерни единици за теглене: kg, lb, st  
Температура на работа/съхранение: 10-40°C/-10-50°C

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Преди да използвате везната за първи път, отстранете изолиращата лента от батерията от задната страна на везната. Поставете везната върху плоска, твърда и равна повърхност. Върху мека повърхност (например върху килим) скалата може да покаже неточна стойност. За да стартирате везната, докоснете с крак центъра на платформата. Първият път на дисплея се появява движеща се цифра „8“ и след това на дисплея се появява „0,0“.  
Изчакайте, докато се появи „0,0“!  
Поставете домашния любимец върху везната.  
След това теглото на вашия домашен любимец ще се появи на дисплея, мигайки два пъти. Измереното тегло може да се види за около 10 секунди. Ако след включването на везната не се извърши претегляне, тя ще се изключи автоматично след 60 секунди.

#### СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Батерията трябва да се смени, когато на екрана се покаже:



Отворете държача на батерията от задната страна на везната и внимателно извадете батерията, като приберете черния пластмасов палец. Закрепващият палец се намира в горната част на батерията. Не चुлете металната пластинка. Сменете батерията с нова. Изтощената батерия трябва да се изхвърли на подходящо място.

БАТЕРИИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ГАРАНЦИЯТА!

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ

Когато везната е претоварена, на дисплея се показва:



#### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Повърхността на устройството може да се почиства само с влажна кърпа. Не използвайте никакви почистващи препарати или твърди предмети, тъй като те могат да повредят повърхността на устройството!  
Никога не почиствайте уреда под течаща вода, не го изплаквайте и не го потапяйте във вода!

#### РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

Всяка по-сериозна поддръжка или ремонт, които изискват достъп до вътрешните части на продукта, трябва да се извършват от специализиран сервизен център.

#### ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Опаковъчните материали и излезлите от употреба уреди трябва да се рециклират.
- Транспортният кашон може да бъде изхвърлен като сортиран отпадък.
- Полиетиленовите торбички трябва да се предават за рециклиране.



**Изхвърляне:** Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Потребителите трябва да изхвърлят това оборудване, като го занесат в специален пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

#### ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA

Прилага се стандартна 12-месечна гаранция Gima.