

ELETTRODI E PROLUNGHE STERILI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA
STERILE ELECTRODES AND EXTENSIONS DISPOSABLE ITEMS FOR ELECTROSURGERY
ÉLECTRODES ET RALLONGES STÉRILES À USAGE UNIQUE POUR ÉLECTROCHIRURGIE
STERILE ELEKTRODEN UND VERLÄNGERUNG EINWEGNUTZEN FÜR DIE ELEKTOCHIRURGIE
ELECTRODOS Y CABLES ESTÉRILES MONOUSO PARA ELECTROCIRUGÍA
ELETRODOS E EXTENSÕES ESTERILIZADOS DESCARTÁVEL PARA A ELETRO-CIRURGIA
СТЕРИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΝΟΝΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ELEKTRODEN EN STERIELE VERLENGSNOEREN EENMALIG GEBRUIK VOOR ELEKTROCHIRURGIE
STERILE ELEKTRODER OG FORLÆNGERE ENGANGSBRUG TIL ELEKTROKIRURGI
ELECTROZI ŞI PRELUNGITOARE STERILE PRODUSE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ PENTRU
ELECTROCHIRURGIE
ELEKTRODY I PRZEDŁUŻACZE STERYLNE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ELEKTROCHIRURGII
STERİL ELEKTROTLAR VE UZATMALAR ELEKTROCERRAHİ İÇİN TEK KULLANIMLIK
STERIL ELEKTÓDOK ÉS KÁBELEK EGYSZER FELHASZNÁLHATÓK ELEKTROSEBÉSZETBEN
STERIILIT ELEKTRODIT JA JATKEET KERTAKÄYTTÖINEN SÄKHÖKIRURGIAN VÄLINE
STERIILSED ELEKTROODID JA PIKENDUSJUHTMED ÜHEKORDELT KASUTATAVAD
ELEKTROKIRURGIA TOOTED
STERILI ELEKTRODI UN PAGARINĀJUMI VIENREIZ LIETOJAMI ELEKTROKIRURGIJĀ
STERILNÍ ELEKTRODY A PRODLUŽOVACÍ KABELY NA JEDNO POUŽITÍ PRO ELEKTROCHIRURGII
STERILNÉ ELEKTÓDY A PREDLŽOVAČE JEDNORAZOVÉ KOMPONENTY PRE ELEKTROCHIRURGIU
STERILA ELEKTRODER OCH FÖRLÄNGNINGAR ENGÅNGSBRUK FÖR ELEKTROKIRURGI
СТЕРИЛНИ РЪКОХВАТКИ И УДЪЛЖИТЕЛИ ЕДНОКРАТНИ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ
STERILNE ELEKTRODE I PRODUŽECI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU ZA ELEKTROKIRURGIJU
ELEKTRODE I STERILNI SPOJNI KABLOVI JEDNOKRATNA OPREMA ZA ELEKTROHIRURGIJU
STERILNE ELEKTRODE IN PODALJŠKI ZA ENKRATNO UPORABO V ELEKTROKIRURGIJI
STERILE ELEKTRODER OG FORLENGELSER ENGANGSUTSTYR TIL ELEKTROKIRURGI
أقطاب كهربية و وصلات اطالة الكابل المعقمة مكونات أحادية الاستخدام للجراحة الكهربائية



ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- Продуктът е за еднократна употреба и е стерилизиран с етиленов оксид. да не се ползва повторно. повторната му употреба може да доведе до: присъствието на биологични остатъци може да предизвика кръстосани инфекции; промяна на материалите; загуба на първоначалните функционални характеристики на продукта.
- Стерилността не е гарантирана, ако опаковката е била отворена и/или повредена.
- Не използвайте след датата на изтичане на срока. Стерилността не е гарантирана.
- След като проверите целостта на опаковката, проверете и съдържанието; при наличие на видими повреди или дефекти, продуктът да не се използва и да се върне на ФИАБ (FIAB).
- Продуктите да се държат далече от възпламеними материали: тяхното случайно възпламеняване и топлина биха могли да предизвикат пожари.
- Апаратите трябва да бъдат свързани и задействани от квалифициран персонал
- За употреба на генератора, ръкохватките, неутралните плочки, кабелите и другите аксесоари позовете се на инструкциите за експлоатация, предоставени от производителя.
- **NB** Сърдечните стимулатори могат да бъдат засегнати от електрохирургически ток. Да НЕ се подлага на електрохирургически ток пациент с пейсмейкър, без предварително да се е консултирал с кардиолог.
- Отпадъците от здравните заведения трябва да се изхвърлят съгласно действащите разпоредби.

УКАЗАНИЯ

Рязане и коагулация на тъкани, по време на хирургическа процедура, с употребата на високочестотен генератор.

МАКСИМАЛНО ПРИЛОЖИМО НАПРЕЖЕНИЕ 9kVpp**ПОДГОТОВКА И ВРЪЗКИ**

Уверете се, че електрода и удължителя (ако е наличен) е стабилно вкаран в края на ръкохватката. При смяна на електрода и/или удължителя се уверете, че ръкохватката не е свързана с генератора или че генератора е изключен (в режим на готовност).

Свържете към високочестотния генератор ръкохватката и педалния прекъсвач (за модели с команда чрез педал).

Активният кабел не трябва да е директно в контакт с кожата на пациента и да се преплита.

NB: Ако пациентът се премества, извършете нова проверка на всички връзки.

УПОТРЕБА

След като е вкаран електрода/удължителя към края, спазвайте инструкциите на ръкохватката за предварителна проверка за правилното функциониране.

По време на процедурата изберете винаги най-ниското ниво на възможна енергия. Ако капацитета на коагулация на електрода е по-нисък от нормалното да не се увеличава изхода на висока честотност, без да са извършени предварително следните проверки:

- Правилното положение на неутралната плочка
- Правилното вкарване на кабелите и на техните съединения
- Правилното задействане на бутоните за функциониране (ръчно или на педал)
- Че няма повреди в изолацията на кабелите
- Че електрода и удължителя (ако е наличен) не е мръсен.

	Европейска Общност 93/42/EEC		Внимание, направете справка с придружаващит е документи		Направете справка с инструкциите за употреба		Каталожен номер
	Партиден номер		Дата на производство		Използвай при		Не се допуска повторна употреба
	Стерилизира но с етилен- оксид		Не използвай, ако опаковката е нарушена		Не съдържа естествен гумен латекс		Пазете от пряка слънчева светлина
	Ограничения на влажността		Температурни ограничения		Производител		Брой



Via Costoli, 4 - 50039 - Vicchio (Florence , Italy) - www.fiab.it

