



BG **НОСНА КАНЮЛА ЗА ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ**
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОКАЗАНИЯ

Терапевтично подаване на кислород през носа.
Продукт за еднократна употреба (за един пациент), който да се използва непрекъснато за период не по-дълъг от 30 дни.
Източникът на кислород трябва да съответства на приложимите разпоредби.
Продуктите трябва да се използват от квалифицирани медицински специалисти.

ИНСТРУКЦИИ

Въведете назалния разпределител внимателно във всяка от ноздрите и продължете както е описано по-долу за всеки модел назална канюла.
Задръжете назалния разпределител на мястото му и прокарайте десния и левия шlauch над ушите и надолу към челюстта под брадичката. Регулирайте шlauchа с помощта на пластмасовия пръстен.
Свържете края на свързващия шlauch с източника на кислород.
Когато изделието е захванато правилно, подайте кислород и регулирайте дебита според необходимостта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не са описани противопоказания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ако изделието се използва повторно в нарушение на настоящите инструкции, това може да има следните компрометиращи последствия:
1. Изменение на материалите
2. Замърсяване на изделието и възможно наличие на биологични остатъци, които могат да причинят кръстосани инфекции
3. Загуба на първоначалните функционални характеристики на продукта.

Преди да свържете с източник на кислород, проверете функционалността. Случайното притискане на свързващия шlauch няма да позволи на кислорода да се подава правилно и може да причини отделянето на съединителя. Ето защо е препоръчително потребителите да осъществяват надежден контрол. Същото внимание трябва да се обърне и на моделите, които се доставят със защитени шlauchи, при които рискът от разместване съществува, въпреки че е по-малък.

Този продукт съдържа фталати (DEHP). Въпреки, че рискът за човешкото здраве не е потвърден, използването на изделията при бременни/кърмещи жени или при деца трябва да се оцени от Вашия лекар.

Използването на назални канюли може да се свърже с епистаксис при пациенти, предразположени към кървене и/или подложени на антикоагулационна терапия.

Концентрираният кислород може да възпламени запалими материали. За да се избегне рискът от пожар или експлозия, изделието трябва да се държи далеч от потенциални източници на запалване. Направете справка с предпазните мерки за използване на оборудването за подаване на кислород.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната опаковка в помещения, характеризиращи се с условия на околната среда, температура и относителна влажност, посочени на етикета, поставен върху опаковката. Припокриващите се тежести върху опаковките могат да повредят продукта.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Ако по време на употреба на това устройство или като резултат от неговата употреба възникнат сериозни инциденти, съобщете за тях на производителя и на националния компетентен орган. За всяка неизправност или дефект на устройството, информирайте Службата за качество на производителя.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Отпадъци от здравни структури трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с разпоредбите, които а в сила.

СИМВОЛИ - VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ - ZNAČENJE SIMBOLA - JELMAGYARÁZAT - SIMBOLIŲ LEGENDA - SIMBOLU APZĪMĒJUMI - LEGENDĂ DE SIMBOLURI

	BG	CS	HR	HU	LT	LV	RO	SR
	Съответства на действащото европейско законодателство относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	U skladu s važečím evropskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó jelenlegi európai jogszabályoknak	Atitinka galiojančius Europos teisės aktus dėl medicinos priemonių	Atbilst pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm	Conform cu legislația europeană în vigoare privind dispozitivele medicale	Usaglašeno sa tekućim evropskim propisima o medicinskim sredstvima
	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinski proizvod	Orvosteknikai eszköz	Medicinos priemonė	Medicīniska ierīce	Aparat medical	Medicinsko sredstvo
	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Egyedi eszközazonosító	Unikalasis priemonės identifikatorius	Ierīces unikālais identifikators	Identificator unic al unui dispozitiv	Jedinstveni identifikator uređaja
	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Proučite upute prije korištenja	Consult használati utasítás	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju	Consultați instrucțiunile de utilizare	Konsultujte instrukcije za upotrebu
	Производител	Výrobce	Proizvođač	Gyártó	Gamintojas	Ražotājs	Producător	Proizvođač
	Дистрибутор	Distributor	Distributer	Forgalmazó	Platintojas	Izplatītājs	Distribuito	Distributer
	Каталожен номер	Katalogové číslo	Kataloški broj	Katalógus száma	Katalogo numeris	Kataloga numurs	Număr de catalog	Kataloški broj
	Партиден номер	Číslo šarže	LOT	Batch kód	Partijos kodas	Partijas kods	Cod de Lot	Serijski broj
	Дата на производство	Datum výroby	Datum proizvodnje	Gyártás dátuma	Pagaminimo data	Ražošanas datums	Data de fabricație	Datum proizvodnje
	Използвай при	Spotřebujte do	Használata által	Használata által	Tinka iki	Izmantošanai	Data limită de utilizare	Rok upotrebe
	Температурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturni raspon	Hőmérséklet korlátozás	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums	Limite de temperatură	Ograničenje temperature
	Ограничения на влажността	Omezení vlhkosti	Raspon vlažnosti zraka	Páratartalom korlátozás	Drėgnio apribojimas	Mitruma ierobežojumi	Limite de umiditate	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Пазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Štititi od direktnog sunčevog svjetla	Tartsa távol a napfénytől	Saugoti nuo saulės spindulių	Nepakļaut produkta atrašanās tiešā saules gaismā	A se feri de razele soarelui	Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Mennyisége darabok	Počet kusů	Količina komada	Mennyisége darabok	Dalių kiekis	Vienumu daudzums	Număr de bucăți	Količina komada
	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Ne sadrži prirodnu gumu i lateks	Nem tartalmaz természetes gumi latex	Sudėtyje nėra latekso	Nesatur dabīgās gumijas lateksu	Nu conține cauciuc natural (latex)	Ne sadrži prirodnu gumu lateks
	Не се допуска повторна употреба	Nepoužívat opakovaně	Nemojte ponovno koristiti	Ne használja újra	Pakartotinai nenaudoti	Nelietot atkārtoti	A nu se reutiliza	Zabranjena ponovna upotreba
	Съдържа фталати	obsahuje ftaláty	Sadrži ftalate	Tartalmazza ftalátok	Sudėtyje yra ftalatų	Satur ftalātus	Conține ftalați	Sadrži ftalate