

**Студен стерилизатор
за медицински изделия за инвазивни приложения
пероцетна киселина на прах**

ОПАСНОСТ

Свойства

GERMOCID POLVERE съдържа прекурсор на пероцетна киселина, който се активира след разреждане на праха в хладка вода; прахът се разтваря напълно, без да оставя следи по дъното и пяна по повърхността. Отначало течността е светлосиня и става безцветна след петнайсетина минута - времето, необходимо за освобождаване на активното вещество (пероцетна киселина), за да може разтворът да стане готов за употреба, като по този начин осигурява и силно бактерицидно действие. GERMOCID POLVERE може да се използва като препарат за обеззаразяване, дезинфекциране, спорициден агент, студен стерилизатор на инвазивни медицински изделия в болничния сектор, лекарски и стоматологични кабинети. Продуктът може да се използва и в козметични студия върху изделия за неинвазивни приложения. GERMOCID POLVERE е ефикасен и за обеззаразяване, дезинфекциране и бързо студено стерилизиране на термочувствителни материали като: ендоскопи, оптични влакна, преобразуватели и др. Абсолютната съвместимост с компонентите е предпоставка за използването на GERMOCID POLVERE и с машини за миене на ендоскопи. След използване разтворите може да се изхвърлят като неопасен отпадък.

Начин на употреба: Приготвяне на разтвора за потапяне: в специалната ваничка пригответе необходимата хладка вода, като проверите дали е с температура около 35 °C с цел улесняване на разтварянето на праха; изсипете необходимото количество в зависимост от активността, която целите; бъркайте разтвора до получаване на бистър разтвор със светлосин цвят; изчакайте 15 минути, преди да използвате разтвора.

Обеззаразяване/Дезинфекциране: използвайте 8 g на литър вода и потапайте инструментите в разтвора за 10 минути; ако органичните остатъци не се отстранят, пристъпете към измиване с помощта на подходящ детергент; след потапянето извадете инструментите и ги изплакнете; за постигане на описаното действие разтворът остава активен за максимално време от 7 дни от приготвянето му (в зависимост от количеството третирани инструменти). **Спорицидно действие:** използвайте 8 g на литър вода и потапайте инструментите в разтвора за 10 минути; за постигане на описаното действие разтворът остава активен за максимално време от 24 часа от приготвянето му.

Висока степен на дезинфекция/Студена стерилизация: използвайте 16 g на литър вода и потопете инструментите в разтвора за 10 минути; след потапянето извадете инструментите и ги изплакнете със стерилна вода; подсушете и съхранявайте асептично; за постигане на описаното действие разтворът остава активен за максимално време от 24 часа след приготвянето му.

Съставки: 100 грама продукт съдържат: Тетраацетилетилендиамин 25,00 g; натриев перкарбонат 42,00 g; коформуланти до 100,00 g.

Предупреждения: **H302** Вреден при поглъщане. **H318** Предизвиква сериозно увреждане на очите. **P264** Ръцете да се измият внимателно след употреба. **P280** Използвайте предпазни очила и предпазна маска за лице. **P305-P351-P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. **P310** Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. **Съдържа:** НАТРИЕВ ПЕРКАРБОНАТ. Не използвайте за инструменти от алуминиеви сплави и никел. Придържайте се към инструкциите за употреба. Не използвайте метални ванички. За професионална употреба.

Съвместимост с материали: GERMOCID POLVERE е с висока степен на съвместимост с голяма част от материалите, от които се произвеждат различните изделия, използвани в болничния и здравния сектор. Проучванията относно съвместимостта GERMOCID POLVERE/Медицинско изделие не установяват разграждане на медицинското изделие след използване на GERMOCID POLVERE при препоръчаните условия на употреба.
Годност и съхранение: Продуктът е със срок на годност от 2 години от датата на производство и трябва да се съхранява в оригиналната му опаковка. Ако опаковката е отворена и е била затваряна правилно след приключване на всяко вземане, без останалото съдържание да бъде замърсявано с външни вещества и/или агенти, препаратът продължава да бъде годен до изчерпване на продукта. Продуктът трябва да се пази от влага. Съхранявайте на хладно и сухо място, далече от източници на топлина. Не използвайте нарушени опаковки.
Партида и срок на годност: виж опаковката
МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ СЕ (ЕО) 0546 Европейска директива 93/42/ЕИО
Производител: GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938 www.germo.it - info@germodis.com ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИЯ
Предупрежденията може да бъдат променени при актуализиране на информационния лист за безопасност на продукта