

ЦЕНТРОФУЖНИ ЕПРУВЕТКИ

ИЗДЕЛИЕ ЗА ИНВИТРО ДИАГНОСТИКА СЕ
За професионална употреба в здравеопазването

Тип проба: проба от кръв, серум или урина

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- 1) Проверете дадената върху продукта информация и целостта на опаковката.
- 2) Напишете върху етикета необходимата информация (име на пациента, тест, проба и т.н.).
- 3) Отворете центрофужната епруветка.
- 4) Като използвате подходящия инструмент, поставете пробата в епруветката за разреждане, съхранение, центрофугиране, бактериална култура или друго приложение.
- 5) Затворете сигурно центрофужната епруветка с нейната капачка, за да се предотврати изтичане при центрофугиране.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

- Изделие, предназначено за употреба от здравни специалисти;
- Използвайте предпазни ръкавици.
- Не поставяйте изделието близо до пламък.
- Не използвайте продукта, ако е с изтекъл срок на годност, ако е повреден или с отворена опаковка.
- Не променяйте предназначението, всяка друга употреба се счита за неправилна.
- Пазете извън обсега на деца.
- Използвайте изделието само с подходящи аксесоари.
- Да се съхранява на сухо място, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина.
- Изхвърлете този продукт в съответствие с местните разпоредби в контейнер за биологични отпадъци.
- Изделие за еднократна употреба. Повторната употреба на изделието ще доведе до загуба на неговата производителност и характеристики.
- Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган в страната, в която пребивава пациентът.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

