

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Не е предназначено за лица с тегло над 242 lbs (110 kg) - Не е предназначено за замедени или хлъзгави условия. - Да не се използва от лица с алергии към латекс.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА: За да разгънете бастуна си, дръжте дръжката и оставете съгъваемите сегменти на дръжката да се разгънат към пода. За да предотвратите падане, винаги трябва да проверявате дали отделните сегменти на бастуна (Фиг. 1) са здраво заключени на място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ разглобявайте корпуса на бастуна. Във вътрешността си бастунът има ластична корда. Неконтролируемото освобождаване на ластичната корда във вътрешността може да причини тежки наранявания на незащитени части на тялото, особено на очите, в случай че ластичната корда бъде срязана, разкъсана или повредена, прекратете употребата.

НЕ разтягайте кордата повече от необходимото за разглобяване или сглобяване на сегментите.

ЗА ДА РЕГУЛИРАТЕ ВИСОЧИНАТА НА БАСТУНА: Разхлабете ключалката за завъртане, като я завъртите няколко пъти по часовниковата стрелка. Натиснете заключващия бутон и издърпайте нагоре дръжката за удължаване или натиснете надолу дръжката за скъсяване. Не забравяйте да затегнете ключалката за завъртане, след като регулирате бастуна до желаната височина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да предотвратите падане, винаги се уверявайте, че отделните сегменти на пръчката са здраво заключени на място и че заключващият бутон е задействан изцяло. За да предотвратите падане, винаги се уверявайте, че въртящото се краче на пръчката е здраво завито към бастуна.

ЗА ДА ПРИБЕРЕТЕ БАСТУНА: Бастунът може лесно да се сгъне до удобен за пътуване размер, като се разделят 4-те отделни сегмента на пръчката един от друг. Задръжте всеки един от сегментите на пръчката близо до свързването и ги разделете. Отделните сегменти на пръчката ще се сгънат леко заедно



ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛАМПИТЕ НА БАСТУНА СИ: Бутонът в горната част на дръжката на бастуна активира светлините. Натискането на бутона веднъж ще активира лампата в предната част на бастуна, повторното му натискане ще включи и червената лампа в основата на дръжката, а третото натискане ще ги изключи. Предната лампа може да бъде завъртяна да сочи към светлината, където е необходимо

СИГНАЛ SOS: За да активирате SOS сигнала, натиснете бутона от страната на дръжката, лампичката в основата ще мига и пръчката ще издаде алармен звук.

СМЯНА НА БАТЕРИИ: Отворете отделението за батерии в задната част на дръжката. Отстранете изтощените батерии и ги изхвърлете правилно. Използвайте 2 AAA батерии, поставете ги с правилната полярност (положителен полюс отвън, където е поставена пружината). Затворете капка на отделението за батерии. Проверявайте бастуна редовно за следи от износване, включително за протриване на ластичната корда или износване на гумените крачета. Ако забележите следи от износване, незабавно прекратете употребата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не смесвайте стари с нови батерии. Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA: Прилага се стандартна 12-месечна B2B гаранция Gima.

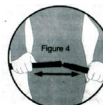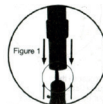

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberleidd av/تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/
Importado por/Εισαχρηγμένο από/Dovezeno od/Importat de/Importat de/
af/Importirja/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/Importēja/Importavo/
Importiert av/Geïmporteerde door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

