



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MEDICAL TROLLEY
CARRELLO CLINICO
CHARIOT CLINIQUE
CARRO DE ANESTESIA
CARRINHO CLÍNICO
KLINIKWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
КЛИНИЧНА КОЛИЧКА
ZDRAVOTNICKÝ VOZÍK
KLINIKKAVAUNU
KLINIČKA KOLICA
KLINIKAI KEREEKES KOCSI
MEDICININIS VEŽIMĖLIS
MEDISCHE KAR
WÓZEK MEDYCZNY
CĂRUCIOR PENTRU
INSTRUMENTAR MEDICAL
CLINICAL TROLLEY**



MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ОНЈЕКИРЈА - VARTOTOJO VADOVAS

Gima 45715

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

REF SKR-CT625-1


Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

1. Монтаж на колелцата

Подравнете болта за колелца с монтажния отвор в долната част на количката и поставете колелото. Поставете винта в монтажния отвор и го затегнете по часовниковата стрелка.

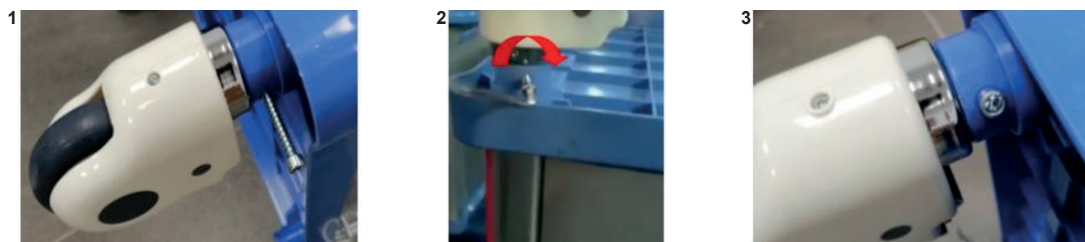

2. Метод на използване на колелцата

Заклучване на колелцето: След като избутате количката за анестезия до желаната позиция, натиснете с крак бутон ON и заключете колелото, когато чуете „щракване“, както е показано на фигурата по-долу.

Отключване на колелото: Натиснете с крак бутон OFF и отключете колелото, когато чуете „щракване“



3. Изключване на неизправности

Обичайни повреди	Вероятни причини	Методи за изключване
Затруднено придвижване на цялата количка	1. Колелото се е заключило без освобождаване на спирачката 2. Колелото е повредено	1. Освободете спирачката, проверете 2.1 2. Сменете колелото, проверете 1.2

4. Поддръжка

- За да използвате количката за анестезия безопасно, е необходимо регулярно да извършвате проверки за безопасност на количката за анестезия. Препоръчва се да я проверявате на всеки шест месеца, за да се уверите, че връзките не са разхлабени и всички операции са нормални.
- Когато рамката на количката за анестезия остарее и достигне определен експлоатационен живот, металната част на количката за анестезия и пластмасовите части на рамката на количката за анестезия могат да бъдат рециклирани.
- Не драскайте панела с остри уреди или с ножове по време на употреба и го почиствайте често, за да го поддържате чист и сух.
- Ако панелът случайно бъде замърсен с петна, се препоръчва да го почистите. За почистване на количката за анестезия не използвайте алкални или корозивни химикали, които причиняват ръждясване на повърхността от неръждаема стомана.
- Проверявайте колелата редовно, за да избегнете удари или претоварване, които ще причинят повреда на колелата.
- Забранено е да спирате принудително колелата при спиране, което ще причини повреда на спирачната система.
- Износването на повърхността на гумата на колелото може да се открие с визуална проверка. Около колелото може да се намотаят нишки от текстил и други натрупвания, отстранете болтовете и гайките на колелото, почистете отпадъците и проверете дали лагерът на колелото е повреден. Ако частите не са повредени, може да бъде сглобено и използвано.
- Преценявайки дали колелото е заменено в зависимост от използваното време, износването и разкъсването, можете да замените колелата и да се уверите, че болтът и гайките на осите са правилно сглобени и свързани. Ако е възможно, като помощ в този процес използвайте блокиращи шайби или гайки.
- За кола, оборудвани със скоби, е необходимо редовно да проверявате дали спирачките работят правилно. Проверявайте спирачките веднъж дневно или преди всяка употреба. За количка за анестезия, оборудвана с няколко спирачни колела, само едно спирачно колело може да бъде заключено в даден момент, което ще Ви позволи да опитате да бутнете количката за анестезия и да проверите дали спирачките на всяко колело са изправни. Ако спирачката не работи поради износване или повреда на колелата, незабавно сменете колелата и след това отново проверете спирачната система.
- Ако механизмът на спирачната система на колелото е повреден и е необходимо спирачката да бъде отремонтирана или сменена, се свържете с отдела за следпродажбено обслужване или с оторизиран търговец, осигурен от дружеството ни. Всеки път, когато се сменят спирачките, спирачните характеристики на колелото трябва да се тестват отново.

5. Опаковане, транспорт, съхранение

- Опаковането на количката се извършва съгласно договора или продуктивния стандарт.
- При транспортирането на количката избягвайте бързана, резки вибрации и тя трябва да защитена от слънчева светлина и дъжд.
- Количката трябва да се съхранява при:
 - Стайна температура: +5°C ~ +40°C.
 - Относителна влажност: ≤ 85%.
 - Атмосферно налягане: 70 kPa ~ 106 kPa.

6. Следпродажбено обслужване

- Съхранявайте файловете, доставени с машината, и фактурите за този продукт правилно, като трябва да ги представите, когато дружеството извършва гаранционна поддръжка и поддръжка на продукта.
- Ако възникне проблем по време на употреба, се свържете своевременно с дружеството ни, за да може да Ви предоставим точна и бърза техническа поддръжка и услуги по поддръжката навреме.
- Считано от датата на закупуването, ако продуктът е счупен или повреден при правилен монтаж и употреба според спецификациите, продуктът ще се ползва от едногодишна безплатна гаранция и доживотно поддръжка със „сертификат“ или фактура.
- Считано от датата на закупуването, ако в действителност е повреден или не работи нормално поради проблеми с качеството в рамките на една година, дружеството ще осигури на потребителите безплатен ремонт на продукта.

Доживотно обслужване от производителя: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD