



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARRELLO D'EMERGENZA NEO
NEO EMERGENCY TROLLEY
CHARIOT D'URGENCE NEO
CARRO DE EMERGENCIAS NEO
CARRINHO DE EMERGÊNCIA NEO
NEO NOTFALLWAGEN
NEO ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
WÓZEK AWARYJNY NEO
CĂRUCIOR MEDICAL DE URGENȚĂ NEO

NEO NOUZOVÝ VOZÍK
NEO NÖDLÄGESVAGN
NEO TROLLEY - ANESTHESIEWAGEN
NEO KOLICA ZA HITNE SLUČAJEVE
NEO ÉRZÉSTELENÍTŐ KOCSI
NEO КОЛИЧКА ЗА СПЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ
NEO-ELVYTYSKÄRRY
NEO SKUBIOS PAGALBOS VEŽIMĖLIS

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO -
BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ
MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS -
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS



Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
/ Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce /
Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja
/ Gamintojas: **Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado
por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de /
Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja
/ Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

REF SKR054-ET

Gima 45722


1. ИНСТАЛИРАНЕ НА КОЛЕЛА

Подравнете болта на колелото с монтажния отвор в долната част на количката и поставете колелото. Поставете винта в монтажния отвор и затегнете винта по посока на часовниковата стрелка.


**1****2****3**

2. МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛЕЛАТА

Заклучване на колелото: След като количката за спешно отделение е преместена до желаната позиция, натиснете бутона ON с крак и заключете колелото, когато чуete "щракване", както е показано на фигурата по-долу.

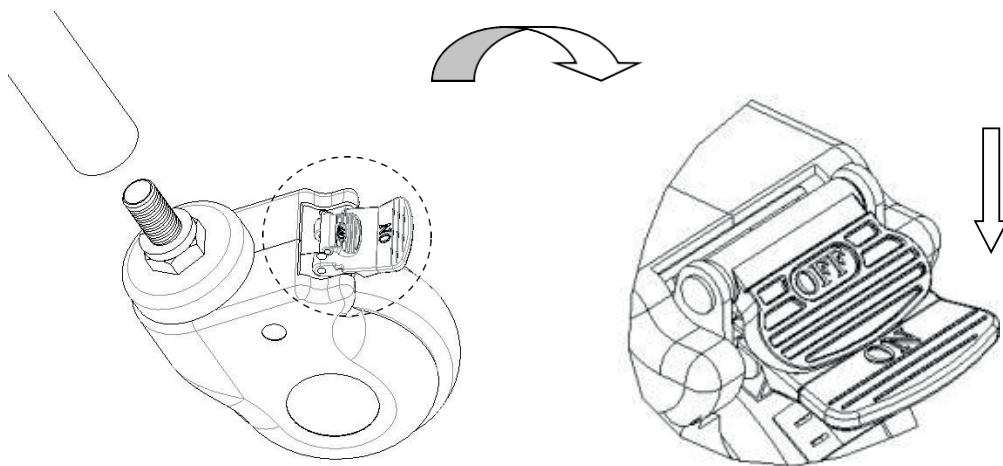

Отключване на колелото: Натиснете бутона Off с крак и отключете колелото, когато чуete "щракване".

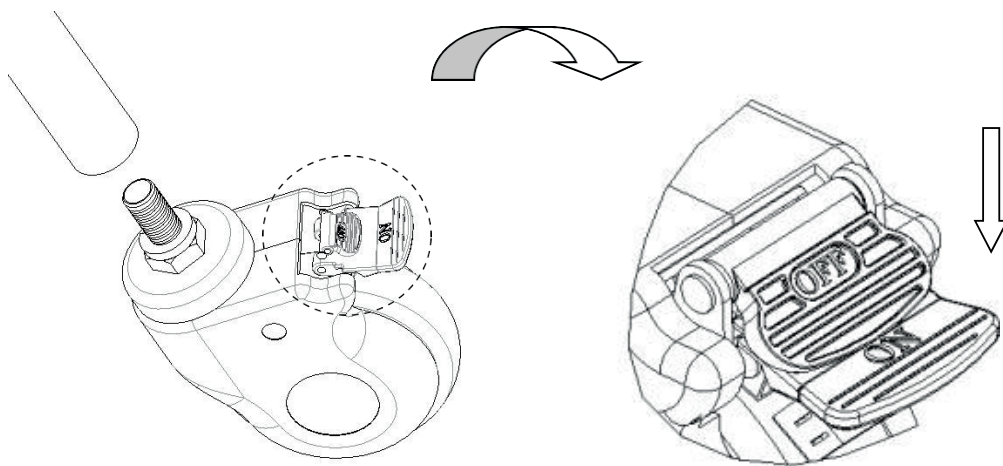

3. ГРЕШКИ ИЗКЛЮЧВАНЕ

Често срещани грешки	Вероятни причини	Методи на изключване
Трудност при преместване на цялата количка	1. Колелото е заключено, без да се освобождава спирачката 2. Колелото е повредено	1. Освободете спирачката 2. Сменете колелото

4. ПОДДРЪЖКА

- За да се използва безопасно количката за спешно отделение, е необходимо да се извършват редовни проверки за безопасност на количката за спешно отделение. Препоръчва се да се проверява на всеки шест месеца, за да се гарантира, че връзките не са разхлабени и всички операции са нормални.
- Когато рамката на количката за спешно отделение остарее и достигне определен период на обслужване, металната част на количката за спешно отделение и пластмасовите части на рамката на количката за спешно отделение могат да бъдат рециклирани.
- Избягвайте надраскване на панела с уреди или ножове с остър ъгъл по време на употреба и го почиствайте често, за да го поддържате чист и сух.
- Ако панелът случайно е замърсен с петна, се препоръчва да го почистите. Не използвайте алкални или корозивни химикали за почистване на количката за спешно отделение, което ще доведе до образуване на ръжда върху повърхността от неръждаема стомана.
- Редовно проверявайте колелата, за да се избегнат удари или претоварване, което ще доведе до повреда на колелата.
- Забранено е да се форсират колелата да спират при спиране, което ще доведе до повреда на спирачната система.
- Износването на повърхността на гумата на колелото може да бъде открито чрез визуална проверка. Около колелото могат да бъдат увити нишки и други натрупвания, отстранете болтовете и гайките на колелото, почистете отломките и проверете дали лагерът на колелото е повреден. Ако частите не са повредени, могат да бъдат сглобени и използвани отново.
- Съдейки дали колелото е заменено според използваното време, износване и разкъсване, можете да смените колелата и да се уверите, че болтовете и гайките на осите са добре сглобени и свързани. Ако е възможно, използвайте заключващи шайби или гайки, за да ви помогнат с този процес.
- За колелата, оборудвани със спирачки, е необходимо редовно да се проверява дали спирачките работят правилно. Проверявайте спирачките веднъж дневно или преди всяка употреба. За количка за спешно отделение, оборудвана с много спирачни колела, може да се заключи само един спирачен механизъм в даден момент, което ще позволи да се опитате да натиснете количката за спешно отделение и да проверите дали една от спирачните характеристики на всяко колело е добра. Ако функционирането на спирачката е неизправно поради износване или повреда на колелата, незабавно сменете колелата и след това тествайте отново спирачната система.
- Ако механизмът на спирачната система на колелото е повреден и спирачката трябва да бъде ремонтирана или заменена, моля, свържете се с нашия отдел за техническо обслужване или оторизирано представителство, предоставено от нашата компания. Всеки път, когато спирачките се сменят, спирачната ефективност на колелата трябва да се подложи на ново тестване.
-

5. ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ

- Опаковането на количката се извършва съгласно договора или стандарта на продукта.
- Избягвайте форсиране, силни вибрации и предпазвайте на слънчева светлина и дъжд по време на транспортиране на количката.
- Количката трябва да се съхранява:
 - Температура на помещението: +5°C ~ +40°C.
 - Относителна влажност: ≤ 85%.
 - Атмосферно налягане: 70 kPa ~ 106 kPa.
 - Максималното натоварване е 50 кг.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA

Прилага се стандартната 12-месечна B2B гаранция (за взаимоотношения между фирми) на фирма Gima.