

CARRELLO PORTABIANCHERIA A 3 RIPIANI

LAUNDRY TROLLEY 3

CHARIOT À LINGE 3 RAYONS

CARRO DE LAVANDERÍA 3 ESTANTES

CARRINHO DE LAVANDARIA 3 PRATELEIRAS

WÄSCHWEGABE MIT 3 ABLAGEN

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3 ΡΑΦΙΩΝ

**WÓZEK DO TRANSPORTU BRUDNEJ
BIELIZNY Z 3 PÓŁKAMI**

CĂRUCIOR PENTRU RUFE 3 RAFTURI

VOZÍK NA PRÁDLO SE 3 POLICEMI

TVÄTTVAGN 3 HYLLOR

WASGOEDWAGEN 3 SCHAPPEN

KOLICA ZA VEŠ 3 POLICE

SZENNYES KOCSI 3 POLCOS

КОЛИЧКА ЗА ПРАHE 3 НИВА

PESUVAUNU 3 HYLLYÄ

**SKALBINIŲ VEŽIMĖLIS SU 3
LENTYNOMIS**

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO - BENUTZERHANDBUCH
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL
- HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ -
VARTOTOJO VADOVAS



Gima 45913

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabri-
cante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent
/ Výrobce / Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó /
производитель / Valmistaja / Gamintojas:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration
Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Impor-
tado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez /
Importat de / Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door /
Uvezao / Importálja / Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

РЪКОВОДСТВО ВЪВЕДЕНИЕ

Забележка: Прочетете внимателно това ръководство и следвайте стриктно стъпките, преди да го инсталирате и използвате. Изискваме от всички потребители да познават ръководството за потребителя и всички предупреждения.




- Това ръководство е приложимо за количка за пране SKH027. Той съдържа метода на монтаж, работните инструкции и точките за проверка на поддръжката.
- Графиките в това ръководство са само за справка на потребителите. При текущата употреба направете справка с реалния предмет.
- Това ръководство за потребителя включва описание, инструкции, поддръжка и технически параметри на продукта.
- При всякакви въпроси се свържете с центъра за следпродажбено обслужване или с дистрибутора.
- Всеки, който използва или работи с този продукт, трябва да го прочете и да спазва указанията в него.
- С изключение на някои непредвидени ситуации, от потребителите се изисква да бъдат запознати с употребата и предпазните мерки.

1. РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

1.1 Списък на стандартните принадлежности

След като отворите опаковката, проверете дали всички, посочени по-долу части, са в опаковката:

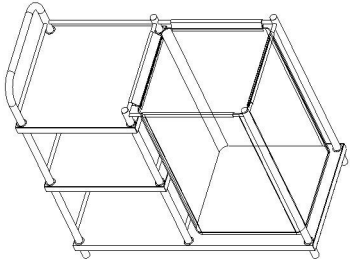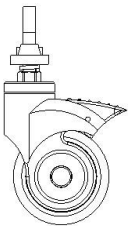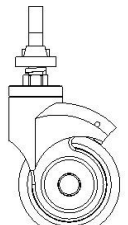
Таблица а:



№	Име	Снимка	Спецификация	Кол.	М. ед.
1	Основен корпус		Д900*Ш450*В930mm	1	бр.
2	Колело със спирачка		3-инчово колело със спирачка	2	бр.
3	Колело без спирачка		3-инчово колело без спирачка	2	бр.

1.2 Монтаж на колелата

Поставете защитна подложка и обърнете корпуса на количката за пране надолу;

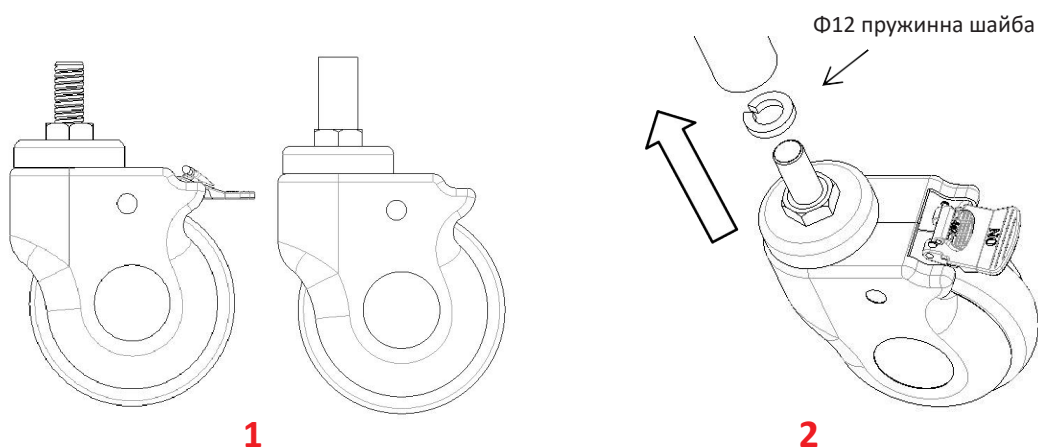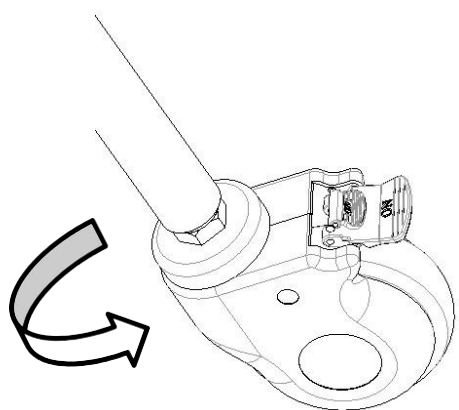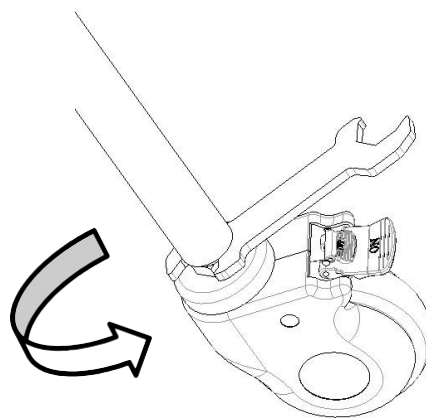Вземете пружинна шайба $\Phi 12$ от комплекта с винтове, поставете колелото в тръбата и го затегнете по часовниковата стрелка, след което го затегнете с ключ шестограм.



**3****4****2. НАЧИН НА УПОТРЕБА****1**

1-Основен корпус

2


2-Колела

Размер на количката за пране	Дължина	mm	900
	Ширина		450
	Височината на количката над земята		1050
Тегло	Безопасно натоварване	Kg	50

2.1 Начин на използване на колелата


2.1.1 Заклучете колелцата:

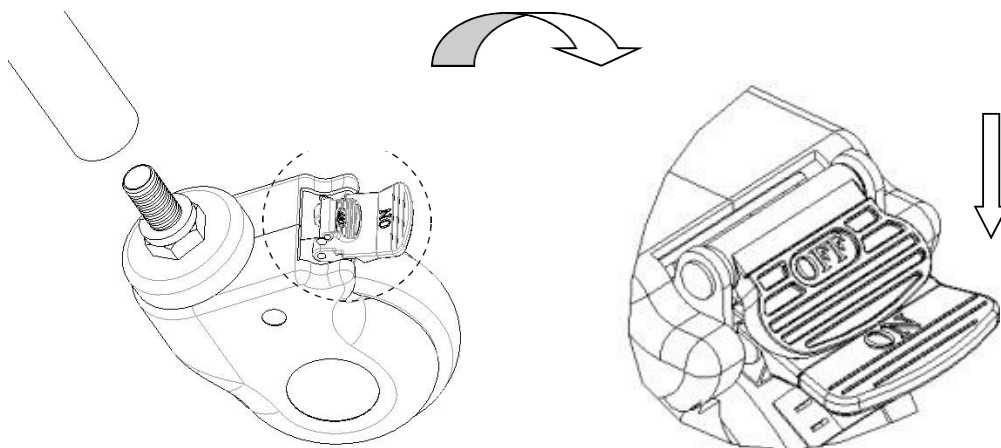След като избутате количката до желаната позиция, натиснете бутона и заклучете колелото, когато чуете „щракване“, както е показано на фигурата по-долу.



2.1.2 Отключване на колелото:

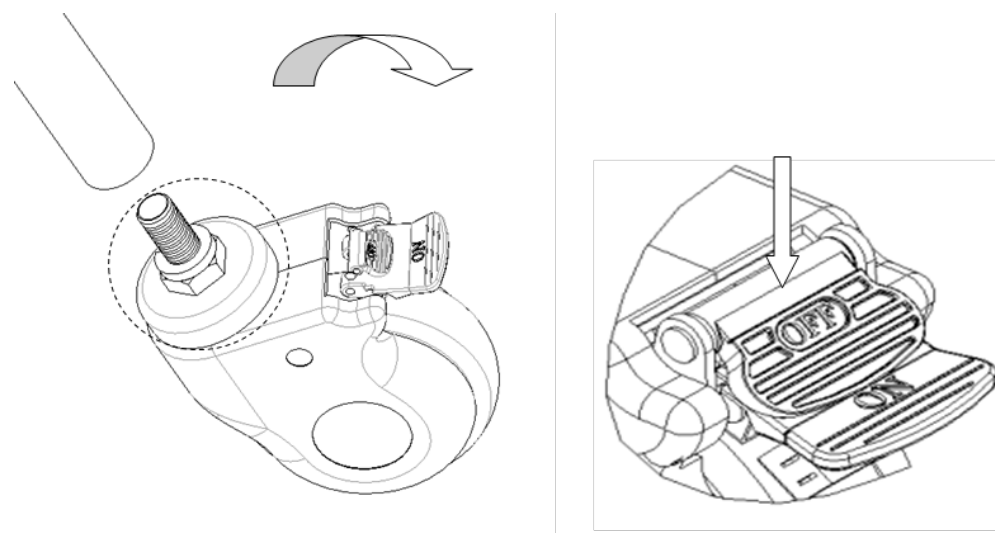Повдигнете бутона с крак и отключете колелото, когато чуете „щракване“.



3. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Често срещани повреди	Вероятни причини	Методи за изключване
Трудно придвижване на цялата количка	- Колелото е блокирано, без да се освобождава спирачката - Колелото е повредено	- Освободете спирачката - Сменете колелото

4. ПОДДРЪЖКА НА КОЛИЧКА ЗА ПРАНЕ

- За да използвате количката за пране безопасно, е необходимо да извършвате редовни проверки за безопасност на количката за пране. Препоръчва се да я проверявате на всеки шест месеца, за да се уверите, че връзките не са разхлабени и че всички операции са нормални.
- Когато рамката на количката за пране остарее и достигне края на експлоатационния си живот, металната част на количката за пране и пластмасовите части на рамката от неръждаема стомана могат да бъдат рециклирани.
- По време на употреба избягвайте надраскване на панела с остри уреди или ножове и го почиствайте често, за да го запазите чист и сух.
- Ако панелът случайно бъде зацапан с петна, се препоръчва да го почистите. За почистване на количката за пране не използвайте алкални или корозивни химикали, които могат да предизвикат ръждясване на повърхността от неръждаема стомана.
- Редовно проверявайте колелцата, за да избегнете удари или претоварване, които ще предизвикат повреда на колелцата.
- Забранено е принудителното спиране на колелцата, което ще доведе до повреда на спирачната система.
- Износването на повърхността на гумата на колелото може да се установи чрез визуална проверка. Около колелото може да се намотаят нишки или влакна и други натрупвания, свалете болтовете и гайките на колелото, почистете остатъците и проверете дали лагерът на колелото е повреден. Ако частите не са повредени, могат да се сглобят обратно и отново да се използват.
- Като прецените според това дали колелото е подменено в зависимост от времето на използване, износване и амортизация, можете да подмените колелата и да се уверите, че болтовете и гайките на осите са добре сглобени и свързани. Ако е възможно, използвайте блокиращи шайби или блокиращи гайки, за да си помогнете в този процес.
- За колелата, оборудвани със спирачки, е необходимо редовно да проверявате дали спирачките работят правилно. Проверявайте

спирачките веднъж дневно или преди всяка употреба. За количка за пране, оборудвана с няколко колелца със спирачки, само едно колелце със спирачка може да бъде заключено в даден момент, което ще Ви позволи да опитате и да бутате количката за пране, а също така да проверите дали работата на спирачката на всяко колело е добра. Ако функцията на спирачката не е изрядна поради износване или повреда на колелата, незабавно подменете колелата и след това проверете отново спирачната система.

10. Ако механизмът на спирачната система на колелото е повреден и спирачката трябва да бъде ремонтирана или подменена, се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване или с оторизиран търговец, осигурен от дружеството ни. При всяка смяна на спирачките спирачната ефективност на колелцата трябва отново да се провери.

5. ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ

1. Опаковането на количката се извършва в съответствие с договора или продуктивния стандарт.
2. По време на транспортирането на количката за пране избягвайте бързанае, силни вибрации и я защитете от слънчева светлина и дъжд.
3. Количката за пране трябва да се съхранява:
 - а) Температура на околната среда: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$.
 - б) Относителна влажност: $\leq 95\%$.
 - в) Атмосферно налягане: $500\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$. Максималното натоварване е 50 kg

6. СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Съхранявайте файловете, които се предоставят заедно с машината, и фактурите за този продукт, правилно, тъй като трябва да представите тези файлове, когато дружеството извършва гаранционна поддръжка и поддръжка на продукта.
2. Ако по време на употреба, възникне някакъв проблем, се свържете навреме с дружеството ни, за да можем своевременно да Ви осигурим точна и бърза техническа поддръжка и услуги по поддръжката.
3. От датата на продажбата, ако продуктът е счупен или повреден, при правилен монтаж и употреба съгласно спецификацията, за продукта се предоставя едногодишна безплатна гаранция и доживотна услуга за поддръжка със „сертификат“ или фактура.
4. От датата на покупката, ако той действително е повреден или не работи нормално поради проблеми с качеството, в рамките на една година, дружеството ще осигури на потребителите безплатен ремонт на продукта.
5. Доживотно обслужване от производителя: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA

Прилага се стандартната 12-месечна B2B гаранция (за взаимоотношения между фирми) на фирма Gima