


- I Semi-maschere filtranti monouso
- GB Single-use filtering half-masks
- D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
- F Demi-masques filtrants jetables
- E Semimáscaras filtrantes desechables
- P Semimáscaras filtrantes de utilização única
- TR Tek kullanımlık filtreli yarım yüz maskeleri
- NL Halvegeleatsmasker met filter voor eenmalig gebruik
- S Filterande halvmasker för engångsbruk
- FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit
- CZ Filtrační polomaska na jedno použití
- PL Maski ochronne jednorazowego użytku
- GR Ημιμάσκαες διήθησης μιας χρήσης
- HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

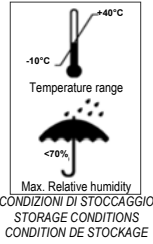

CECO	NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
<p><b>DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:</b> Zde popsané filtrační polomasky na jedno použití jsou rozdělené do 3 tříd - FFP1, FFP2 a FFP3. Před použitím zjistíte podle normy EN149:2001+A1:2009, do které třídy maska patří a je-li vhodná pro stanovené použití - třída je uvedena na obalu anebo na polomasce. Datum, do kterého je nutné výrobek použít, je uvedený na jeho obalu.</p> <p><b>POUŽITÍ:</b> ochrana proti pevným nebo tekutým aerosolům a prachu (např. olejové mlhy)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>FFP3</p> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>FFP2</p> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin: 0 auto;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>FFP1</p> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin: 0 auto;"></div> </div> </div> <p>Před použitím masky doporučujeme zkontrolovat její neporušenost. Jestliže si všimnete poškození a/nebo skvrn, vyžádejte si náhradní masku. Symbol NR v označení uvádí, že maska není znovu použitelná a že ji musíte na konci pracovní směny vyhodit. Symbol D značí, že masky vyhověly zkoušce pro stanovení zanášení dolomitovým prachem. Ochrana nabitými filtračními polomaskami FFP3 a FFP2 zahrnuje ochranu stanovenou pro třídu FFP1.</p> <p><b>POKYNY PRO NASAZENÍ MASKY:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vsuvte do masky jeden prst. Zakřivte nosní můstek kolem prstu tak, abyste dali masce tvar nosu.</li> <li>2. Vezměte masku do ruky, nasadte spodní část gumíčky na hlavu a vhodně ji umístěte pod ušima.</li> <li>3. Nadzvedněte horní část gumíčky a položte ji na horní část hlavy, nad uši.</li> <li>4. Pomocí obou ruk vytvarujte případně přítomný "talic" kolem nosu a nastavte napnutí horní a spodní část gumíčky pomocí příslušné průchodky, je-li k dispozici, pro zajištění správného přilnutí k obličeji.</li> <li>5. (a) Test pro kontrolu správného umístění masky bez ventilu: Položte ruce na masku podle obrázku 5 a hluboce vdechněte. (a) Test pro kontrolu správného umístění masky s ventilem: Položte ruce na masku podle obrázku 5 a hluboce vdechněte. Jestliže bude po bocích masky vycházet vzduch, anebo jestliže do masky vnikne vzduch přes boční části, upravte polomasku na obličeji a v případě potřeby utáhněte gumíčku, je-li k dispozici průchoďkařátko.</li> <li>6. V případě problémů s dýcháním, poškození masky nebo problémů týkající se přilnutí k obličeji masku hned vyměňte. Dodržování těchto pokynů je základní podmínkou pro bezpečné používání masky.</li> </ol> <p><b>UPOZORNĚNÍ: [OOP – Osobní ochranný prostředek]</b></p> <p>Jestliže není možné zajistit adekvátní přilnutí masky k profilu obličeje, nevstupujte do prostředí, která představují potenciální riziko. Nedodržení tohoto nařízení může způsobit nesprávné používání OOP a může zapříčinit nemoci nebo smrt. / Vhodně zvolená maska je nezbytným předpokladem pro zajištění ochrany zdraví. Před použitím OOP se obraťte na osobu vyškolenou v oblasti průmyslové hygieny nebo na pracovníka se zkušenostmi ohledně pracovní bezpečnosti pro stanovení toho, jestli je prostředek vhodný k danému použití nebo ne. / Tento výrobek nedodává kyslík. Používejte pouze v řádně větraných prostředích s úrovní kyslíku dostatečnou pro zajištění života. Limity týkající se přítomnosti kyslíku v určitém kontextu pro použití těchto masek se mohou v jednotlivých státech lišit, a proto odkazujeme na parametry stanovené státem, ve kterém se bude používat. Eleco s.r.l. nicméně nedoporučuje používat masku v prostředích s koncentrací kyslíku nižší než 19.5%. / Nepoužívejte v případě, že je koncentrace kontaminačních látek bezprostředně nebezpečná pro zdraví a život. / Nepoužívejte v prostředí s nebezpečným výbuchem. / V případě, že začnete mít těžkosti s dýcháním (a) anebo (b) zaznamenáte pocit úzkosti či závratě, okamžitě opusťte pracoviště. / Vousy či dýchací choroby snižují účinnost těchto filtračních polomasek. / Někdy filtrační polomasku neupravíte a neměňte. / Pouze k jednomu použití. Nevýžaduje si údržbu. / Po prvním použití polomasku vyřadte. / Skladujte nepoužité polomasky v neporušeném obalu, daleko od slunečního světla. – Identifikační kód modelu je uvedený na obalu výrobku.</p>	