



Uvedení do provozu

Zapojte kabel napájecího adaptéru do konektoru v zadní části vážící platformy.

Vážení

Není nutné váhu zapínat, stačí vstoupit na vážící platformu.

Měření výšky s výpočtem BMI

Opatrně vstaňte měřící tyč, odklopte opěrku pro hlavu. Po manuálním změření výšky pacienta se změřená hodnota zobrazí na displeji (cm). Následně se na displeji zobrazí hodnota BMI (Body-Mass-Index).

Tárování

Stiskněte funkční tlačítka na zadní straně displeje pro vytárování váhy. Na displeji se zobrazí "0,0 kg" a váha je připravena k použití.

Funkce "Matka s dítětem"

- Při vstupu matky na váhu se na displeji váhy zobrazí např. "47,6 kg"
- Po stisknutí funkčního tlačítka pro tárování se na displeji zobrazí hodnota "0,0 kg"
 - Pokud matka odejde z vážící platformy, pak se na displeji objeví "-47,6 kg"
 - ... poté může matka vstoupit na váhu s dítětem a na displeji se zobrazí změřená hmotnost dítěte, např. "5,1 kg"

Tárovat lze postupně a několikrát za sebou.

Vypnutí


Váha se automaticky po 15 sekundách vypne, pokud je na displeji zobrazena hodnota "0,0 kg".

Změna jednotky vážení

- Váha je standardně nastavena v jednotkách vážení "kg".
Prosím postupujte následovně, pokud chcete změnit jednotky vážení:
- Vložte napájecí adaptér ze zásuvky
 - Stiskněte a přidržte funkční tlačítka a současně zapojte napájecí adaptér do zásuvky
 - Na displeji se zobrazí vážení v jednotkách "lbs".

Po sestoupení matky s dítětem z váhy se na displeji zobrazuje hodnota "-47,6 kg". Funkčním tlačítkem můžete váhu opět nastavit na hodnotu "0,0 kg". Váha se automaticky nepřepne na "0,0 kg", aby se mohlo několikrát za sebou tárovat.

Lengtemetning med BMI-weergave
Højdemåler med BMI-display
Medición de altura con indicación de IMC
Misura di altezza con display BMI
Pituuden mittaus BMI-näytöllä
Längdmätning med BMI-indikering
Längdmätning med BMI-visning
Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI (δείκτη μάζας σώματος)
BMI göstergesi ile boy ölçümü
Měření výšky s údajom o BMI
Měření výšky s výpočtem BMI
Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI
Измерение длины с индикацией индекса массы тела (BMI)

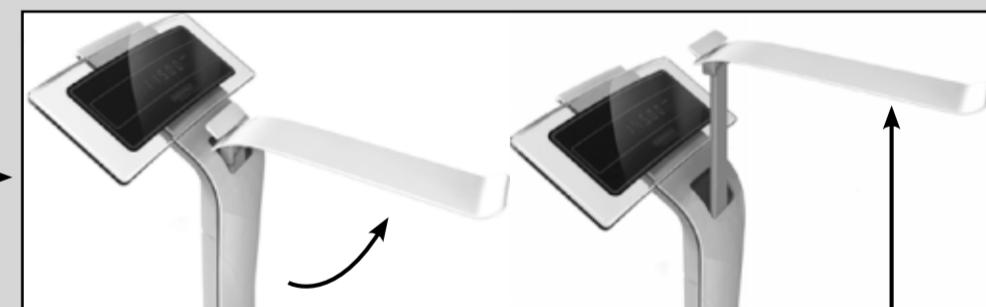

Functietoets
Funktionsknapp
Tecla de funci3n
Tasto funzione
Toimintopainike
Funktionsknapp
Funktionsstast
Πάκτρο λειτουργίας
Fonksjon tustu
Funkčné tlačidlo
Funkční tlačítka
Przycisk funkcyjny
Функциональная клавиша

Resettoets
Reset-knapp
Tecla de reset
Tasto Reset
Nollauspainike
Reset-knapp
Reset-tast
Πάκτρο επαναφοράς
Reset tustu
Tlačidlo Reset
Reset tlačítka
Przycisk reset
Кнопка сброса (Reset)

Service-interface. Opcje: USB-interface
Serviceinterface. Ekstraudstyr: USB-port
Interfaz de servicio. Opcional: Interfaz USB
Interfaccia di servizio. Opzione: Interfaccia USB
Huoltoliitäntä. Lisävaruste: USB-liitäntä
Servicegränssnitt. Tillval: USB-gränssnitt
Servicegränssnitt. Alternativ: USB-gränssnitt
Διενομήτ ορββίς, Προοριετικώ: Διενομήτ USB
Servis bađlanti yeri, Isteđe bađli: USB bađlanti yeri
Servisné rozhranie. Alternativa: USB rozhranie
Servisni rozhrani. Option: USB rozhrani
Złącze serwisowe. Opcja: interfejs USB
Сервисный интерфейс. Опция: USB-интерфейс

