



1 Instalace baterií

Návod k obsluze 2

IM2-HEM-6181-E-CZ-05-04/2022

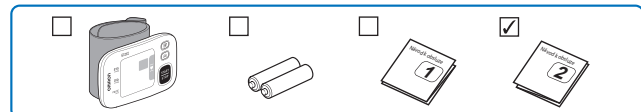


Před použitím si přečtěte návod k obsluze 1 a 2.

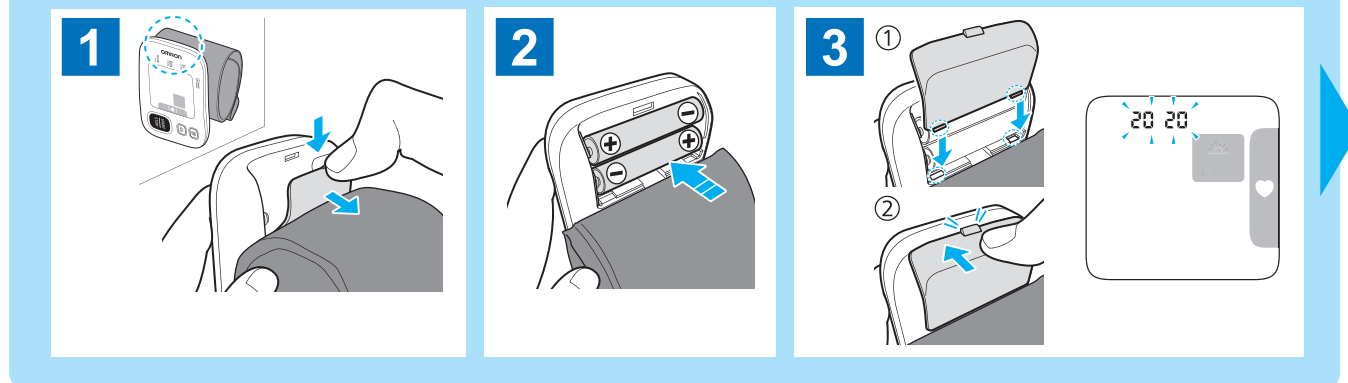


All for Healthcare


2 Nastavení data a času

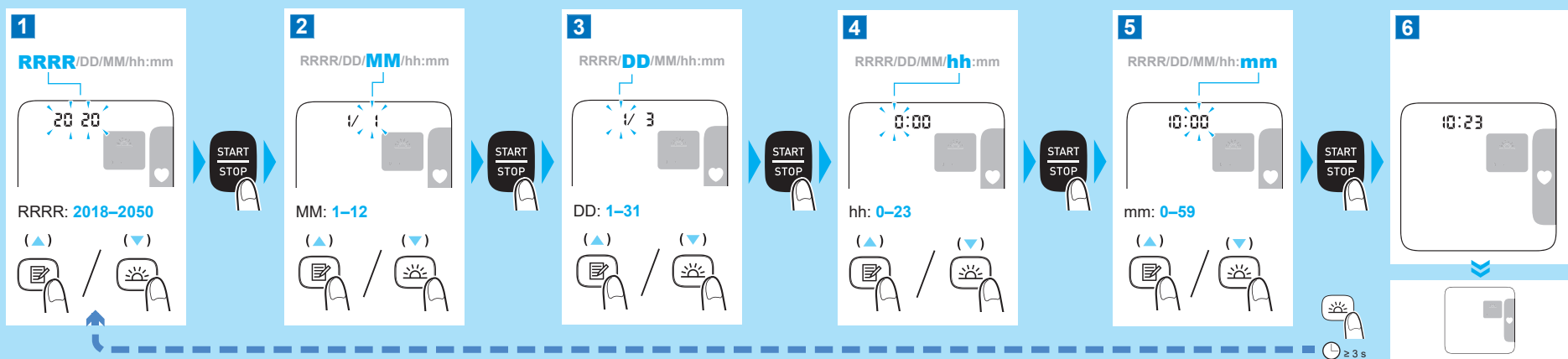


3 Nasazení manžety na zápěstí

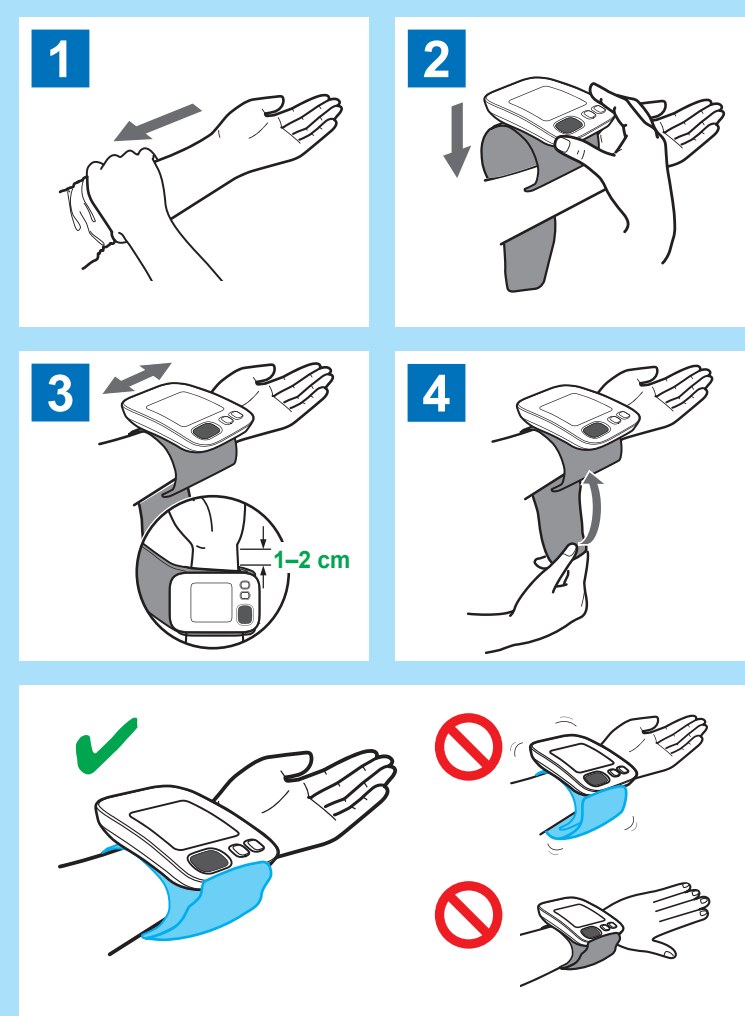

4 Správné sezení


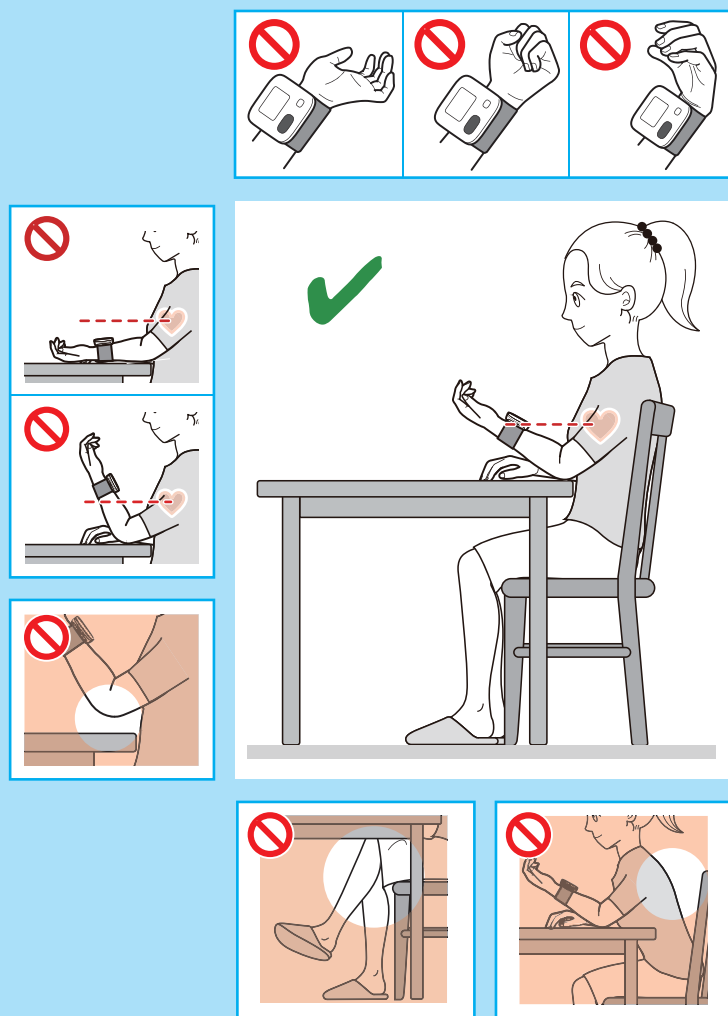


5 Měření

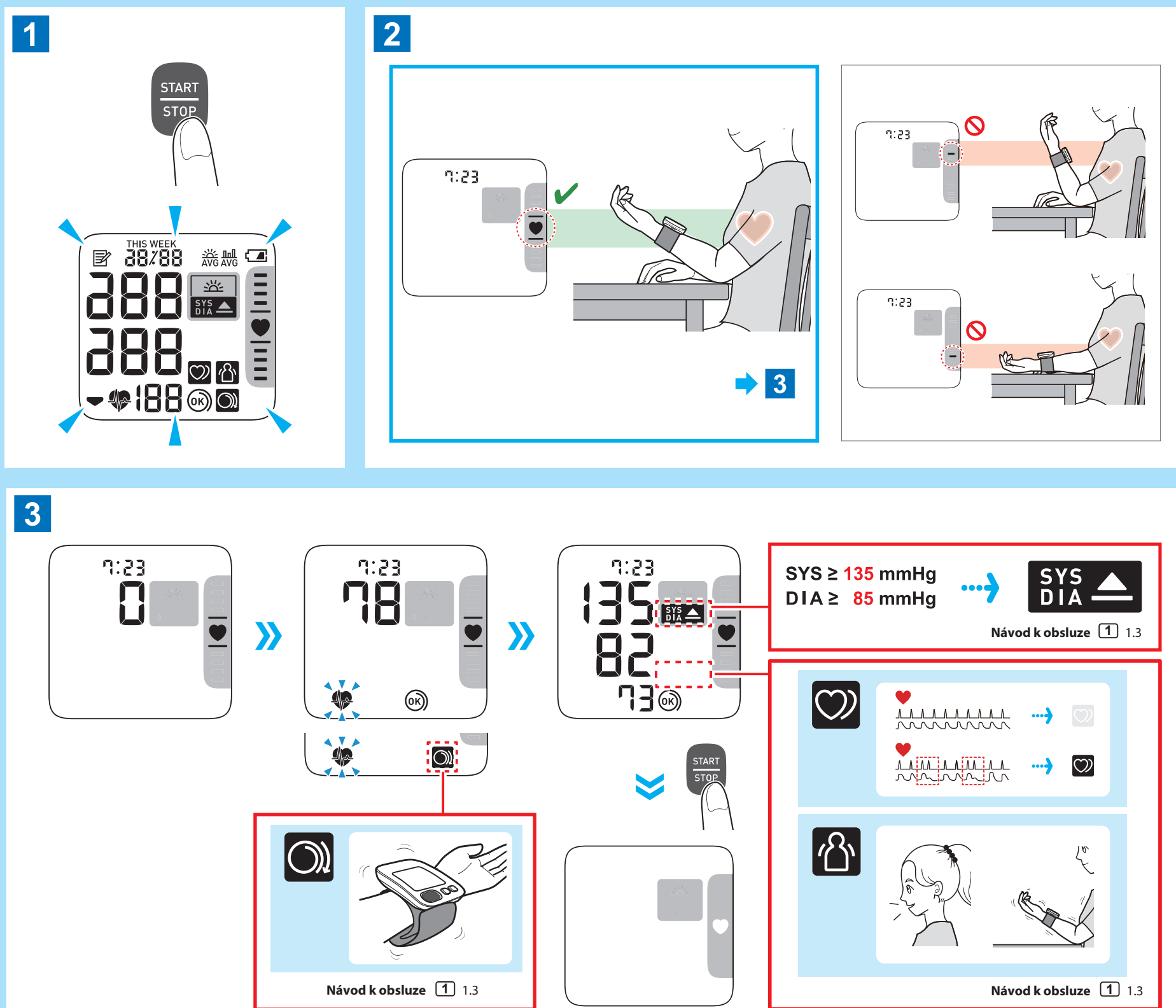




Prohlížení uložených naměřených hodnot

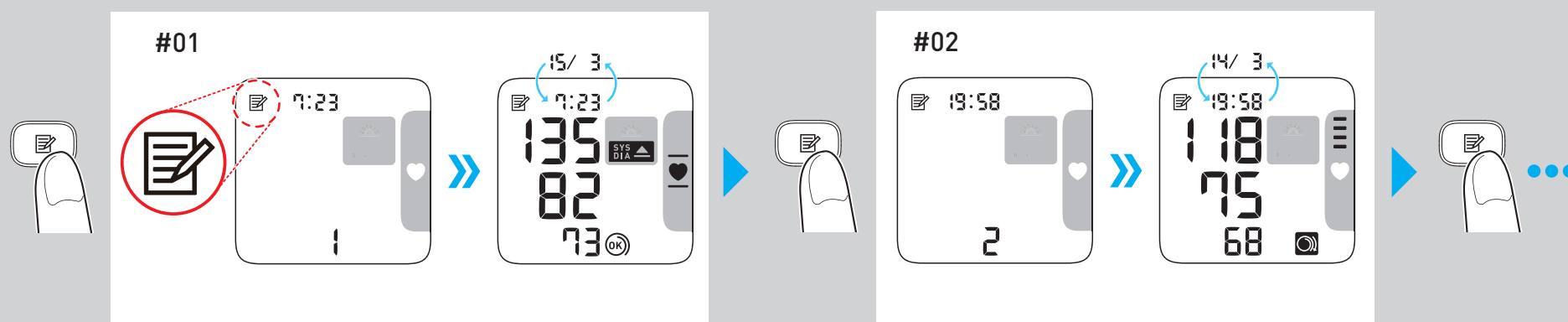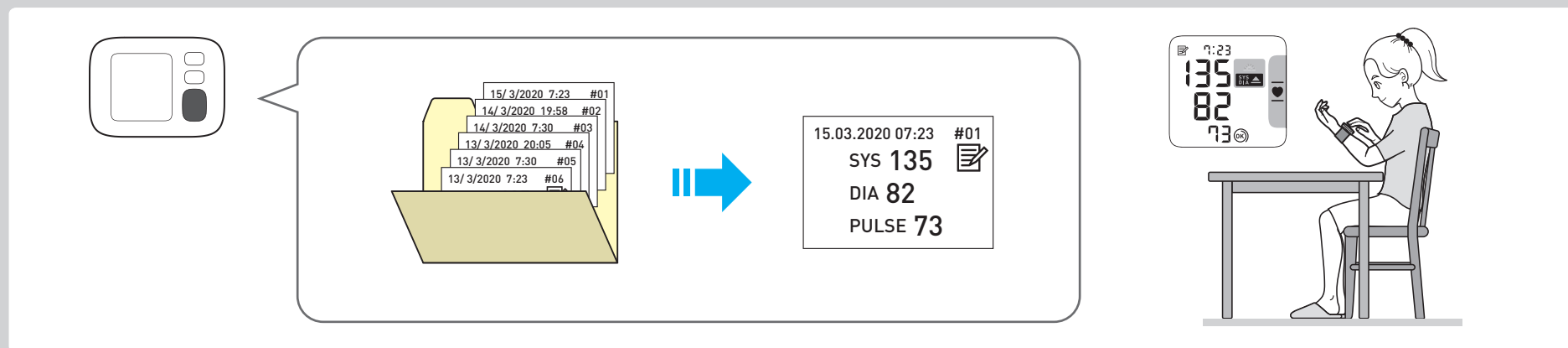

Smazání všech naměřených hodnot uložených v paměti

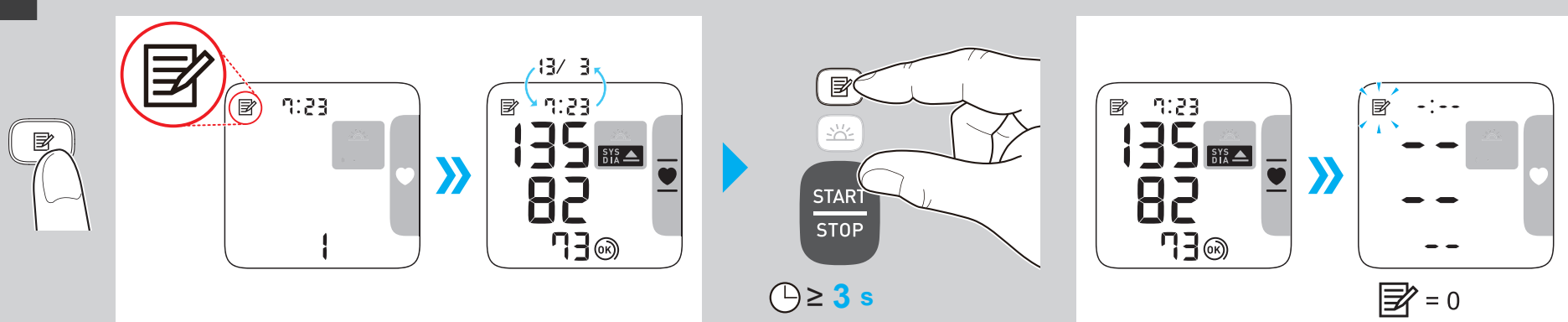

Popis symbolů

	Příložná část – typ BF: Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem (svodový proud)		Omezení teploty
	Indikuje správnou polohu měřiče na zápěstí. Měřitelný obvod zápěstí 13,5-21,5cm		Omezení vlhkosti
IP XX	Stupeň ochrany proti vniknutí zajišťovaný normou IEC 60529		Omezení atmosférického tlaku
CE	Označení CE		Uživatel si musí prostudovat tento návod k obsluze.
UK CA	Certifikace UKCA		Uživatel musí pečlivě dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze kvůli zajištění bezpečnosti
SN	Sériové číslo		Baterie/článek
UDI	Jedinečná identifikace prostředku (UDI)		Stojnosměrný proud
MD	Zdravotnický prostředek		Datum výroby

Výrobce 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zástupce pro EU 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Dovozce do EU	
Výrobní závod	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Pobočky	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Datum vydání	2022-06-27