



hadičkou s funkcí proti stlačení, u kterých sice rovněž existuje riziko snížení průtoku, i když v omezené míře.

Tento produkt obsahuje ftaláty (DEHP). I když není potvrzeno riziko pro lidské zdraví, použití produktu u těhotných/kojících žen nebo dětí by měl posoudit lékař.

Použití nosních kanyl může být spojeno s krvácením z nosu u osob náchylných ke krvácení a/nebo na antikoagulační terapii.

Koncentrovaný kyslík může zapálit hořlavé materiály. Abyste se vyhnuli riziku požáru nebo výbuchu, držte se mimo dosah možných zdrojů vznícení a prostudujte si bezpečnostní opatření pro použití produktu používaného pro dodávku kyslíku.

SKLADOVÁNÍ

Produkt musí být skladován v původním obalu při podmínkách prostředí (teplota a relativní vlhkost) uvedených na štítku balení. Při umístění těžkých závaží na obal může dojít k poškození obalu.

OBECNÉ POZNÁMKY

Pokud během používání tohoto zařízení nebo v důsledku jeho používání dojde k nežádoucí příhodě, nahlase to výrobci a vaší národní autoritě. V případě jakékoliv poruchy nebo závady zařízení se obraťte Servis Kvality Výrobce.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

S odpady pocházejícími ze zdravotnických struktur musí být nakládáno podle platných předpisů.

CS NOSNÍ KANYLA PRO OXYGENTERAPII NÁVOD K POUŽITÍ

INDIKACE

Terapeutické podávání kyslíku nosem.
Jednorázový přípravek (pro jednoho pacienta), který se má používat nepřetržitě po dobu nepřesahující 30 dnů.
Zdroj kyslíku musí být v souladu s platnými předpisy.
Produkty musí používat kvalifikovaný zdravotnický personál.

POKyny

Opatrně zaveďte nosní distributor do každé z nosních dírek a postupujte tak, jak je popsáno níže pro každý model nosní kanyly.
Držte nosní distributor na místě a protáhněte pravou i levou hadičku přes ušní oblouky dolů přes čelisti až pod bradu. Nastavte hadičku pomocí plastového kroužku.
Připojte konec spojovací hadičky ke zdroji kyslíku. Když je zařízení správně nasazeno, dodávejte kyslík a regulujte průtok podle potřeby.

KONTRAINDIKACE

Nejsou popsány žádné kontraindikace.

VAROVÁNÍ:

Pokud je produkt znovu použit v rozporu s těmito pokyny, může to znamenat:

- změnu materiálů
- nečistotu produktu a možný výskyt biologických zbytků, které by mohly způsobit křížové infekce
- ztrátu původních funkčních vlastností produktu.

Před připojením ke zdroji kyslíku ověřte jeho funkci. Náhodné stlačení spojovací hadičky neumožní správné proudění kyslíku a může způsobit odpojení konektoru. Proto se doporučuje pečlivá kontrola uživatelem. Stejnou pozornost je třeba věnovat i modelům, které jsou dodávány s

СИМВОЛИ - VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ - ZNAČENJE SIMBOLA - JELMAGYARÁZAT - SIMBOLIŲ LEGENDA - SIMBOLU APŽĪMĒJUMI - LEGENDĂ DE SIMBOLURI

	BG	CS	HR	HU	LT	LV	RO	SR
	Съответства на действащото европейско законодателство относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	U skladu s važečím evropskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó jelenlegi európai jogszabályoknak	Atitinka galiojančius Europos teisės aktus dėl medicinos priemonių	Atbilst pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm	Conform cu legislația europeană în vigoare privind dispozitivele medicale	Usaglašeno sa tekućim evropskim propisima o medicinskim sredstvima
	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinski proizvod	Orvosteknikai eszköz	Medicinos priemonė	Medicīniska ierīce	Aparat medical	Medicinsko sredstvo
	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Egyedi eszközazonosító	Unikalusis priemonės identifikatorius	Ierīces unikālais identifikators	Identificator unic al unui dispozitiv	Jedinstveni identifikator uređaja
	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Proučite upute prije korištenja	Consult használati utasítás	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju	Consultați instrucțiunile de utilizare	Konsultujte instrukcije za upotrebu
	Производител	Výrobce	Proizvođač	Gyártó	Gamintojas	Ražotājs	Producător	Proizvođač
	Дистрибутор	Distributor	Distributer	Forgalmazó	Platintojas	Izplatītājs	Distribuito	Distributer
	Каталожен номер	Katalogové číslo	Kataloški broj	Katalógus száma	Katalogo numeris	Kataloga numurs	Număr de catalog	Kataloški broj
	Партиден номер	Číslo šarže	LOT	Batch kód	Partijos kodas	Partijas kods	Cod de Lot	Serijski broj
	Дата на производство	Datum výroby	Datum proizvodnje	Gyártás dátuma	Pagaminimo data	Ražošanas datums	Data de fabricație	Datum proizvodnje
	Използвай при	Spotřebujte do	Használata által	Használata által	Tinka iki	Izmantošanai	Data limită de utilizare	Rok upotrebe
	Температурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturni raspon	Hőmérséklet korlátozás	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums	Limite de temperatură	Ograničenje temperature
	Ограничения на влажността	Omezení vlhkosti	Raspon vlažnosti zraka	Páratartalom korlátozás	Drėgnio apribojimas	Mitruma ierobežojumi	Limite de umiditate	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Пазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Štititi od direktnog sunčevog svjetla	Tartsa távol a napfénytől	Saugoti nuo saulės spindulių	Nepakļaut produkta atrašanās tiešā saules gaismā	A se feri de razele soarelui	Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Mennyisége darabok	Počet kusů	Količina komada	Mennyisége darabok	Dalių kiekis	Vienumu daudzums	Număr de bucăți	Količina komada
	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Ne sadrži prirodnu gumu i lateks	Nem tartalmaz természetes gumi latex	Sudėtyje nėra latekso	Nesatur dabīgās gumijas lateksu	Nu conține cauciuc natural (latex)	Ne sadrži prirodnu gumu lateks
	Не се допуска повторна употреба	Nepoužívat opakovaně	Nemojte ponovno koristiti	Ne használja újra	Pakartotinai nenaudoti	Nelietot atkārtoti	A nu se reutiliza	Zabranjena ponovna upotreba
	Съдържа фталати	obsahuje ftaláty	Sadrži ftalate	Tartalmazza ftalátok	Sudėtyje yra ftalatų	Satur ftalātus	Conține ftalați	Sadrži ftalate