

CENTRIFUGAČNÍ ZKUMAVKY

DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK IN VITRO SE ZNAČKOU CE
Pro profesionální použití ve zdravotnictví

Typ vzorku: vzorek krve, séra nebo moči

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1) Zkontrolujte správnost informací o produktu a neporušenost obalu.
- 2) Napište na štítek příslušné informace (jméno pacienta, test, vzorek atd.).
- 3) Otevřete centrifugační zkumavku.
- 4) Pomocí vhodného nástroje vložte vzorek do zkumavky za účelem ředění, skladování, centrifugace, bakteriální kultivace nebo jiného použití.
- 5) Centrifugační zkumavku dobře uzavřete víčkem, aby se zabránilo jakémukoli úniku během centrifugace.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

- Prostředek je navržen pro zdravotnické pracovníky.
- Používejte ochranné rukavice.
- Neumisťujte prostředek do blízkosti plamene.
- Výrobek nepoužívejte, pokud došlo k jeho poškození, otevření obalu nebo pokud uplynulo datum expirace.
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Prostředek používejte pouze s vhodným příslušenstvím.
- Skladujte na suchém místě, mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření.
- Výrobek zlikvidujte v souladu s platnou legislativou v nádobě na biologický odpad.
- Prostředek je určen na jedno použití. Opětovné použití prostředku bude mít za následek ztrátu všech funkcí a vlastností.
- Pokud dojde v souvislosti s tímto prostředkem k jakémukoli závažnému incidentu, musí být nahlášen výrobci a příslušnému orgánu země, ve kterém pacient pobývá.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

