

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. PŘED POUŽITÍM SE PORADTE S LÉKAŘEM.

KONTRAINDIKACE: Není určeno pro osoby s hmotností nad 110 kg (242 liber) – Není určeno pro použití na ledu nebo klzkém povrchu. - Není určeno pro osoby s alergií na latex.

NAVOD K POUŽITÍ: Chcete-li hůl rozložit, uchopte rukojeť a nechte skládací části tyče se rozložit směrem k podlaze. Aby se zabránilo pádům, vždy zkontrolujte, zda jsou jednotlivé segmenty tyče (obr. 1) pevně zajištěny na svém místě.

VAROVÁNÍ NEROZEBÍREJTE tělo hole. Hůl obsahuje uvnitř elastickou šňůru. Nekontrolované uvolnění elastické šňůry uvnitř může způsobit vážné poranění nechráněných částí těla, zejména očí. Přestaňte používat, pokud je elastická šňůra přetřžená, roztržená nebo poškozená.

NENAPÍNEJTE šňůru více, než je nutné pro demontáž nebo montáž segmentů.

UPRAVENÍ VÝSKY HOLE: Uvolněte otočnou pojistku otočením ve směru hodinových ručiček o několik otáček. Stiskněte zajišťovací tlačítko a zatáhněte za rukojeť, aby se prodloužila, nebo rukojeť zatlačte dolů, aby se zkrátila. Po nastavení hole na požadovanou výšku nezapomeňte znovu utáhnout otočnou pojistku.

VAROVÁNÍ Aby se zabránilo pádům, vždy se ujistěte, že jsou jednotlivé segmenty tyče pevně zajištěny na svém místě a že je zajišťovací tlačítko na konci tyče zcela zavčasnuto. Vždy se ujistěte, že je otočná patka hole pevně přišroubována k holi, aby se zabránilo pádům.

SKLADÁNÍ HOLE: Hůl lze snadno složit do praktické velikosti pro cestování oddělením 4 jednotlivých segmentů tyče od sebe. Uchopte

jednotlivé segmenty hole v blízkosti spoje a rozpojte je tahem od sebe. Jednotlivé segmenty tyče hole lze dokonale složit k sobě. **POUŽITÍ SVĚTEL NA VAŠÍ HOLI:** Tlačítkem na horním konci hole lze aktivovat světla. Jedním stisknutím tlačítka se rozsvítí světlo v přední části hole, dalším stisknutím se rozsvítí také červené světlo na spodní straně rukojeti a třetím stisknutím se světla zhasnou. Přední světlo lze otočením nasměrovat podle potřeby.

SOS SIGNAL: Pro aktivaci signálu SOS stiskněte tlačítko na boku rukojeti, kontrolka na spodní straně začne blikat a hůl vydá výstražný zvukový signál.

VÝMĚNA BATERIÍ: Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně rukojeti. Vyjměte všechny vybité baterie a zlikvidujte je vhodným způsobem. Použijte 2 baterie AAA a vložte je se správnou polaritou (kladný pól směrem ven, kde se nachází pružina). Zavřete kryt přihrádky na baterie. Pravidelně kontrolujte hůl, zda nevykazuje známky opotřebení, včetně roztržení elastické šňůry nebo opotřebení gumových nožiček. Pokud zjistíte známky opotřebení, okamžitě přestaňte hůl používat.

VAROVÁNÍ Nepoužívejte společně staré a nové baterie. Nepoužívejte společně alkalické, standardní (zinkové-uhlíkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.

ZÁRUKNÍ PODMÍNKY GIMA: Platná standardní 12měsíční záruka B2B společnosti Gima.

