


POKYNY K POUŽITÍ MINI ROTOPEDU

1. Vyjměte mini rotoped z krabice a zacházejte s ním opatrně. Podívejte se na obrázek 1.
2. Položte tělo mini rotopedu na rovnou podložku a nasadte na šroub s knoflíkem A, jak je znázorněno na obrázku. Podívejte se na obrázek 2.
3. Otočte šroubem A tak, aby osa B byla správně přitlačena (otočením doleva se tlak zvyšuje, otočením doprava se tlak snižuje). Zapněte tlačítko C počítadla a otočte osou B. Zařízení se okamžitě spustí. Podívejte se na obrázek 3. (podrobnosti najdete v návodu k počítadlu.)
4. Po použití zatáhněte za kolík O směrem dovnitř a dobře jej zahněte, jak je znázorněno na obrázku 5.
5. Poznámka:
 - (1) Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení stabilně umístěno a ve stejné výšce;
 - (2) Nezapomeňte před používáním nastavit minimální tlak a poté jej zvyšujte, až dosáhnete požadované hodnoty;
 - (3) Vhodné pro: dospělé, děti, seniory;

UPOZORNĚNÍ: Nesnažte se stát na mini rotopedu, mohlo by dojít k poškození stroje.

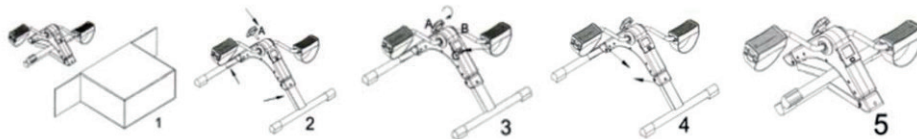

NÁVOD K OBSLUZE TRÉNINKOVÉHO POČÍTAČE

SPECIFIKACE:

TIME -----00:00:59MIN
COUNT-----0-9999
REPS/MIN-----0-9999
CALORIE -----0-9999KAL

FUNKCE TLAČÍTEK:

MODE: Tímto tlačítkem můžete vybrat a aktivovat libovolnou konkrétní funkci, podržením tlačítka po dobu 4 sekundy lze resetovat všechny hodnoty funkcí.


OPERAČNÍ POSTUPY:

AUTO ON/OFF: Systém se zapne po stisknutí libovolného tlačítka nebo po detekci signálu ze snímače rychlosti. Monitor se automaticky vypne, pokud během 4 minut nepřijme žádný signál.

FUNKCE:

TIME Stisknutím tlačítka režimu MODE dokud „>“ neoznačí čas TIME. Když snímač rychlosti zaznamená nějaký vstupní signál, začne odpočítávat a automaticky sčítá čas cvičení od začátku cvičení. **COUNT** Když „>“ ukazuje na odpočítávání COUNT, počítač zobrazí kroky. Jakmile snímač rychlosti zaznamená nějaký vstupní signál, začne odpočítávat a automaticky sčítá počet cvičení od začátku cvičení. **REPS/MIN** Stisknutím tlačítka režimu MODE, dokud symbol „<“ neoznačí REPS/MIN, jakmile snímač rychlosti zaznamená nějaký vstupní signál, začne odpočítávat a automaticky sčítá počet cvičení od začátku cvičení. **CALORIE** Stisknutím tlačítka režimu MODE, dokud symbol „<“ neoznačí kalorie CAL. Když snímač rychlosti zaznamená nějaký vstupní signál, začne odpočítávat a automaticky sčítá kalorie spálené od začátku cvičení. **SCAN** Když „>“ označí SCAN, počítač automaticky zobrazí následující funkce v následujícím pořadí: TIME-----COUNT--STRIDES-----CALORIES

POZNÁMKA 1.Spec. baterie:1,5V, LR44 (1kus) - 2. Pokud se obraz na monitoru nezobrazuje správně, vložte baterie znovu. - 3. Postup montáže baterie:

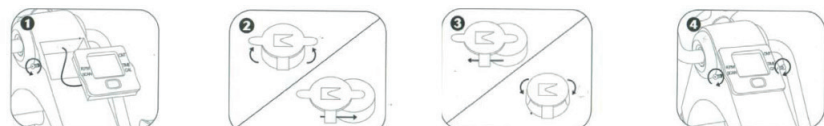

Povolte a odstraňte šrouby na obou stranách obrazovky a poté ji opatrně vyjměte z patice.

Na zadní straně obrazovky zvedněte jazyčky baterie a vsuňte baterii

Vložte novou baterii 1,5 V AG13 (kladným pólem dolů a zavřete západky.

Vložte obrazovku zpět do patice a zajištěte ji šroubem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151