



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FORBICI PER BENDE
BANDAGE SCISSORS
CISEAUX À BANDAGES
TIJERAS PARA VENDAS
VERBANDSCHERE
TESOURAS PARA LIGADURAS

REF	
CR-SC01	4.7" (GIMA 20560)
CR-SC01	6.5" (GIMA 20570)
CR-SC01	6.5" (GIMA 20571)
CR-SC01	6.5" (GIMA 20572)
CR-SC01	6.5" (GIMA 20573)
CR-SC01	6.5" (GIMA 20574)
CR-SC01	7.5" (GIMA 20580)
CR-SC01	7.5" (GIMA 20581)
CR-SC01	7.5" (GIMA 20582)
CR-SC01	7.5" (GIMA 20583)
CR-SC01	7.5" (GIMA 20584)



WUXI EMSRUN TECHNOLOGY CO.,LTD
No.100 Fengbin Road,WUXI city,JIANGSU
province, China - Made in China



SUNGO Europe B.V.,
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060
Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



reinigt werden.

Halten Sie die Schere in geschlossener Stellung, wenn diese nicht verwendet wird.

Instrumente, die Anzeichen von Verschleiß aufweisen, müssen sofort beseitigt werden.

Anwendung

Die Schere während der Anwendung fest mit der Hand ergreifen, den Schneidevorgang der Bandage an der Vorderseite des Körpers des Patienten beginnen; darauf achten die Epidermis des Patienten nicht zu verletzen.

Sterilisieren: autoklavierbar bei 138°C

	An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	Gebrauchsanweisung beachten
	Erzeugniscode
	Chargennummer
	Nicht steril
	Hersteller
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen
	Medizinprodukt
	Herstellungsdatum
	Autorisierter Vertreter in der EG
	Eingeführt von

DEUTSCH

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Die Klingen der Verbandschere werden in 2Cr13 Edelstahl gefertigt, der Griff ist aus PP.

Die Klingen dieser Schere sind gefräst, zum Schneiden von Kleidung, Verbandmull und Bandagen.

Die Verbandschere eignet sich zum:

- Schneiden von Verbandmull
- Aufschneiden von schon angelegten Bandagen

Achtung

Wir weisen darauf hin, dass die Schere Verletzungen verursachen kann, wenn diese nicht mit Sorgfalt angewandt wird.

Bitte bei der Anwendung Sorgfalt und Vorsicht walten lassen.

Bewahren Sie die Schere an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen, auf.

Nach jedem Gebrauch muss die Schere sorgfältig ge-

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.