

FFP3 NR D ATEMSCHUTZMASKE DEFENCE

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Beschränkungen kann die verminderte Wirksamkeit der Maske, sowie Erkrankungen und Schäden oder den Tod verursachen.
- Eine richtig ausgewählte Maske ist unerlässlich. Vor Gebrauch muss der Anwender in der richtigen Handhabung der Maske in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften vom Arbeitsgeber geschult sein.
- Die Maske liefert keinen Sauerstoff. Sie soll nur in angemessenen belüfteten, eine zum Leben ausreichende Sauerstoffmenge einhaltenden Umgebungen verwendet werden.
- Entsorgen Sie die Maske und ersetzen Sie sie durch eine neue, wenn:
 - das Atmen wegen der übermäßigen Verstopfung der Maske schwer ist;
 - die Maske beschädigt wird.
- Verlassen Sie den belasteten Bereich, wenn Schwindel, Reizung oder andere Beschwerden auftreten.
- Lagern Sie die Masken in ihrer Spender-Verpackung, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bis zu ihrer Verwendung.
- Vor Gebrauch ist ein Fittest gemäß 29CFR 1910.134 qualitativ oder quantitativ durchzuführen.
- Bevor sie die Maske tragen, sollen die Anwender überprüfen, ob Rissen oder Flecken um die Schweißstelle anwesend sind. Bejahendenfalls muss die Maske sofort entsorgt und nicht wiederverwendet werden.
- Lagern Sie die unbenutzten Masken in ihrer geschlossenen Verpackung, in einem trockenen und nicht verunreinigten Ort, bei einer Temperatur von +5°C bis zu +38°C. Die Haltbarkeitsdauer ab Herstellungsdatum ist 3 Jahre.

BESCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

- Unter folgenden Umständen, verwenden Sie die Maske NICHT und treten oder bleiben Sie in einen/einem kontaminierten Bereich NICHT:
 - Umgebungen mit weniger als 19,5% Sauerstoff;
 - Umgebungen, worin Geruch oder Geschmack von Gefahrstoffen erfasst wird;
 - Schutz vor Gasen und Dämpfen zu bieten ist;
 - Umgebungen, worin die Gefahrstoffe oder ihre Konzentrationen unbekannt oder unmittelbar gefährlich für das Leben oder die Gesundheit sind;
 - Umgebungen mit Konzentrationen von Gefahrstoffen, die die zulässige Höchstwerte gemäß der geltenden OSHA Regeln oder der geltenden gesetzlichen Vorschriften oder 50mal die zulässige Expositionsgrenze (PEL, Permissible Exposure Limit) überschreiten, je nachdem, welcher Wert kleiner ist;
 - Sandstrahlen, Lackspritzern und Asbest;
 - Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre.
- Die Maske darf NICHT verändert oder missbräuchlich verwendet.
- Verwenden Sie die Maske NICHT, wenn Gesichtshaare oder andere Umstände einen korrekten Dichtigkeit der Maske am Gesicht verhindern.

Warnung:

Die Maske hilft, Schutz gegen einige Partikelverunreinigungen zu bieten, aber beseitigt nicht die Exposition zu Krankheiten oder Infektionen oder die Gefahr davon. Missbrauch kann Beschwerden oder den Tod verursachen.

ANLEITUNGEN ZUM TRAGEN DER MASKE

- Legen Sie die Finger auf der Innenseite der Maske. Biegen Sie den Nasenbügel um die Finger, um die Nasenform zu bilden.
- Halten Sie die Maske auf der Nase und Mund fest, mit den Kopfbändern um den Rückseite der Hand. Ziehen Sie das untere Halteband über dem Kopf bis dem Nacken.
- Ziehen Sie das obere Halteband über dem Kopf bis über die Ohren.
- Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel Ihrer Nasenform an und regeln Sie die Kopfbänder so, dass Sie eine optimale Dichtigkeit am Gesicht erhalten.

- Überprüfen Sie die Dichtigkeit
 - Um die Dichtigkeit einer Maske ohne Ausatemventil zu überprüfen, bedecken Sie die Maske mit beiden Händen und atmen Sie stark aus.
 - Um die Dichtigkeit einer Maske mit Ausatemventil zu überprüfen, bedecken Sie die Maske mit beiden Händen und atmen Sie stark ein: ein Unterdruck soll auf der Innenseite der Maske entstehen.
 - Falls Luftströmung im Nasenbereich erfasst wird, passen Sie den Nasenbügel neu an.
 - Falls Luftströmung am Maskenrand erfasst wird, passen Sie den Sitz der Maske/der Kopfbänder an, um eine bessere Dichtigkeit zu erhalten.
- Bei Atembeschwerden oder bei Beschädigung oder Verformung der Maske, ersetzen Sie sofort die Maske.
- Wenn Sie keine richtige Dichtigkeit erreichen können, ersetzen Sie die Maske.
- Die strenge Einhaltung dieser Anleitungen ist wichtig, um die sichere Benutzung der Maske zu gewährleisten.



Verzeichnis der Symbole

	Nicht steril		Gebrauchsanweisung beachten
	Hersteller		Herstellungsdatum
	Erzeugniscode		Chargennummer
	Ablaufdatum		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	Feuchtigkeitsgrenzwert		Temperaturgrenzwert
	Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden		Echipament individual de protecție conform cu regulamentul UE 2016/425

REF 20745 / VIC823V

Yangxi Venus PPE Manufacture Ltd.
N. 23 Xincheng Industrial Zone, Yangxi County,
Yangjiang City, Guangdong, Cina
Made in China

Imported by / Importato da / Importé par / Importiert von:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

0121
NB 0121
IFA
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin, Germany

