

## EINWEGKAPPE MIT BAND TOUCA DESCARTÁVEL COM ATILHOS

**DE**

**Produktname** Einwegkappe mit Band

**Produktcode** FGDCT-SM35 (21098)

**Produktmodell** Band an der Kappe, 62x14,5 cm

**Struktur und Zusammensetzung** Die Kappe besteht aus 35-40 g SMS, mit Band zur Befestigung.

**Bestimmungsgemäße Verwendung** Die Produkte werden hauptsächlich für die allgemeine Isolierung in Ambulanzen, Kliniken, Untersuchungsräumen, Reinigungsräumen, Laboren usw. verwendet. Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken bestimmt, um ein gutes Hygieneniveau aufrechtzuerhalten und zur Kontrolle des Infektionsrisikos beizutragen.

**Gegenanzeigen** Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Wenn die Verpackung beschädigt ist, ist das Produkt nass oder schimmelig. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

**Verwendung des Produkts**

- Öffnen Sie die Produktverpackung, nehmen Sie die Kappe heraus und drücken Sie die Enden der Kappe mit beiden Händen zusammen.
- Heben Sie Ihre Hand und legen Sie die Kappe auf Ihren Kopf. Passen Sie die Kappe so an, dass keine Haare herausfallen.

**Lagerung** Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80%, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.



**Warnung**

- Hierbei handelt es sich um ein Einwegprodukt; es darf nicht wiederverwendet werden.
- Hierbei handelt es sich um ein Produkt für den Einzelgebrauch, daher darf es nicht mit anderen Personen geteilt werden.
- Bei Beschädigung des Produkts oder der Verpackung ist dessen Gebrauch verboten.

**Hinweis:** Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.

**Gültigkeit** 3 Jahre.

**Produktionsdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

**Ablaufdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

	DE Erzeugniscode PT Código produto		DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar		DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco		DE Autorisierter Vertreter in der EG PT Representante autorizado na União Europeia
	DE Chargennummer PT Número de lote		DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PT Dispositivo descartável, não reutilizar
	DE Hersteller PT Fabricante		DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico		DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura		DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso
	DE Nicht steril PT Não estéril		DE Ablaufdatum PT Data de validade		DE Medizinprodukt PT Dispositivo médico		DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist PT Não use se o pacote estiver danificado
	DE Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) PT Identificador exclusivo do dispositivo						

---

## GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development  
Zone, Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China



Humiss Beratung  
GmbH Gneisenastraße 8.40477,  
Düsseldorf, Deutschland

### FGDCT-SM35

Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

