



(AT) (DE) Packungsbeilage vor der Anwendung sorgfältig lesen.



((AT) (DE) Verfügbare Größen 4 & 7 mm




(AT) (DE) Steril. Nur zum einmaligen Gebrauch.

Sind bei einem Patienten mehrere Biopsien oder die Entnahme mehrerer Proben notwendig, muss jeweils eine neue Kürette verwendet werden.

→ Wegen Infektionsgefahr nicht erneut sterilisieren und nicht wiederverwenden.


→ Verwenden Sie die Kürette nicht, wenn die Sterilverpackung beschädigt ist.

1.
(AT) (DE) Die Kürette dient zur Entfernung von Gewebe einschließlich oberflächlicher Läsionen.

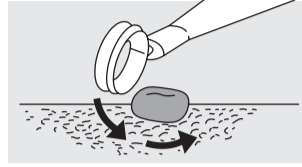


b.
(AT) (DE) Die Kürette ruhig führen, damit das Gewebestück mit einem Schnitt entfernt werden kann.

2. a.
(AT) (DE) Es werden zwei Techniken zur Anwendung der Kürette empfohlen. Wählen Sie die für die Anwendung geeignete Technik aus.

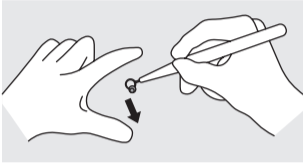

a.i.
(AT) (DE) Technik 1, die häufiger verwendet wird. Die Haut mit den Fingern der nicht-dominanten Hand spannen. Die Kürette zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger mit der scharfen Seite der Schneide an die Läsion halten.

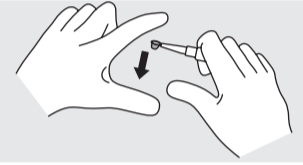

a.ii.
(AT) (DE) Technik 2 ist aufgrund der verminderten Präzision für verhärtete oder robuste Haut geeignet. Die Kürette in der distal interdigitalen Falte des Zeigefingers - unterstützt durch andere Finger der kürettierenden Hand - mit der scharfen Seite des Rings an die Läsion halten. Den Daumen auflegen, um eine stabile Basis zu ermöglichen.

3.



(AT) (DE) Sterilisiert mit Ethylenoxid durch



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.

(AT) (DE) Siehe Packung oder Karton für:



5.

(DE) GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München, GERMANY.

(AT) GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Euro Plaza, Gebäude I,

4. Stock, Wagenseilgasse 3, 1120 Wien, AUSTRIA.