



1.

**DE ⚠ Achtung!**

**Sicherheitshinweise für die Lagerung und Handhabung von Hämoglobin-Mikroküvetten**

Hämoglobin-Mikroküvetten sind ausschließlich zur Bestimmung von Hämoglobin in kapillarem und venösem Blut und für die Verwendung mit folgenden Geräten vorgesehen: Hemo\_Control, Hemo\_Control Manager, Hemo\_Vet, Hemo\_Vet Manager. Sie dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal verwendet werden.

📖 Für weitere Informationen beachten Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

Die Küvetten sind ausschließlich in der Originalverpackung bei 15°C bis 30°C zu lagern. Originalverschlossene Dosen sind bis zum aufgedruckten Haltbarkeitsdatum verwendbar. Nach dem Öffnen der Dose sind die Küvetten bei korrekter Handhabung 3 Monate unter den angegebenen Bedingungen stabil.

Nehmen Sie nur eine Küvette auf einmal aus der Dose. Verschließen Sie die Dose sofort nach Entnahme der Küvette wieder sorgfältig (**siehe Abb. 1.**). Vergewissern Sie sich, dass der Deckel der Küvettdose immer rundherum komplett verschlossen ist (**siehe Abb. 2.**).

Ist der Deckel nicht komplett verschlossen (**siehe Abb. 3.**), kann Feuchtigkeit in die Dose eindringen und die Reagenzien in der Küvette zerstören. Die Verwendung solcher Küvetten kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Verwenden Sie niemals Küvetten aus einer Dose, die nicht korrekt verschlossen war!



2.



3.