




1 Saubere Teststelle mit Isopropylalkohol und der Luft trocknen. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Sicherheit Lancet.

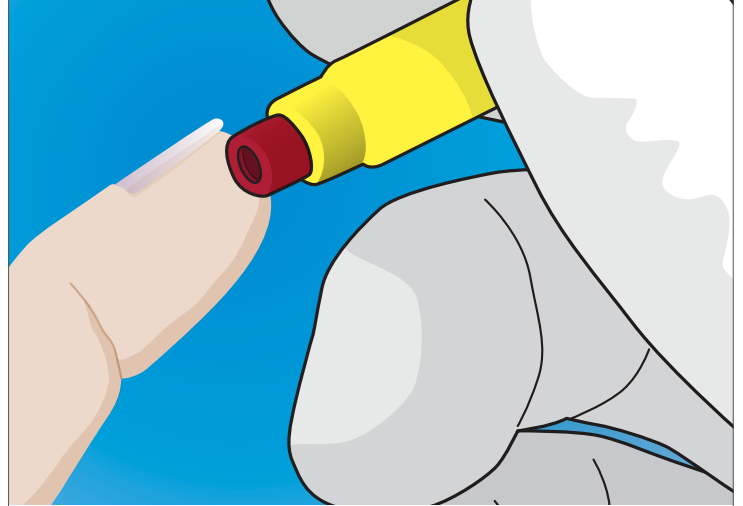

2 Ort rot Ende der Sicherheit Lancet auf dem Testgelände.

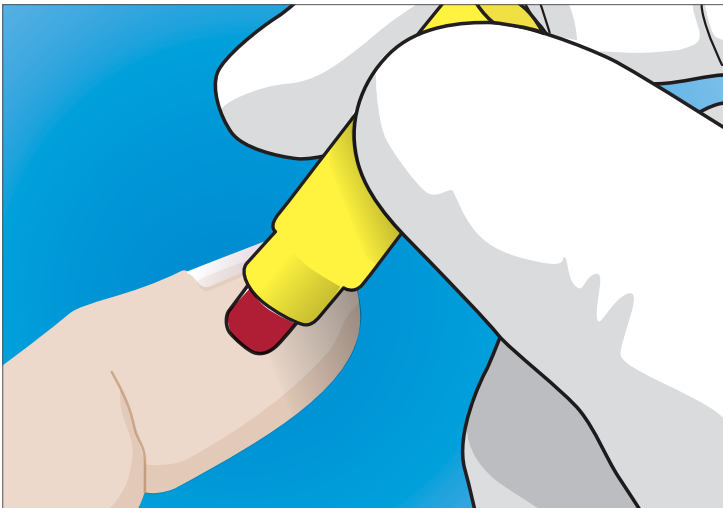

3 Drücken Sie die Sicherheit Lancet gegen Test Site zu aktivieren des Lancet Mechanismus.

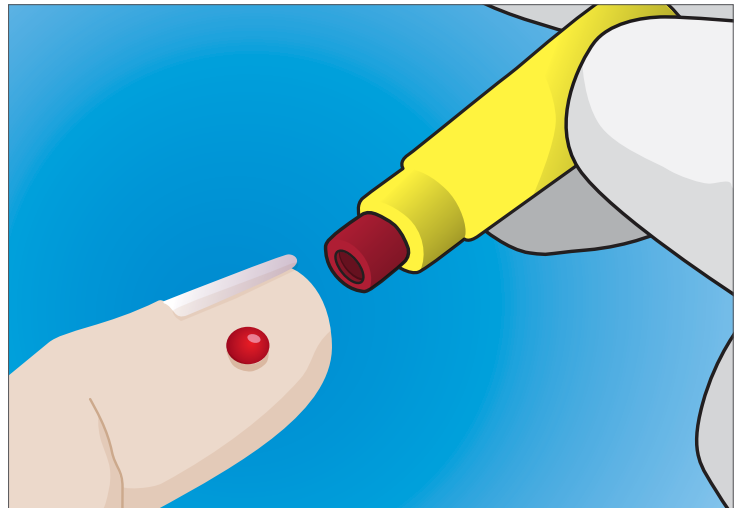

4 Einmal verwendet, werfen Lanzette in Müllbehälter.

medipurpose.com/surgilance/ifu/deutsch

MediPurpose™