




Throat Scope®

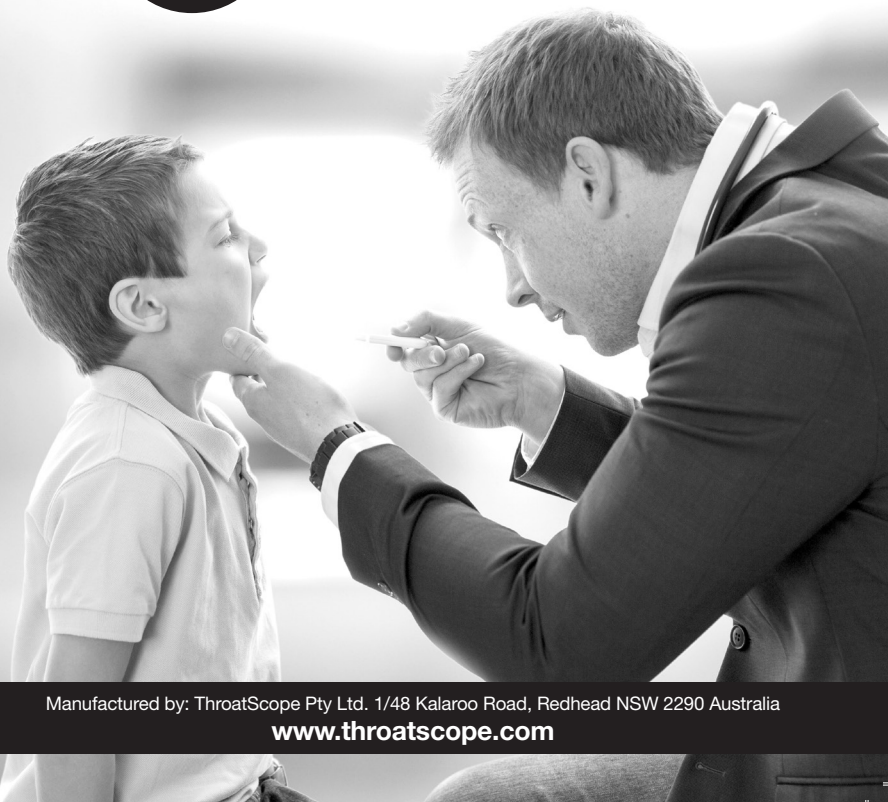

Manufactured by: ThroatScope Pty Ltd. 1/48 Kalaroo Road, Redhead NSW 2290 Australia

www.throatscope.com

Throat Scope

Einweg-Spatel für beleuchteten Zungenspatel.

Funktionen

- Lampe mit Zungenspatel, mit der Sie gleichzeitig die Zunge herunterdrücken und den Mund ausleuchten können.
- Ein schmales, leichtes Gerät
- Lampe schaltet sich automatisch ein
- Kann mit nur einer Hand bedient werden
- Die Lampe ist wiederverwendbar
- Einwegspatel
- 3 leistungsstarke LED-Lampen mit langer Laufzeit

Bedienungshinweise

Wir bedanken uns dafür, dass Sie eine 50er-Packung von Einwegspateln für beleuchtete Zungenspatel erworben haben. Bitte lesen Sie die folgenden Bedienungshinweise vor der Benutzung der Spatel sorgfältig durch. Bitte beachten: die beleuchtete Zungenspatellampe wird separat verkauft.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Die Einwegspatel sind zur einmaligen Benutzung vorgesehen. **BITTE NICHT MEHRFACH VERWENDEN.** Bitte versuchen Sie nicht, die Spatel zu reinigen oder im Geschirrspüler zu waschen. Bitte entsorgen Sie die Einwegspatel nach Gebrauch.
- Bitte reinigen Sie die Lampe nach der Benutzung mit einer 70% Isopropylalkohol-Lösung bevor Sie sie erneut benutzen, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu reduzieren.
- Nur zur oralen Anwendung. Dieses Gerät ist dazu vorgesehen, die Zunge herunterzudrücken und den Mund auszuleuchten.
- Dieses Gerät ist für die Benutzung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Falls Sie sich hinsichtlich der Benutzung dieses Geräts unsicher oder unwohl fühlen, suchen Sie bitte eine medizinische Fachkraft auf.
- Bitte verbiegen Sie die Lampe nicht, und beißen Sie nicht auf die Lampe.
- Bitte versuchen Sie nicht, die Lampe auseinanderzunehmen.
- Bitte entsorgen Sie die Lampe, wenn die Batterie leer ist.
- Bitte für unbeaufsichtigte Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gebrauchsanleitung

1. Setzen Sie den Einwegspatel in die Lampe ein. Die Lampe schaltet sich automatisch ein, wenn der Spatel eingesetzt wird.
2. Führen Sie das Gerät in die Mundhöhle ein.
3. Wenn die Untersuchung beendet ist, entfernen Sie den Spatel, indem Sie auf die Haftungsstelle drücken und den Spatel dann entsorgen. Die Lampe schaltet sich automatisch aus, sobald der Spatel entfernt wird.
4. Reinigen Sie die Lampe nach der Benutzung gründlich mit einem Reinigungstuch, das eine 70% Isopropylalkohol-Lösung enthält.

