



User instruction

Istruzioni d'uso

Notice d'istruzione

Instrucciones

Gebrauchsanleitung



Dieses Modell ist zum Schutz gegen Feinpartikel bestimmt.
Diese PSA ist für den Einmalgebrauch (Einweg-PSA) gedacht.
Nach Art. 8, Kapitel II der Richtlinie 89/686/CEE gilt diese PSA als einfache Schutzzausrüstung.
Die in den harmonisierten Normen EN 166:2001, EN 167:2001, EN 168:2001 enthaltenen Spezifikationen und angewandten Prüfmethoden zum Nachweis der Konformität mit der Richtlinie 89/686/CEE betreffen nachfolgende Klauseln:

- allgemeiner Aufbau
- transmittive Eigenschaften
- Lichtdiffusion
- Materialien
- Refraktionskraft
- Gesichtsfeld
- Beständigkeit gegen Beschlagen der Okulare
- Materialqualitäten und oberflächl. Fehler

Bezüglich der Leistungen des angewandten Modells wird auf die in der Konformitätserklärung enthaltenen Leistungen Bezug genommen.
Der Maskenfilter (falls vorhanden) zum Schutz der Atemwege garantiert den Schutz der Atemwege vor Feinpartikeln mit einem Durchmesser von bis zu 1 Micron.

Für einen korrekten Gebrauch

- Vor dem Gebrauch der PSA sind Filter und Gestell einer Sichtkontrolle zu unterziehen, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind.
- Überprüfen, ob die PSA dem vorgesehenen Verwendungszweck entspricht.
- Durch entspr. Positionierung evtl. vorhandener Einstellsysteme für einen optimalen Sitz der PSA sorgen (zu dem Zweck müssen diese Systeme möglicherweise mehrmals in Grundstellung gebracht werden).
- Den Kopf mit abwechselnd horizontalen und vertikalen Bewegungen schütteln und sicherstellen, dass sich die Einstellung durch diese Beanspruchungen nicht lockert und dass sich die PSA nicht versehentlich löst.
- Die PSA, wenn vorgesehen, immer tragen.

Für eine korrekte Lagerung

- Die PSA vor dem Gebrauch in ihrer Originalverpackung und in einer von organischen Dämpfen freien Umgebung bei einer Temperatur von einschl. +5° bis +30° C aufbewahren.
- Die PSA keinem Sonnenlicht oder UV- Lampenlicht über einen längeren Zeitraum aussetzen.
- Die PSA nicht mit chemischen Produkten, Rauch, Dämpfen oder Wärmequellen in Kontakt gelangen lassen.
- Um Transportschäden oder Manipulation zu vermeiden, sollte die Brille in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden.

Hinweise

- Keine Lösungsmittel oder organische Flüssigkeiten wie Benzin oder Alkohol verwenden.
- Die PSA nicht bei sichtbar vorhandenen Oberflächenschäden, wie Kratzer oder Einschnitte, benutzen.
- Materialien, die mit der Haut des Benutzers in Berührung kommen, können bei besonders empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Die zur Herstellung dieser PSA verwendeten Materialien gehören bekanntermaßen nicht zu dieser Kategorie.

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung beinhaltet die CE- Kennzeichnung und weist auf die Konformität mit den für diese PSA- Klasse applizierbaren essentiellen Anforderungen der Richtlinie 89/686/CEE hin.