



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCHERMO FACIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO - ANTI-FOG DISPOSABLE FACE SHIELD - ÉCRAN FACIAL ANTI-BUGÉE JETABLE - PANTALLA FACIAL DESECHABLE ANTINEBLA - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL ANTI-FOG - ANTI-BESCHLAG-EINWEG-GESICHTSSCHILD - ΑΝΤΙΟΜΙΧΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - JEDNORAZOWA OSŁONA TWARZY ANTYFOGOWA - ECRAN FACIAL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ANTI-ABURIRE - JEDNORÁZOVÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT PROTI ZAMLŽOVÁNÍ - ANSIKTSVISIR MED ANTI-IMBILDNINGSFUNKTION FR ENGÅNGSBRUK - KERTAKÄYTTÖINEN HUURTEENESTOKA-SVOSUOJA - JEDNORAZOVÝ TVÁROVÝ ŠTÍT ODOLNÝ VOČI ZAHMLIEVANIU - ANTICONDENS GELAATSSCHERM VOOR EENMALIG GEBRUIK - JEDNOKRATNI VIZIR PROTIV MAGLJENJA - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - DUGFRI ANSIGTSSKÆRM TIL ENGANGSBRUG - ЛИЦЕВ ЦИТ ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - NERASOJANTIS VIENKARTINIS APSAUGINIS VEIDO SKYDELIS - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS PRETAIZSVĪŠANAS SEJAS AIZSARGS - UDUVASTANE ŪHEKORDNE NĀOKAITSE - TÅKEHEMMENDE ANSIKTSKJERM TIL ENGANGSBRUK - درم لام عتس الل بابض لل داض م هج و عرد

DEUTSCH Beschreibung: Der Anti-Beschlag-Gesichtsschirm ist aus PET und hat eine Innenschutzfolie, eine Schaumstoffeinlage und ein Gummiband.

Indikationen für die Anwendung: Der Anti-Beschlag-Gesichtsschirm hilft das Gesicht vor potentiellen Kontaminationen durch Blutpathogene, Körperflüssigkeiten oder Spritzern von gesundheitsschädlichen Chemikalien bei der Injektion oder Behandlung zu schützen.

Anwendungseinschränkungen: Keine.

Nebenwirkungen: Dieses Produkt hat keine Nebenwirkungen.

Warnung:

1. Bei hoher Raumluftfeuchtigkeit kann die Anti-Beschlagwirkung verloren gehen.
2. Verwenden Sie den Schirm bei Schäden oder lockerem Sitz während des Gebrauchs nicht mehr.
3. Vermeiden Sie bitte während des Gebrauchs, die Mitte der Linsen zu berühren.
4. Die Materialien können, wenn sie mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei sensiblen Personen allergische Reaktionen auslösen.

Vorgehensweise:

Schritt 1: Entfernen Sie die innere Schutzfolie.

Schritt 2: Ziehen Sie das Gummiband über den Kopf, um den Schirm anzulegen.

Lagerung: Das Produkt an einem trockenen Ort, bei Temperaturen von 0-30 °C lagern.

Von Sonnenlicht fernhalten.

Erklärungen zu den Symbolen:

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

:

