
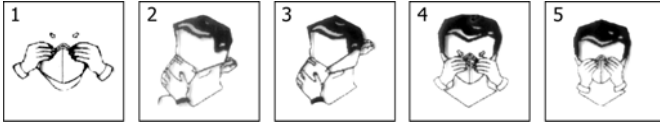


- I Semi-maschere filtranti monouso
- GB Single-use filtering half-masks
- D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken
- F Demi-masques filtrants jetables
- E Semimáscaras filtrantes desechables
- P Semi-máscaras filtrantes de utilização única
- TR Tek kullanımlı filtreli yarım yüz maskeleri
- NL Halvegeelasmafmasker met filter voor eenmalig gebruik
- S Filtrerande halvmasker för engångsbruk
- FIN Suodattavat kertakäyttöiset puoli-naamarit
- CZ Filtrační polomaska na jedno použití
- PL Maski ochronne jednorazowego użytku
- GR Ημιμάσκες διήθησης μιας χρήσης
- HR Polu-maske s filtrom za jednokratno upotrebu

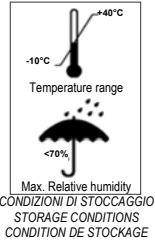

## DEUTSCH GEBRAUCHSANLEITUNG

**WICHTIG** : Die partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken werden in 3 Klassen getrennt - FFP1, FFP2 und FFP3. Vor dem Gebrauch prüfen, zu welcher Klasse die Maske nach EN149:2001+A1:2009 gehört und die Eignung mit dem Einsatzumfeld -die Klasse ist auf der Schachtel und auf der Halbmaske selbst angegeben. Das Verfallsdatum des Produkts befindet sich auf der Packung desselben.

**ANWENDUNGEN** : Schutz vor dem Einatmen von Partikeln und wässrigen/ölgigen Aerosolen



Vor dem Gebrauch die Unversehrtheit der Maske prüfen. Bei Rissen bzw. Flecken eine Ersatzmaske verlangen.

Die Angabe NR in der Markierung weist darauf hin, dass die Maske nicht wieder benutzt werden kann und am Ende der Arbeitsschicht entsorgt werden muss.

Die Markierung D zeigt an, dass die Masken die Dolomitsaustaubprüfung bestanden haben.

Der Schutz, der von einer partikelfiltrierenden Halbmaske FFP3 oder FFP2 geboten wird, umfasst den Schutz der Klasse FFP1.

### ANLEITUNGEN ZUM ANPASSEN DER GESICHTSMASKE:

1. Einen Finger in die Maske schieben. Das Nasenstück um den Finger formen, um dieses der Nase anzupassen.
2. Die Maske in der Hand halten und das untere Gummiband über den Kopf hinter den Nacken ziehen und unterhalb der Ohren anlegen.
3. Das obere Gummiband nehmen und oben auf dem Kopf, oberhalb der Ohren anlegen.
4. Mit beiden Händen den ggf. an der Nase vorhandenen Clip formen und die Spannung des Oberteils und des Unterteils des Gummis mit den entsprechenden Schlaufen einstellen, wenn vorhanden, damit die Maske gut auf dem Gesicht anliegt.
5. (a) Test des richtigen Anlegens der Maske ohne Ventil: Legen Sie die Hände auf die Maske wie in Abb. 5 zu sehen und atmen Sie kräftig aus. (b) Test des richtigen Anlegens der Maske mit Ventil: Legen Sie die Hände auf die Maske wie in Abb. 5 zu sehen und atmen Sie kräftig ein. Wenn die Luft aus den Maskenrändern austritt oder innerhalb derselben von den Rändern einströmt, dann legen Sie die Halbmaske erneut auf dem Gesicht an und ziehen Sie bei Bedarf den Gummi, wenn dieser mit Schlaufen/Zugstücken versehen ist.
6. Die Maske sofort auswechseln, wenn Sie Atemschwierigkeiten haben oder die Maske beschädigt wird oder nicht gut am Gesicht anliegt. Das Befolgen dieser Anweisungen ist wesentlich für einen sicheren Gebrauch des Atemgeräts.

### HINWEISE : [PSA – Persönliche Schutzausrüstung]

Falls es nicht möglich sein sollte, die Maske dem Gesichtsprüfprofil anzupassen, betreten Sie keine Räume mit potentiellern Risiko.

Die Nichtbeachtung der in diesem Hinweis enthaltenen Vorschriften kann zu falschem Gebrauch der PSA führen und Krankheiten und Tod verursachen.

Ein angemessen gewähltes Atemgerät ist grundlegend für den Schutz Ihrer Gesundheit. Vor dem Gebrauch der PSA konsultieren Sie eine in Industriehygiene Person oder Experten in Berufsschutz, um die Gebrauchssignung zu bestimmen.

Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nur in angemessen belüfteten Räumen mit zum Überleben ausreichendem Sauerstoffgehalt benutzen. Die Grenzwerte bzgl. der Sauerstoffpräsenz in einem bestimmten Umfeld für den Gebrauch dieser Masken können von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie die für die Einsatzland geltenden Eckwerte. Eleco s.r.l. rät in jedem Fall von dem Gebrauch in Räumen ab, deren Sauerstoffkonzentration unter 19,5% liegt / Nicht benutzen wenn die Schadstoffkonzentrationen gesundheits- oder lebensgefährlich sind. / Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden. / Den Arbeitsbereich sofort verlassen, wenn (a) das Atmen schwer fällt oder (b) wenn Sie Angstgefühle oder Schwindel verspüren. / Barthaare und Atemwegserkrankungen können die Wirksamkeit dieser filternden Halbmasken verringern. / Die filtrierende Halbmaske auf keinen Fall verändern oder manipulieren. / Einweggebrauch. Wartungsfrei. / Die Halbmaske nach jedem einzelnen Gebrauch entsorgen. / Die noch nicht benutzten Halbmasken in ihrer unversehrten Verpackung vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. – Die Identifikationsnummer des Modell ist auf der Packung des Produkts zu finden.