

BIOSAFE VENTIL

DE

INDIKATION:

Das Biosafe Ventil ist eine Vorrichtung für die nadellose Entnahme und Infusion von Flüssigkeiten.

Das Ventil ist mit folgenden Medizinprodukten vereinbar, die über männliche Luer-Lock-Anschlüsse verfügen: Infusionsbestecke,

Verlängerungsschläuche, Spritzen/vorgefüllte Spritzen, Zentralvenöse Katheter, Hahnbanke, Hähne.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Die Packung von der Aufreißstelle aus öffnen und die Schutzkappe entfernen (Abb. 1).

2. Den weiblichen Luer-Lock-Anschluss von Katheter oder Verlängerungsschlauch mit dem männlichen Luer-Lock-Anschluss von Biosafe verbinden (Abb. 2).

3. Zur Sicherheit das Silikon Siegel am weiblichen LL des Biosafe reinigen; dabei ist darauf zu achten, dass die Vorrichtung nicht kontaminiert wird.

4. Die männlichen Anschlussstücke von Infusionsbesteck oder Spritze am Biosafe anschließen, indem die Vorrichtung zunächst eingeschoben und dann bis zum Anschlag gedreht wird. Die beiden Vorrichtungen dabei gerade ausgerichtet halten. Keine Nadeln verwenden.

5. Zum Abtrennen das Infusionsbesteck oder die Spritze in entgegengesetzter Richtung drehen, bis sie sich lösen. Das Biosafe Ventil nicht vom Katheter des Patienten oder dem Infusionsbesteck entfernen (Abb. 3).

6. Zur Gewährleistung besserer aseptischer Technik das Biosafe Ventil nach jeder Verwendung mit nichtalkoholischer Lösung desinfizieren.




Das Biosafe Ventil ist ein geschlossenes System, das keine Schutzkappe benötigt.

Das Produkt ist steril und pyrogenfrei.

HINWEISE:

- Aseptische Technik anwenden.
- Keine Nadeln verwenden.
- Nur bei unversehrter Verpackung verwenden.
- Die Sterilität ist nur bei unversehrter Verpackung garantiert.
- Diese Vorrichtung ist für die einmalige Anwendung an einem einzigen Patienten bestimmt und ist sofort danach zu verwerfen. Eine Wiederverwendung ist nicht vorgesehen, da die Vorrichtung beim Gebrauch ihre Sterilität verliert. Das Risiko bei einer Wiederverwendung besteht in einer Kontamination der Vorrichtung, die zu Infektionen des Patienten führen und dessen Erkrankung oder Tod verursachen kann.

ARIES betont die Wichtigkeit korrekter Anwendung der Vorrichtung durch befugtes medizinisches Personal unter Einhaltung der Gebrauchsanleitung, um Verletzungen für Patienten oder Benutzer/Bediener zu vermeiden.

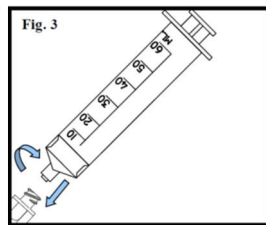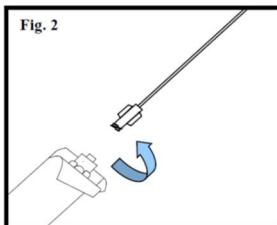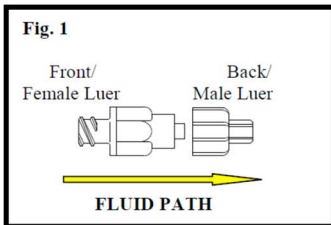

- REF** = Catalogue number
- LOT** = Batch code
- = Use-by date
- = Manufacturer

- STERILE EO** = Sterilized using Ethylene Oxide
- = Disposable device. Do not re-use
- = This device does not contain latex
- = Read instruction for use carefully

- = Date of manufacture
- = Keep between 0+40 °C
- = Fragile
- = Keep dry
- = Keep away from sunlight
- = High