

Geräteausführungen

7830.01.001 ohne Längenmesser
7831.01.001 mit Längenmesser

Technische Daten

Die Daten zur Spannungsversorgung sind auf dem Steckernetzteil vermerkt.

Arbeitstemperatur: 5 - 35°C
Lagertemperatur: -20 - 65°C
Wägebereich: 220 kg
Zifferschritt: 100 g

Hinweis

Unter extremen elektrostatischen sowie elektromagnetischen Einflüssen z.B. beim Betreiben eines Funkgerätes oder Handys in unmittelbarer Nähe des Gerätes kann eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß benutzbar, ggfs. ist ein Wiedereinschalten erforderlich.

Ebenso können Luftzug, Vibrationen, schnelle Temperaturänderungen und Sonneneinstrahlung, zur Beeinflussung des Wägeergebnisses führen. Die Waage entspricht der Schutzart IP 20. Deshalb sind hohe Luftfeuchtigkeit, Dämpfe, Flüssigkeiten und starke Verschmutzung zu vermeiden. Die messtechnischen Komponenten werden dadurch beschädigt und Sie verlieren Ihren Gewährleistungsanspruch.

Dieses Gerät ist funktentstört entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 2004/108/EG.

Wartung und Service

Die Waage bedarf keiner routinemäßigen Wartung. Es ist jedoch sinnvoll die Genauigkeit in periodischen Abständen zu kontrollieren. Die Häufigkeit hängt von Einsatz und dem Zustand der Waage ab. Bei festgestellten Abweichungen kontaktieren sie bitte Ihren Händler oder den Soehnle Professional-Kundendienst.

Reinigung

Zum Reinigen genügt ein feuchtes Tuch und handelsübliche Reinigungsmittel. Keine scheuernden Mittel verwenden.

Entsorgung

Die Stativwaage enthält nach dem derzeitigen Wissensstand keine umweltgefährdenden Stoffe.

Gewährleistung/Haftung

Soweit ein von Soehnle Professional zu vertretender Mangel der gelieferten Sache vorliegt, ist Soehnle Professional berechtigt, wahlweise den Mangel entweder zu beseitigen oder Ersatz zu liefern. Ersetzte Teile werden Eigentum von Soehnle Professional. Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die Rechnung als Nachweis auf. Im Servicefall kontaktieren sie bitte Ihren Händler oder den Soehnle Professional-Kundendienst.

Keine Gewähr wird insbesondere übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen entstehen:

Ungeeignete, unsachgemäße Lagerung oder Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder durch Dritte, natürliche Abnutzung, Veränderung oder Eingriffe, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, insbesondere übermäßige Beanspruchung, chemische, elektrochemische, elektrische Einflüsse oder Feuchtigkeit, sofern diese nicht auf ein Verschulden von Soehnle Professional zurückzuführen sind.

Sollten betriebliche, klimatische oder sonstige Einflüsse zu einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse oder des Materialzustandes führen, entfällt die Gewährleistung für die einwandfreie Gesamtfunktion der Geräte. Soweit Soehnle Professional im Einzelfall Garantie gibt, bedeutet dies die Freiheit von Mängeln am Liefergegenstand in der Garantiezeit.

Originalverpackung für einen eventuellen Rücktransport aufbewahren.


Inbetriebnahme

Das Kabel des Steckernetzteils an der Rückseite der Plattform einstecken um die Waage mit Strom zu versorgen.

Wiegen

Einfach auf die Waage stehen (kein Einschalten oder Antippen notwendig).

Längenmessung mit BMI-Anzeige

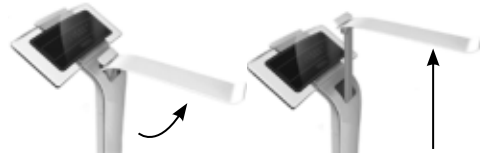

Längenmesser vorsichtig hochklappen und nach oben schieben. Dann das Kopfteil auf den Kopf des Patienten legen. In der Anzeige erscheint die Größe in cm und danach automatisch der Body-Mass-Index.

Tarieren

Mit der Funktionstaste an der Rückseite der Anzeige kann die Waage tariert werden. Taste drücken, in der Anzeige erscheint »0,0 kg« und die Waage ist wiegebereit.

Mutter-/Kind-Funktion

- Eine erwachsene Person stellt sich auf die Waage.
 - > Anzeige z.B. »47,6 kg«
- Drücken Sie die Funktionstaste.
 - > Anzeige geht auf »0,0 kg«
- Die Mutter kann von der Waage gehen...
 - > Anzeige »-47,6 kg«
- ... und sich zusammen mit dem Kind noch mal auf die Waage stellen.
 - > Sie erhalten das Gewicht des Kindes z.B. »5,1 kg«

Wenn beide die Waage wieder verlassen zeigt die Anzeige im Beispiel »-47,6 kg«. Mit der Funktionstaste können Sie die Waage wieder auf »0,0 kg« stellen.

Die Waage geht nicht automatisch auf »0,0 kg« damit mehrere Trierungen hintereinander durchgeführt werden können.

Ausschalten

Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn die Anzeige ca. 15 Sekunden auf »0,0 kg« steht.

Einheitenumschaltung

Standardmäßig ist die Einheit kg eingestellt. Wenn Sie die Waage in eine andere Einheit umschalten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Netzstecker ziehen.
- Funktionstaste drücken, gedrückt halten und gleichzeitig den Netzstecker einstecken.
- Anzeige wechselt auf lb.

Um die Anzeige wieder auf kg umzustellen wiederholen Sie bitte den oben beschriebenen Vorgang.

Fehlermeldungen

- Err 5** Nullstellen
 - kein Stillstand > Ruhig stehen
- Err 6** Trieren
 - kein Stillstand > Ruhig stehen
 - negativer Gewichtswert
 - > Stromzufuhr kurz unterbrechen
- Überlast, Gewicht ist über dem Maximalgewicht**
 - > Gewicht von der Plattform nehmen
- Unterlast**
 - > Service kontaktieren
- Beim Einschalten stellt die Waage nicht auf Null**
 - > Waage entlasten > Neustart > Service kontaktieren
- Längenmesser nicht in Referenzposition beim Einschalten**
 - > Längenmesser beim Einschalten ganz einklappen und einschieben

