



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
مقياس طول حائطي التثبيت**

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

M27335-M-Rev.10-01-22

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476




MERKMALE

Das GIMA Wandbefestigtes Rollmessband (Prod.-Nr. 27335) ist ein Instrument, das der Größenmessung von Personen dient. Es lässt sich an der Wand befestigen und hat einen Messbereich von bis zu 2 m. Es spart Platz und ermöglicht das schnelle Ablesen der Messwerte.

VERWENDUNGSHINWEISE

 Ziehen Sie den Kopfanschlag nicht ruckartig nach unten. Andernfalls kann das daran befestigte Messband reißen.

Das Produkt darf nur von qualifiziertem Personal verwendet werden.

 Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall weiter. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler. Führen Sie selbst keine Reparaturen durch, welche die Gerätesicherheit beeinträchtigen könnten. Für Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, die gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck anzubringen sind.

Das Produkt besteht aus korrosionsbeständigen Materialien und eignet sich für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen, die für eine normale Nutzung vorgesehen sind. Eine besondere Pflege ist nicht erforderlich. Das Gerät muss jedoch an einem abgeschlossenen Ort aufbewahrt werden, wo es vor Staub und Verschmutzung geschützt ist, damit es in einem hygienischen Zustand bleibt. Darüber hinaus empfehlen wir, das Produkt an einem Ort aufzubewahren, an dem es bei Bedarf schnell zur Hand ist.

AUSPACKEN

 Seien Sie beim Auspacken immer vorsichtig, da Verpackungsmaterial (Papier, Zellophan, Klammern, Klebeband usw.) zu (Schnitt-)Verletzungen führen kann, wenn unvorsichtig damit umgegangen wird.

Das Verpackungsmaterial ist mit geeigneten Mitteln zu entfernen und darf nicht in die Hände von aufsichtsbedürftigen Personen gelangen. Gleiches gilt für Werkzeuge zum Entfernen von Verpackungsmaterial (Schere, Messer usw.).

Kontrollieren Sie nach dem Öffnen zunächst alle Produktbestandteile. Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und die Produktbestandteile auf ihren einwandfreien Zustand.

MONTIEREN


Zur Montage des Wandbefestigten Rollmessband muss sich der Kopfanschlag an der Wand auf einer Höhe von genau 2 m über dem Boden befinden. Die Rückplatte ist dann mit den Schrauben an der Wand zu befestigen. Anschließend ist das Wandbefestigte Rollmessband einsatzbereit.

MESSEN

Um eine Messung durchzuführen, ziehen Sie den Kopfanschlag einfach mit einer Hand nach unten, bis er den Kopf der zu messenden Person berührt. Anschließend können Sie den Messwert an der roten Linie im Sichtfenster ablesen.









WARTUNG

Bei der Konstruktion des Produkts wurde Wert auf eine lange Haltbarkeit gelegt. Wir empfehlen, das Instrument mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.

 Reinigen Sie das Messband von Zeit zu Zeit mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Tuch. Achten Sie dabei besonders auf den Kopfanschlag.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

 REF	Erzeugniscode	 LOT	Chargennummer
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Gebrauchsanweisung beachten		Hersteller
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE