



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MISURATORE CORPOREO

BODY METER

RUBAN PÉRIMÉTRIQUE

MEDIDOR CORPORAL

KÖRPERFETTMESSGERÄT

MEDIDOR CORPORAL

Μεζούρα Σώματος

مِسْجَلَا سَايَقَام

REF

27347 - 27350

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/
Eingeführt von/Εισαγωγή από/مِسْجَلَا سَايَقَام:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China




Band zur Beurteilung der Verteilung des Fettgewebes. ABS-Körper mit ergonomischem Griff. Das Band besteht aus einem speziellen, nicht verformbaren Kunststoffmaterial mit einer zweifarbigen Bewertungsskala zur Angabe des geteilten Risikos für Mann und Frau.

Es kann an allen Körperumfängen verwendet werden, dank seines versenkbaren Knopfes und des flexiblen Anschlags, der ein einfacheres Ablesen der Daten ermöglicht.

Die besondere Flexibilität seines Arms aus ungiftigem thermoplastischem Material ermöglicht den Einsatz speziell im pädiatrischen Bereich

Position des Maßbandes, für eine korrekte Messung des Bauchumfangs

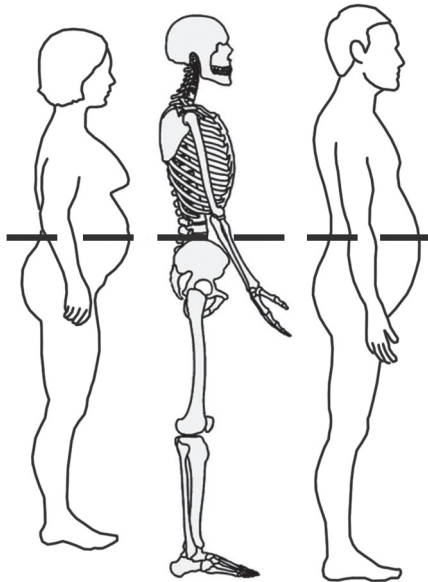

Person in aufrechter Position.

Lokalisieren Sie die Oberkante der Hüfte und die Spitze des rechten Beckenkamms.

Legen Sie das horizontale Band um den Bauch auf Höhe des Randes des Beckenkamms.

Stellen Sie vor der Messung sicher, dass das Maßband eng anliegt, aber die Haut nicht zusammendrückt und parallel zum Boden verläuft.

Nehmen Sie die Messung am Ende einer normalen Ausatmung vor.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.