

BETTITISCH - Danke, dass Sie sich für den Bettisch - L100 entschieden haben.

1 Allgemeines

1.1 Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden Signalwörter verwendet, um auf Gefährdungen oder unsichere Handhabungen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können, aufmerksam zu machen. Siehe die unten stehenden Erklärungen der Signalwörter.

⚠️ Warnung - Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

❗ Wichtig - Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ℹ️ Liefert nützliche Tipps, Empfehlungen und Informationen für einen effizienten, problemlosen Gebrauch.

1.2 Sicherheit

❗ KONTROLLIEREN SIE ALLE Teile auf Transportschäden. Wenn Sie Transportschäden feststellen, **GEBRAUCHEN SIE** das Produkt **NICHT**. Lassen Sie sich vom Transport-unternehmen oder Händler weitere Anweisungen, was in dem Fall zu tun ist, geben.

❗ Gewichtsbegrenzungen

Die horizontale und vertikale statische Belastungsgrenze des L100 ist 25 kg (55 Pfund).

⚠️ Allgemeine Warnhinweise

BENUTZEN SIE dieses Produkt oder jede weitere optionale Ausrüstung **NICHT**, ohne vorher diese Anleitungen und jedes zusätzliche Informationsmaterial wie Betriebsanleitungen, Wartungsanleitungen und Montageanleitungen vollständig durchgelesen und verstanden zu haben. Wenn Sie die Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen oder Anleitungen nicht verstehen können, wenden Sie sich an jemanden, der einen Gesundheitsberuf oder einen technischen Beruf ausübt, oder Händler, bevor Sie versuchen, die Ausrüstung zu gebrauchen - ansonsten könnten Sie sich oder andere verletzen oder Sachschäden verursachen. Prüfen Sie **IMMER**, dass der Bettisch stabil und sicher montiert ist, bevor Sie ihn benutzen. Technische Verbesserungen an den Produkten werden ohne Ankündigung in einer neuen Version der Bedienungsanleitung aufgenommen. Die Abbildungen dienen nur der Illustration und können sich in Farbe und Aussehen von Ihrem Produkt unterscheiden.

⚠️ Warnhinweise zum Zubehör

IDEAL Produkte sind speziell für den Gebrauch in Verbindung mit **IDEAL** Zubehörteilen gestaltet und gefertigt. Zubehör von anderen Herstellern wurden nicht getestet und werden nicht für den Gebrauch mit **IDEAL** Produkten empfohlen.


⚠️ Warnhinweise zur Montage

Gehen Sie beim Montieren des Ständers **IMMER** extrem vorsichtig vor, weil er eine Rohrstanze mit Spitze am Ende hat. Bitte berühren Sie die Spitze nicht während der Montage, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Prüfen Sie nach Anpassungen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten und vor dem Gebrauch nach, dass alle Bauteile festsitzen.

1.3 Vorgesehene Verwendung

Der Bettisch ist ein Möbelstück, das als bewegliche Tischplatte zum Lesen, Essen oder zur Aufbewahrung von kleinen persönlichen Gegenständen wie Brillen, Telefon oder Büchern in Reichweite dient.

2 Teile (Versand-) Liste

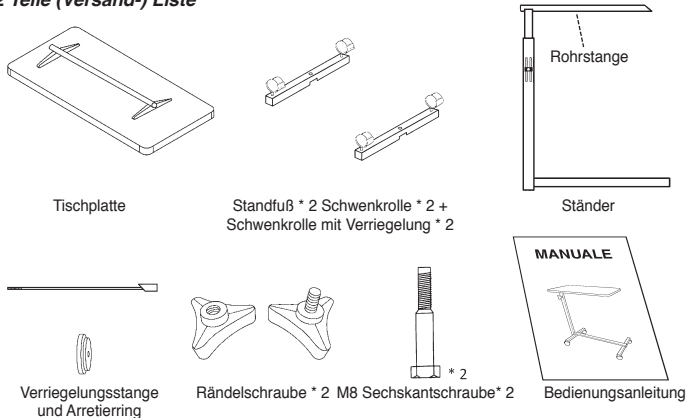

3 Montage des Bettischs (ℹ️ Siehe ABBILDUNG 1)

- 1) Öffnen Sie den Karton und ziehen Sie den Inhalt aus dem Karton.
- 2) Ordnen Sie vor sich die Standfüße, Tischplatte, den Ständer, Schrauben und Bedienungsanleitung an.
- 3) Setzen Sie den Ständer auf die Standfüße und schrauben Sie die Standfüße einen nach dem anderen mit der M8 Sechskantschraube mit einem 13er Schlüssel fest.
- 4) Schieben Sie die Verriegelungsstange in die waagerechte Rohrstanze des Ständers und setzen den Arretiering auf das andere Ende, auf dem dann die Rändelschraube montiert wird. Zum Schluss schieben Sie die Rohrstanze in das Rohrstück der Tischplatte und ziehen Sie die Rändelschraube ganz fest.
- 5) Stellen Sie jetzt die Tischhöhe an der Rändelschraube für die Höheneinstellung auf eine bequeme Höhe für den Benutzer und schrauben Sie die Rändelschraube fest.
- 6) Prüfen Sie die Verriegelung der Schwenkrolle, lösen Sie sie, um den Tisch zu bewegen und verriegeln Sie sie am Aufstellort.

❗ Seien Sie vorsichtig und achten Sie bei der Montage darauf, NICHT die Spitze am Ende der Rohrstanze zu berühren.

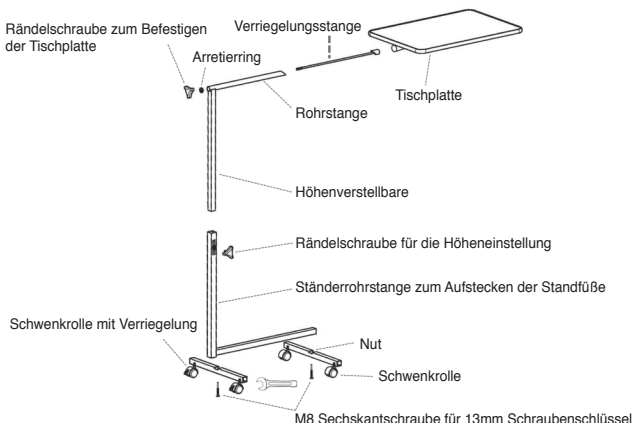


ABBILDUNG 1 Montage des Bettischs

3.1 Der Bettisch besteht hauptsächlich aus den folgenden Materialien:

- Mitteldichte Faserplatte (Tischplatte)
- Stahlrohr (Tischrahmen)
- Befestigungsmittel (Schraube, Mutter, Knopf)
- Kunststoff (Rohrstopfen, Laufrolle)

4 Gebrauch des Bettischs (ℹ️ Siehe ABBILDUNG 2)

- 1) Lösen Sie die Rändelschraube zum Einstellen der Höhe, stellen Sie die Tischhöhe ein und schrauben Sie die Rändelschraube wieder fest.
- 2) Lösen Sie die Rändelschraube, um die Tischplatte auf die gewünschte Höhe oder zurück in die ursprüngliche /niedrigste Höhe zu schieben, dann die Rändelschraube wieder festdrehen.

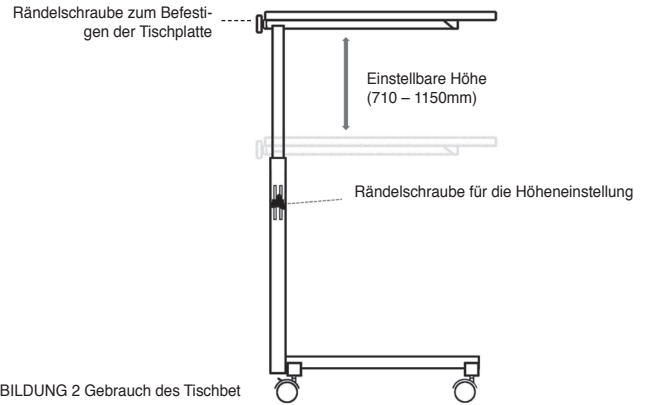


ABBILDUNG 2 Gebrauch des Tischbet

❗ Der Tisch ist für den Gebrauch als mobile Tischplatte für Patienten/Bettlägerige zum Lesen, Essen oder Aufbewahren kleiner persönlicher Gegenstände wie Gläser, Telefon oder Bücher in Reichweite entworfen worden.

Dieser Tisch ist **AUSSCHLIESSLICH** für den Gebrauch in Innenräumen in der Nähe ausgebildeten Pflegepersonals entworfen worden. Es dürfen keine elektrischen Gegenstände (wie Fernseher, Computermonitore, Kaffeemaschinen usw.) auf den Bettisch abgestellt werden und der Tisch sollte nicht in der Nähe von offenen Flammen oder starker Hitze benutzt werden.

Das maximale zulässige Gewicht für dieses Produkt ist 25 kg (55 Pfund); das Gewicht der Gegenstände auf der Platte sollte gut verteilt sein, damit der Tisch stabil bleibt. Beladen Sie den Tisch **NICHT** mit mehr als das maximal zulässige Gewicht, da er brechen könnte und es zu Sachschäden und/oder Verletzungen kommen kann.

Gebrauchen Sie ihn **NUR** für seinen Bestimmungszweck. Dieses Produkt darf **NICHT** benutzt werden: Als Schlaffläche, als Gehhilfe, zum Abstützen beim Hinsetzen oder Aufstehen, um Stürze zu verhindern oder aufzufangen, oder zum Transportieren von Personen oder Gegenständen.

5 Abmessungen (Maßeinheit: mm) (ℹ️ Siehe ABBILDUNG 3)

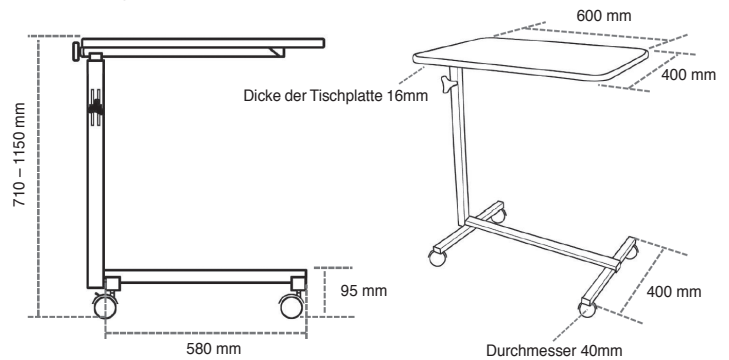


ABBILDUNG 3 Abmessungen

6 Parametri

Parameter Name	L100		
Gesamtlänge	640 mm	Max. zulässige vertikale statische Belastung	25 kg
Gesamtbreite	406 mm	Horizontale Beständigkeit	10 kg
Gesamthöhe (Tischplatte auf niedrigster Höhe)	710 mm	Vertikaler Druck	10 kg
Max. zulässige horizontale statische Belastung	25 kg	Nettogewicht	6,9 kg
		Bruttogewicht	8,2 kg
		Velikost škatle	650 x 64 x 670 mm

7 Reinigung

Eine regelmäßige Pflege und Wartung verhindert unnötigen Verschleiß und Schäden an Ihrem Bettisch.

7.1 Metalloberflächen

Obwohl der Metallrahmen mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen ist, um seine Oberfläche zu schützen, ist es für die normale Reinigung besser, ein trockenes und weiches Tuch oder einen Schwamm zu verwenden.

7.2 Kunststoffe

Zur normalen Reinigung Kunststoffoberflächen mit einem weichen Tuch, mildem Reinigungsmittel und Wasser abwaschen. Gründlich abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernde Küchenreiniger.

7.3 Tischplatte

Wischen Sie den Tisch vorsichtig mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Tisches beschädigen könnten. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie milde Seife und etwas Wasser und wischen Sie das Wasser so schnell wie möglich auf, damit die Tischplatte trocken bleibt.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

GIMA 27448

Eingeführt von:
Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
 Made in China

Hergestellt von:
Suzhou Ideal Medical Co., Ltd.
 No. 88 Huachi Street,
 Suzhou Industrial Park,
 Suzhou (215000), Jiangsu, China

