

# *F3S2000 e F2S700*



<b>MANUALE DI UTILIZZO</b>	<b>3</b>
<b>USER MANUAL</b>	<b>11</b>
<b>MANUAL DE USO</b>	<b>19</b>
<b>NOTICE D'UTILISATION</b>	<b>27</b>
<b>BENUTZERHANDBUCH</b>	<b>35</b>

## BENUTZERHANDBUCH

---

*MNPG365-00 Ausgabe 25/08/2021*

# *F3S2000 und F2S700 Bandapplikatoren mit Magnetspulen*

*I.A.C.E.R. Srl*

*[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)*

### **Erhöhung**

Der **F3S2000** und der **F2S700** sind drei bzw. zwei Magnetfeldapplikatoren für die Niederfrequenz-Magnetfeldtherapie.

Sie lassen sich dank des Therapie-Gummibandes leicht an jede Körperstelle anpassen.

Die Produkte werden gemäß Regel 1 (4.1) in Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte der Klasse I zugeordnet.

Basis-UDI-DI: 8019781PEMFLFFASNS

F3S2000 UDI-DI: (01)08019781472052

F2S700 UDI-DI: (01)08019781472212

## Technische Informationen

### **Technische Merkmale:**

- Abmessungen des Applikators: 38x9 cm + 60 cm Gummiband;
- Kabellänge: 158 cm;
- 3 Magnetspulen oder 2 Magnetspulen;
- 1 Anschlusskabel;
- Das Modell F3S2000 ist mit den Modellen MAG2000 und LaMagneto kompatibel.
- Modell F2S700 nur kompatibel mit Modell MAG700

## Kennzeichnung



Etikett 1 / Label 1

**Etikett 1 - Label 1**

**Modell F3S2000**



**Modell F2S700**





**Kabel-Etikett:**

**Modello / Model: F3S2000**





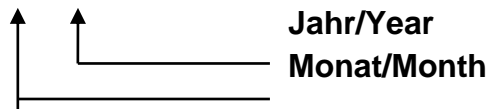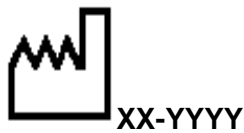

**Modello / Model: F2S700**



**Symbole**

Symbol	Bedeutung
	Logo des Herstellers.
	Im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2017/745
	Hersteller-Daten.
	Herstellungsdatum (MM-JJJJ).
	Medizinprodukt.
	Befolgen Sie die Bedienungsanleitung.

Symbol	Bedeutung
	WEEE-Richtlinie für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
	Anwendungsteil Typ BF.
	Zulässige Lagerungstemperaturen (auf Verpackung).
	Relative Feuchtigkeit Lagerung (auf Verpackung).

### Transport und Lagern

Beim Transport ist keine besondere Vorsicht geboten. Bei der Lagerung ist das Gerät bis zu den folgenden Umgebungsbedingungen geschützt:

Umgebungstemperatur +5 bis 40 °C

Relative Feuchtigkeit 15 bis 93 %

### Verwendungsweise

#### **Gebrauchsanweisungen für F3S2000 und F2S700**

Befolgen Sie die Anweisungen in der Ihrem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung.

Beachten Sie die Warnhinweise in den Bedienungsanleitungen der Produkte der der Serien MAG700, MAG2000 oder LaMagneto.


### Pflege des F3S2000

#### **Reinigung des F3S2000 und F2S700**

Für die Reinigung des F3S2000 und F2S700 wird empfohlen, den 3/2-Magnetspulen-Applikator zuvor vom Gerät zu trennen. Reinigen Sie den Stoff mit einem mit milder Seife und Wasser angefeuchteten Tuch und warten Sie, bis er vollständig getrocknet ist, bevor Sie den Drei-Magnetspulen-Applikator erneut für eine Therapiesitzung verwenden.

### **Information zur Entsorgung**



Das Produkt unterliegt den WEEE-Bestimmungen (Symbol  auf dem Etikett) in Bezug auf Mülltrennung: Bitte entsorgen Sie das Produkt bei speziellen Sammelstellen für elektronisches Material, indem Sie sich an die zuständigen Behörden in Ihrem Land oder direkt an den Hersteller wenden.

### **Wartung und Kundendienst**

Das Gerät erfordert keine besondere Routinewartung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um die Funktionsfähigkeit des Geräts alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Der Hersteller ist der einzige Anbieter von technischem Support für den Applikator F3S2000. Für technischen Support wenden Sie sich bitte an

**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE)

Tel. +39 041 5401356 • Fax +39 041 5402684

### **Garantie**

Für den F3S2000 gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt bei Manipulationen, mangelnder Sorgfalt oder unsachgemäßem Gebrauch des Applikators sowie bei Eingriffen am Applikator durch nicht vom Hersteller oder Vertragshändler autorisiertes Personal.





## I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it) - PEC: [iacer@pec.it](mailto:iacer@pec.it) - Web: [www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)

