

BENUTZERHANDBUCH

MNPG373-04 Ausgabe 30/06/2023

TAP2000

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Erklärung

Der **TAP2000** ist ein 6-Magnetspulen-Applikator für die Niederfrequenz-Magnettherapie. Er dient zur Behandlung des Wirbelsäulenbereichs durch Auflegen auf die Rückenlehne eines Stuhls oder Sessels.

Das Produkt wird gemäß Regel 1 (4.1) in Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte der Klasse I zugeordnet.

Basis-UDI-DI: 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI: 08019781472090

Technische Informationen

Technische Merkmale:

- Abmessungen des Applikators: 40x40cm;
- 6 Magnetspulen;
- 2 Anschlusskabel;
- Kompatibel mit den Modellen MAG2000 und LaMagneto.





Kennzeichnung

Etikett 1
(Auf der Rückseite des Geräts)

Etikett 1





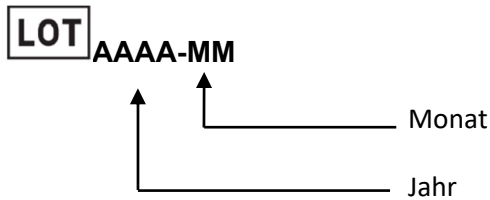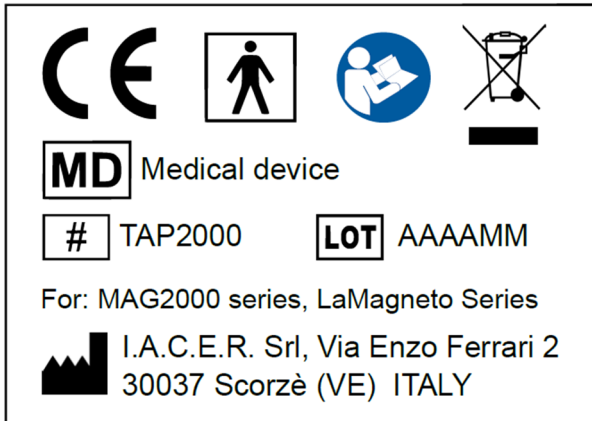




Kabel-Etikett



Symbole

Symbol	Bedeutung
	Logo des Herstellers.
	Im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2017/745
	Hersteller-Daten
	Chargennummer (AAAA-MM)

Symbol	Bedeutung
	Medizinprodukt
	Modell
	Befolgen Sie die Bedienungsanleitung
	WEEE-Richtlinie für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
	Anwendungsteil Typ BF
	Zulässige Lagerungstemperaturen (auf Verpackung)
	Relative Feuchtigkeit Lagerung (auf Verpackung)

Transport und Lagern

Beim Transport ist keine besondere Vorsicht geboten. Bei der Lagerung ist das Gerät bis zu den folgenden Umgebungsbedingungen geschützt:

Umgebungstemperatur +5 bis 40 °C

Relative Feuchtigkeit 15 bis 93 %

Verwendungsweise

Gebrauchsanweisung für TAP2000


Befolgen Sie die Anweisungen in der Ihrem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung.
Schließen Sie die Matte an die beiden Kanäle des Geräts an.

Beachten Sie die Warnhinweise in den Bedienungsanleitungen für MAG2000 oder LaMagneto-Produkte.

Reinigung des TAP2000

Für die Reinigung des F3S2000 und TAP2000 wird empfohlen, den 6-Magnetspulen-Applikator zuvor vom Gerät zu trennen. Reinigen Sie den Stoff mit einem mit milder Seife und Wasser angefeuchteten Tuch und warten Sie, bis er vollständig getrocknet ist, bevor Sie den 6-Magnetspulen-Applikator erneut für eine Therapiesitzung verwenden.

Informationen zur Entsorgung

Das Produkt unterliegt den WEEE-Bestimmungen (Symbol  auf dem Etikett) in Bezug auf Mülltrennung: Bitte entsorgen Sie das Produkt bei speziellen Sammelstellen für elektronisches Material, indem Sie sich an die zuständigen Behörden in Ihrem Land oder direkt an den Hersteller wenden.

Wartung und Kundendienst

Das Gerät erfordert keine besondere Routinewartung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um die Funktionsfähigkeit des Geräts alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Der Hersteller ist der einzige Anbieter von technischem Support für den Applikator TAP2000. Für technischen Support wenden Sie sich bitte an

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. +39 041 5401356 • Fax +39 041 5402684

Garantie

Für den TAP2000 gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt bei Manipulationen, mangelnder Sorgfalt oder unsachgemäßem Gebrauch des Applikators sowie bei Eingriffen am Applikator durch nicht vom Hersteller oder Vertragshändler autorisiertes Personal.

Schadensbericht

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 weist der Hersteller den Benutzer auf die Notwendigkeit hin, jeden schweren Unfall im Zusammenhang mit dem Gerät zu melden.

Der Bericht muss adressiert werden:

- an den Gerätehersteller:

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684
e-mail: iacer@iacer.it



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy
Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up
Tax Code / VAT Number: IT 00185480274
Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N