



DEUTSCH

RUNDES KISSEN

WARNUNGEN

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung visuell die Unversehrtheit des Produkts. Wenn das Produkt Auffälligkeiten aufweist, wenden Sie sich sofort an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt wurde.

Erregi sas übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts.

Im Falle eines schweren Unfalls im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts melden Sie den Vorfall bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

BESCHREIBUNG

Dekubitusprophylaxe-Kissen aus 100% Baumwolle, mit Polsterung aus Silikon-Hohlfaser. Das Kissen ist mit einem Klettverschluss versehen. Die hohe Belastbarkeit und die hohe Atmungsaktivität ermöglichen eine wirksame Maßnahme zur Vorbeugung des Auftretens von Druckgeschwüren.

HINWEISE

Dekubitusprävention für Rollstuhlfahrer, um Druckspitzen abzubauen, Scher- und Reibungskräfte zu reduzieren und die Luftzirkulation zu fördern.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Medizinprodukt zur Vorbeugung von Dekubitus, das nach klinischer Beurteilung durch einen Facharzt zu verwenden ist. Legen Sie das Kissen auf den Rollstuhlsitz und achten Sie darauf, dass sich die Klettverschlüsse, wo vorhanden, auf der Seite der Rückenlehne befinden. Befestigen Sie dann das Kissen mit den Klettverschlüssen an der starren Rollstuhlstruktur. Obwohl das Produkt zur Vorbeugung von Dekubitus indiziert ist, ist es nicht in der Lage, alle Faktoren zu kontrollieren, die seinen Ausbruch begünstigen. Es wird daher empfohlen, den betroffenen Bereich regelmäßig zu kontrollieren, eine häufige Patientenmobilisierung durchzuführen und besonderes Augenmerk auf die Hygiene zu legen. Zu diesem Zweck ist es ratsam, die Protokolle und Richtlinien zur Vorbeugung von Druckgeschwüren zu konsultieren. Verwenden Sie das Produkt immer mit persönlicher Schutzkleidung. Nicht flammenhemmendes Produkt.

KONTRAINDIKATIONEN

Es wurden keine Kontraindikationen gefunden, außer bei festgestellter Empfindlichkeit gegenüber den Komponentenmaterialien.

KOMPOSITION

Innen: Silikonisierte Hohlfaser Bezug:
100% Baumwolle

WASCHMETHODE

WASCHEN MAX 40°	NICHT BLEICHEN	NICHT BÜGELN	KEINEN TROCKNER VERWENDEN
	VERWENDEN SIE EIN BELIEBIGES LÖSUNGSMITTEL AUSSER TETRACHLORETHYLEN		

Der Hersteller haftet nicht für Veränderungen der technischen Merkmale des Hilfsmittels bei Nichtbeachtung der Waschanleitung.

AUFBEWAHRUNG

Geschützt vor Licht-, Wärme- und Feuchtigkeitsquellen lagern.

DESINFEKTION

Ausschließlich Medizinprodukte verwenden

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Vorschriften zum Umweltschutz und zur getrennten Abfallsammlung.

	Erzeugniscode		Hersteller
	Chargennummer		Medizinprodukt
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Herstellungsdatum		Ohne Naturkautschuk hergestellt

Entfernen Sie das Etikett NICHT vom Medizinprodukt, da es die Rückverfolgbarkeit des gelieferten Produkts ermöglicht (Hersteller, UDI, Chargennummer, Produktcode).

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

03/04 (Gima 28549)



Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY

