



www.led.it

REF 00900.02

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IT EN ES FR DE PT TR

IA00900-01Ar2
ed. 05/2012 2012 (C) LED SpA

DE KIT für die CHIRURGISCHE RAUCH ANSAUGUNG


Kontrollieren das Status des Produkt vor der Verwendung.
Das Produkt ist Einweggebrauch. Nicht** wieder verwenden.
Nicht saugen die Flüssigkeit
Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den Prozess für die Kontrolle von Krankenhaus-Abfall entsorgt werden.

Die Anschlüsse müssen von geschultem Personal durchgeführt werden.

Das Produkt ist für die Chirurgische Rausch Ausgang in der Chirurgie versorgt zu "öffnen" (z. B. Laparotomie). Die typische Anschluss ist:
-Anschluss im Kode 00900.01 (separat geliefert) (Bild A - teil 4)
-Anschluss im Series Filter XX00900.XXX (Bild A - teil 2)

Geeignet für den direkten Anschluss an eine endoskopische Zubehör (zB laparoskopische Chirurgie) oder sonstige Zusammenstellungen kompatibel Befestigung Durchmesser (22mm).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

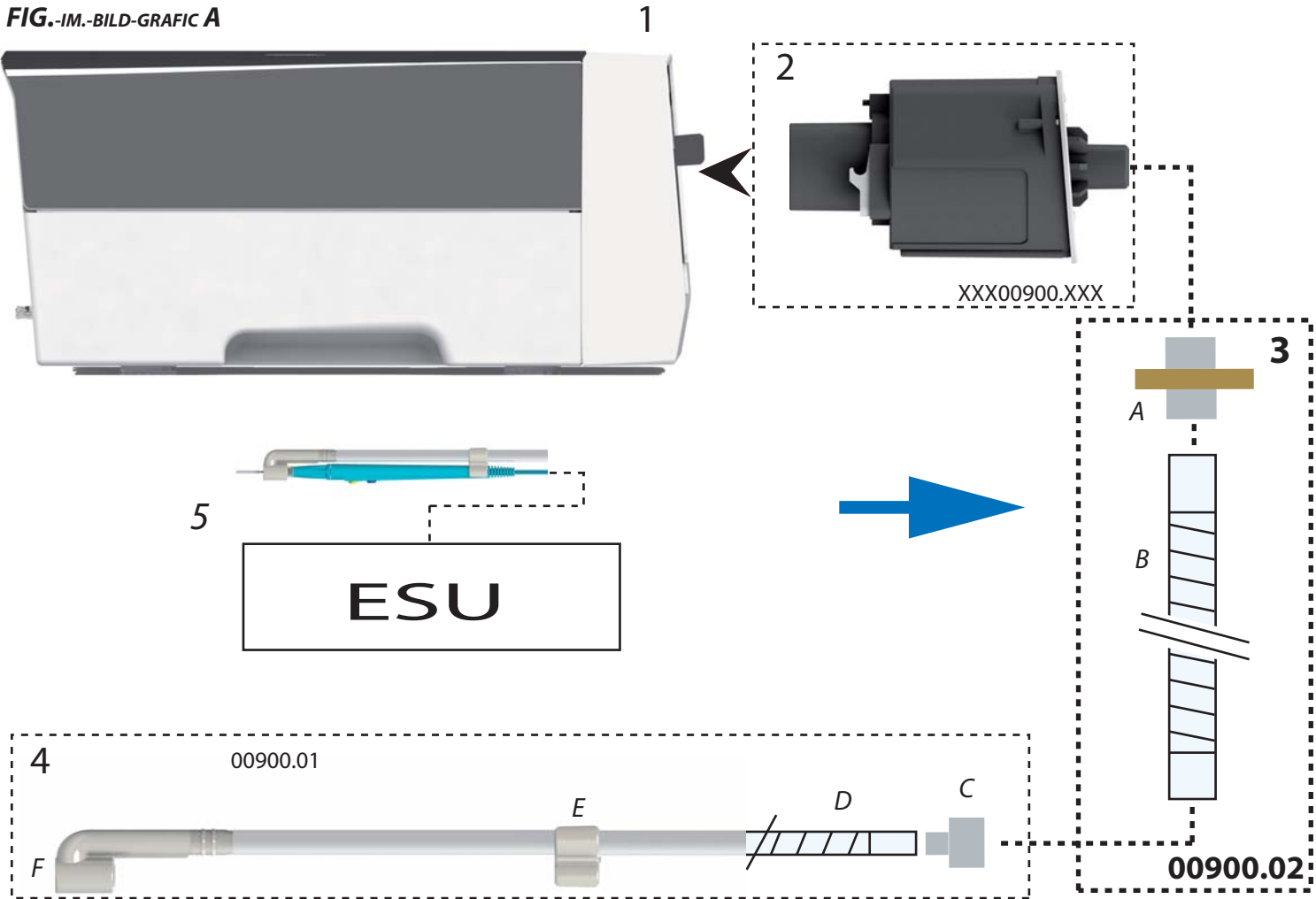

1 EINHEIT ANSAUGUNG* serie XXX10200. 10 - XXX10200.10/115V
 2 FILTER* Serie XXX00900.XXX
 3 ABSAUGUNG KIT (00900.02) - A Filter – B Rohrdurchmesser. 22 mm
 Länge 2,4 m
 4 KIT für die CHIRURGISCHE RAUCH ANSAUGUNG der HANDSTÜCKE
 (00900.01)* – C Adapter 10mm/22mm – D Rohrdurchmesser 10mm Länge 1,8mt –
 E Clip zu festlegen das Rohr im Handstücke – F Adapter für Handstücke
 5 Particularität des Handstücke* mit 00900.01, der Handstücke musst zu Ihren
 Elektrochirurgische Einheit Anschluss (ESU)*. *Nicht versorgt.



REF 00900.02

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-02Ar2
ed. 05/2012 2012 (C) LED SpA