

FOOTSWITCH UDI  8 0 3 3 6 3 8 3 2 0 8 2 2

REF 00305.03

**IP 67
WATER PROOF**

1-2 R1K5
3-4 cut
3-5 coag

**EXPLOSION
PROOF**



cable 5 mt

LED SpA
Via M.T.Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY



MADE IN ITALY



-10°C 50°C 10% 85%

IT EN ES FR DE PT PL

IA00305-03b_ML1
ed. &&S %' 2022 (C) LED SpA

DE ABGEDICHTETES DOPPELPEDAL

Das Produkt wird für den Fuß der kompatiblen elektronischen Steuereinheiten zugeführt.

Kontrollieren das Status des Produkt vorher der Verwendung. Bitte, ausscheiden die Produkte mit Defekte.

Dieses Produkt ist kompatibel mit Versionen dieser Geräte erfordern es, den Anweisungen für das Gerät beziehen.

Die Verbindungen müssen von qualifizierten Personal durchgeführt sein.

Installation:

- Stecken Sie den Stecker auf produktspezifische Elektronik -Stecker, die Aufmerksamkeit auf die Richtung der Einführung zahlen (Abb. A -Teil 1-2)
- Um das Produkt zu sperren, drehen Sie das Rad am Gerät (Abb. A - Teil 3).

Schalten Sie das Gerät und Funktionstests durchführen , indem sie auf das Pedal (Abb. A - Teil 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



DE DRÄNGEN = AKTIVIERUNG / AUSLÖSER = KEINE AKTIVIERUNG
GELB = SCHNITT/ BLU = KOAGULATION