


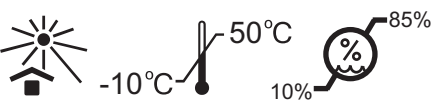
FOOTSWITCH UDI  8 033638 320730

REF 00305.04 L-E cut N-E coag IP 67 WATER PROOF  1



EXPLOSION PROOF  AP MD

cable 5 mt LED SpA Via M.T.Cicerone 138 03100 Frosinone (LT) - ITALY

 -10°C 50°C 10% 85%

IT EN ES FR DE PT PL IA00305-04W_ML1 ed. &68 % ' 20'' (C) LED SpA

DE ABGEDICHTETES DOPPELPEDAL (300-400)

Das Produkt wird für den Fuß der kompatiblen elektronischen Steuereinheiten zugeführt.

Kontrollieren das Status des Produkt vorher der Verwendung. Bitte, ausscheiden die Produkte mit Defekte.

Dieses Produkt ist kompatibel mit Versionen dieser Geräte erfordern es, den Anweisungen für das Gerät beziehen.

Die Verbindungen müssen von qualifizierten Personal durchgeführt sein.

Installation:
 - Stecken Sie den Stecker auf produktspezifische Elektronik -Stecker, die Aufmerksamkeit auf die Richtung der Einführung zahlen (Abb. A -Teil 1-2)
 - Um das Produkt zu sperren, drehen Sie das Rad am Gerät (Abb. A - Teil 3).

Schalten Sie das Gerät und Funktionstests durchführen , indem sie auf das Pedal (Abb. A - Teil 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



DE DRÄNGEN = AKTIVIERUNG / AUSLÖSER = KEINE AKTIVIERUNG
 GELB = SCHNITT/ BLU = KOAGULATION