



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BARELLA GIMA 4
GIMA 4 STRETCHER
BRANCARD GIMA 4
KRANKENTRAGE GIMA 4
CAMILLA GIMA 4
MACA GIMA 4
ΦΟΡΕΙΟ GIMA 4
GIMA 4 نقالة مرضى

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

È necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها



Zhangjiagangtengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

GIMA 34107



TD01015



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



I. Technische Parameter

1. Abmessungen: (L x B x H): 221 x 54 x 17 (cm)
Kartongröße (1 Stk.): 104 x 19 x 12 cm
2. N.G: 5 kg
3. Tragkraft: ≤159 kg

II. Bedienungsanleitung

Öffnen Sie zu zweit die Gurte und falten Sie die Trage flach auseinander. Eine Person drückt die Trage, die andere zieht sie herunter.

III. Anwendungsbereich

Krankenhäuser, Trainingshallen, Rettungswagen und Lazarette.

IV. Wartung

1. Regelmäßig reinigen (und desinfizieren).
2. Häufig kontrollieren, dass sich keine Teile gelockert haben.

V. Lagerung und Transport

1. Feuchtigkeit und Rostbildung meiden.
2. Üblicher Transport

VI. Lagerung und Transport

1. Lagern Sie das Produkt an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf.
2. Das Produkt kann in üblichen Transportfahrzeugen transportiert werden.
3. Das Produkt darf während des Transports nicht auf den Kopf gestellt werden. Stellen Sie das Produkt gemäß den Anleitungen auf dem Karton auf.

 REF	Erzeugniscode		Hersteller		Gebrauchsanweisung beachten
 LOT	Chargennummer		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Herstellungsdatum
	An einem kühlen und trockenen Ort lagern		Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Autorisierter Vertreter in der EG
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		Medizinprodukt		Eindeutiger Bezeichner
	Importiert von				

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.