




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SHOWER STOOL WITH TRAY
SGABELLO DA DOCCIA CON VASSOIO
TABOURET DE DOUCHE AVEC TABLETTE
DUSCHHOCKER MIT TABLETT
TABURETE DE DUCHA CON BANDEJA
BANQUETA DE CHUVEIRO COM PRATELEIRA
ΣΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

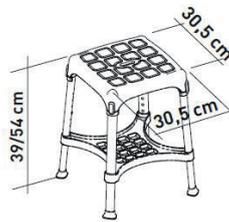

DEUTSCH

VERWENDUNGSZWECK:

Die Produkte der Hocker-Produktlinie bieten dem Benutzer eine größere Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bei der täglichen Körperpflege unter der Dusche und verringern die durch das Stehen bedingte Muskelermüdung sowie die Gefahr des Ausrutschens und von Verletzungen. Die Ausführungen mit rutschfesten Gummifüßen sorgen für einen besseren Halt auf dem Boden, während die Modelle mit höhenverstellbaren Beinen eine einfache Anpassung der Gesamthöhe des Hockers an die Bedürfnisse des Benutzers ermöglichen. Die Ausführungen mit einem Drehteller bieten mehr Bewegungsfreiheit, ohne dass man vom Hocker aufstehen muss. Dank ihrer Flexibilität können die Hocker auch auf unebenen Böden aufgestellt werden, wie es bei vielen Duschwannen der Fall ist. Die Hocker sind in drei verschiedenen Formen erhältlich. Aufgrund ihres geringen Gewichts lassen sich die Hocker leicht versetzen. Die Hocker können für eine noch komfortablere Benutzung mit einem weichen Kissen ausgestattet werden. Die weichen Kissen und Drehteller sind separat als Zubehör erhältlich.

INDIKATIONEN UND KONTRAINDIKATIONEN:

Die Produkte der Hocker-Produktlinie sind eine wertvolle Hilfe für ältere Menschen, Rollstuhlfahrer, Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit im unteren Rücken-, Knie- und Hüftbereich sowie für alle, die bei der täglichen Körperpflege in der Dusche Schwierigkeiten haben, eine aufrechte Position zu halten. Der Benutzer muss in der Lage sein, das Gleichgewicht bei den für den Übergang in eine sitzende und stehende Position erforderlichen Bewegungen selbstständig zu halten, und er muss in der Lage sein, sitzen zu bleiben. Die Verwendung der Hocker wird nicht empfohlen, wenn der Benutzer Probleme mit dem Gleichgewicht oder der Wahrnehmung hat.

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT: 170Kg

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

- Das in dieser Montageanleitung angegebene maximale Benutzergewicht darf nicht überschritten werden.
- Der Benutzer muss sich vor jeder Benutzung vergewissern, dass der Hocker richtig zusammengesetzt ist und stabil steht.
- Der Hocker darf nur auf einer Fläche benutzt werden, die frei von Hindernissen ist.
- Beim Zusammenbau des Produkts müssen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung genau befolgt werden.
- Andernfalls kann sich das Risiko von Fingerverletzungen beim Zusammenbau erhöhen.
- Schaukeln Sie während der Benutzung des Hockers nicht, denn dadurch können Sie abrutschen, umkippen oder umfallen.
- Stellen Sie den Hocker immer auf vier Beine.
- Verändern Sie den Hocker und alle seine Bestandteile in keiner Weise.
- Verwenden Sie den Hocker nicht, wenn er beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert ist.

- Nach der Verwendung muss der Hocker aus der Duschwanne entfernt werden, um mögliche Verstopfungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Hocker nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Der Hocker darf nicht im Freien gelagert werden.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit offenen Wunden oder verletzter Haut, um Infektionen zu vermeiden.

INFORMATIONEN ZUR WARTUNG:

Die Wartung des Produkts besteht aus Reinigungs- und Desinfektionsverfahren. Um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung unter Einhaltung der Hygienestandards zu gewährleisten, muss der Benutzer diese Verfahren vor jeder Verwendung durchführen. Der Benutzer muss die strukturelle Unversehrtheit des Produkts und aller seiner Komponenten sicherstellen und den festen Sitz der Schrauben überprüfen. Bei der Reinigung und Desinfektion sind die folgenden Verfahren zu befolgen:

1. Ziehen sie Handschuhe an
2. Entfernen Sie vor der gründlichen Desinfektion offensichtlichen Schmutz.
3. Verwenden Sie für die Reinigung Wasser oder nicht aggressive Reinigungsmittel.
4. Reinigen Sie den Hocker mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Alternativ kann das Produkt auch in einer Haushaltsspülmaschine bei maximaler Temperatur gereinigt werden. Das weiche Kissen muss unbedingt von Hand gewaschen werden.

BEDINGUNGEN FÜR DIE WIEDERVERWENDUNG :

Das Produkt ist für die Wiederverwendung durch andere Benutzer geeignet. Bevor das Produkt von anderen Benutzern verwendet wird, muss es ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden. Vor der Weitergabe des Produkts muss es von qualifizierten Händlern überprüft werden.

KORREKTE ENTSORGUNG:

Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei den lokalen Behörden nach dem korrekten Entsorgungsverfahren für das Produkt.





UNFALLMELDUNG:

Wenn sich im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ein schwerer Unfall ereignet, wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter info@imglobaldesign.com und an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

	Erzeugniscode		Chargennummer
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Hersteller
	Seriennummer		Herstellungsdatum
	Medizinprodukt		Gebrauchsanweisung beachten

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

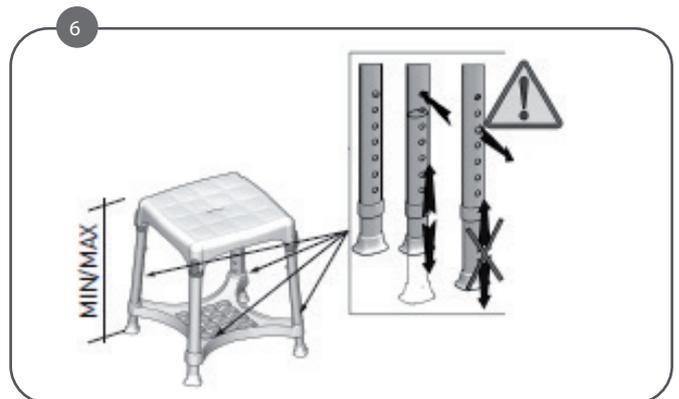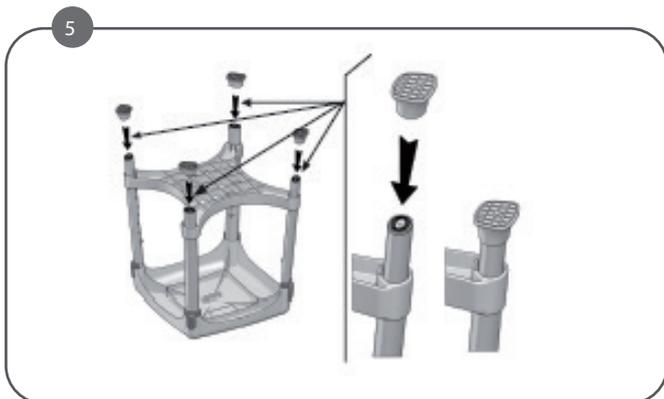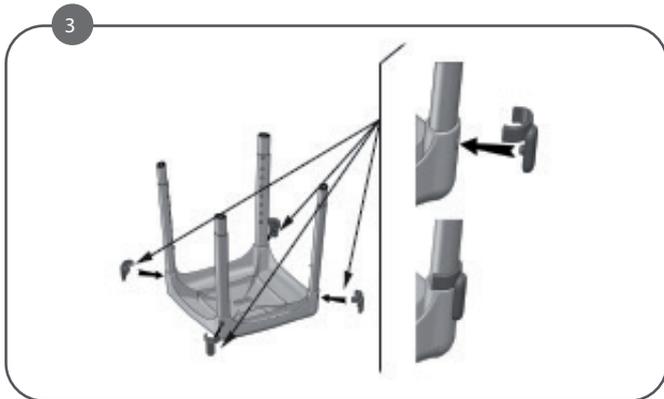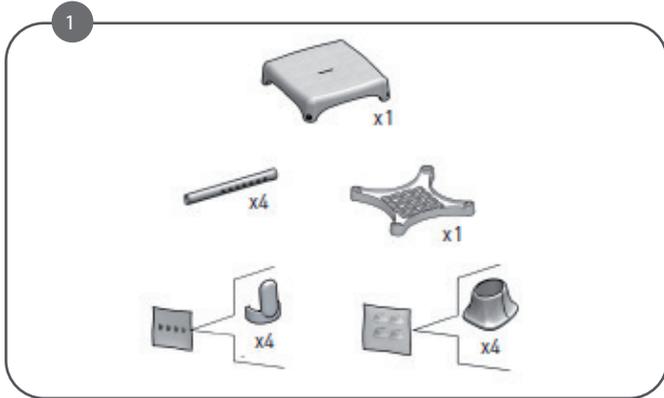

LM GLOBAL DESING Ltd.
 Suite 123, The Capel Building
 Mary's Abbey Dublin 7, D07VY68, Ireland
 Made in Italy

GIMA 42904

REF KING-STAT-74

