

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. KONSULTIEREN SIE VOR DER VERWENDUNG IHREN ARZT.

KONTRAINDIKATIONEN: Nicht für Personen über 110 kg (242 lbs) geeignet - Nicht auf vereistem oder rutschigem Boden verwenden. - Nicht für Personen mit Latexallergien geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Um den Gehstock aufzuklappen, halten Sie ihn am Griff fest und lassen Sie die faltbaren Schaftsegmente in Richtung Boden auseinanderklappen. Um Stürze zu vermeiden, sollten Sie immer überprüfen, ob die einzelnen Schaftsegmente (Abb. 1) sicher eingerastet sind.

WARNUNG: Zerlegen Sie den Gehstock nicht. Der Gehstock enthält eine elastische Schnur im Inneren. Bei unkontrolliertem Auslösen kann die elastische Schnur im Inneren schwere Verletzungen an ungeschützten Körperteilen verursachen, insbesondere an den Augen, wenn sie durchtrennt, ausgefranst oder beschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt in diesem Fall nicht weiter. Dehnen Sie die Schnur nicht mehr als zum Zerlegen oder Zusammenbauen der Segmente erforderlich ist.

EINSTELLEN DER HÖHE DES GEHSTOCKS: Lösen Sie den Drehverschluss, indem Sie ihn mehrere Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen. Drücken Sie den Verriegelungsknopf und ziehen Sie den Griff nach oben, um ihn zu verlängern, oder drücken Sie den Griff nach unten, um ihn zu verkürzen. Denken Sie daran, den Drehverschluss wieder festzuziehen, nachdem Sie den Gehstock auf die gewünschte Höhe eingestellt haben.

WARNUNG: Um Stürze zu vermeiden, stellen Sie immer sicher, dass die einzelnen Schaftsegmente sicher verriegelt sind und der Verriegelungsknopf vollständig eingerastet ist. Stellen Sie immer sicher, dass der Drehfuß des Stocks fest mit dem Gehstock verschraubt ist, um Stürze zu vermeiden.

ZUSAMMENKLAPPEN DES GEHSTOCKS: Der Gehstock lässt sich leicht in eine praktische Reisegröße zusammenklappen, indem Sie die 4 einzelnen Schaftsegmente voneinander trennen. Halten Sie jeden Satz von Schaftsegmenten in der Nähe der Verbindung fest und ziehen Sie sie auseinander. Die einzelnen Schaftsegmente lassen sich sauber zusammenfallen.


VERWENDUNG DER LICHTER AM GEHSTOCK: Der Knopf oben am Griff des Gehstocks aktiviert die Beleuchtung. Durch einmaliges Drücken des Knopfes wird das Licht an der Vorderseite des Stocks aktiviert, durch erneutes Drücken wird auch das rote Licht an der Unterseite des Griffs eingeschaltet, durch dreimaliges Drücken werden beide Lichter ausgeschaltet. Das vordere Licht kann gedreht werden, um den Lichtstrahl dorthin zu lenken, wo Sie ihn benötigen.

SOS-SIGNAL: Um das SOS-Signal zu aktivieren, drücken Sie den Knopf an der Seite des Griffs. Das Licht an der Unterseite blinkt und der Stock gibt einen Alarmton ab.

AUSTAUSCH DER BATTERIEN: Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Griffs. Entnehmen Sie alle leeren Batterien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß. Legen Sie 2 AAA-Batterien mit der richtigen Polarität ein (Pluspol nach außen, wo sich die Feder befindet). Schließen Sie das Batteriefach. Überprüfen Sie den Stock regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, einschließlich Ausfransungen an der elastischen Schnur oder Abnutzung am Gummifuß. Bei Anzeichen von Verschleiß die Verwendung sofort einstellen.

WARNUNG: Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium-) Batterien.

GIMA GARANTIEBEDINGUNGEN: Für das Produkt gilt die 12-monatige Standardgarantie B2B von Gima.

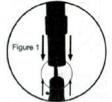

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootaja/Valmistaja/Proizvodac/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Ge'fabricieerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilveirad av/توليد بواسطة

Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγωγή από/Biecenio od/Dovezeno uživatelem/importert
af/importija/ Tuoja;/Uvezeno od strane/Importáta;/importēja/importavo/
Importert av/Geimportieerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozič/importad av/توريد بواسطة

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

