



WARNUNGEN

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung visuell die Unversehrtheit des Produkts. Wenn das Produkt Auffälligkeiten aufweist, wenden Sie sich sofort an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt wurde.

Erregi sas übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. Im Falle eines schweren Unfalls im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts melden Sie den Vorfall bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

BESCHREIBUNG

Ref. 19/04/1/S, 20/04/1/S, 21/04/1/S: Haltunggurte aus feuerhemmendem, wasserabweisendem Polyamidgewebe der Klasse 1, mit feuerhemmender Polyurethanschaum-Polsterung der Klasse 1 IM und Polypropylen-Gurten mit Sicherheitsverschlüssen.

HINWEISE

Haltunggurte zur Aufrechterhaltung der Körperhaltung von Patienten in Rollstühlen, Toilettenstühlen und zur Vermeidung von Stürzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Das Produkt muss mit einer angemessenen Spannung angebracht werden, um die korrekte Funktionsweise zu garantieren. Beim Einstellen der Gurte muss eine flache Hand zwischen dem Patienten und dem Produkt passen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Patient und der vom Gurt betroffene Bereich regelmäßig kontrolliert werden muss.

Verwenden Sie das Produkt immer mit persönlicher Schutzkleidung.

KONTRAINDIKATIONEN

Es wurden keine Kontraindikationen gefunden, außer bei festgestellter Empfindlichkeit gegenüber den Komponentenmaterialien.

Polsterung: Polyurethanschaum feuerhemmend Klasse 1 IM.

KOMPOSITION

Äußeres Material: 92% Polyamid 8% Polyurethan, feuerhemmend Klasse 1.

Polsterung: Polyurethanschaum feuerhemmend Klasse 1 IM.

WASCHMETHODE



Der Hersteller haftet nicht für Veränderungen der technischen Merkmale des Hilfsmittels bei Nichtbeachtung der Waschanleitung.

DESINFEKTION


Ausschließlich Medizinprodukte verwenden

AUFBEWAHRUNG

Geschützt vor Licht-, Wärme- und Feuchtigkeitsquellen lagern.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Vorschriften zum Umweltschutz und zur getrennten Abfallsammlung.

	Erzeugniscode		Hersteller
	Chargennummer		Medizinprodukt
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Herstellungsdatum		Ohne Naturkautschuk hergestellt
	Eindeutiger Bezeichner		

Entfernen Sie das Etikett NICHT vom Medizinprodukt, da es die Rückverfolgbarkeit des gelieferten Produkts ermöglicht (Hersteller, UDI, Chargennummer, Produktcode).

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

DEUTSCH

19/04/1/S BRUSTGURT MIT
SICHERHEITVERSCHLUSS
20/04/1/S BAUCHGURT MIT
SICHERHEITVERSCHLUSS
21/04/1/S BECKENGURT MIT
SICHERHEITVERSCHLUSS



Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiasilimedi.it
www.erregiasilimedi.it
MADE IN ITALY

