



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 2 SEZIONI
2 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE
TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 2 SECTIONS
2-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH
CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE DOS SECCIONES
MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 2 SEÇÕES

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Hersteller:
Anji Sukar Furniture Co., Ltd.
Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang Province, China. P.C.: 313300
peter@zjruixiang.com

GIMA 44000, 44001, 44002, 44003


REF WT221A

Importato da/imported by/importé par/eingeführt von/importado por:
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 - Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com
Made in China



SICHERHEITSHINWEISE

1. Der Tisch muss regelmäßig gewartet werden. Sicherstellen, dass alle Schrauben festgezogen sind und dass das Kabel nicht beschädigt oder ausgefranst ist. Sicherstellen, dass keine Risse in der Holzstruktur vorhanden sind.
2. Die empfohlene Gewichtsgrenze darf nicht überschritten werden. Andernfalls könnte der Nutzer schwer verletzt werden. Maximale Betriebsbelastung von 200 kg gete-stet.
3. Das Vinyl darf nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Diese könnten das Material aus Vinyl beschädigen. Zum Reinigen warmes Seifenwasser verwenden und danach trocken wischen.
4. Bevor der Tisch benutzt wird, muss sichergestellt werden, dass alle 4 FüÙe das gleiche Niveau haben. Wenn die FüÙe unterschiedliche Niveaus haben, kann es dazu führen, dass der Tisch instabil wird, was wiederum zu Verletzungen führen kann.
5. Kinder dürfen nur unter Aufsicht den Massagetisch zusammenbauen oder zerlegen.
6. Bei der Verwendung von scharfen Gegenständen ist Vorsicht geboten, da die Abdeckung durchsto-chen werden kann. Die Tischabdeckung von scharfen Gegenständen fern halten.

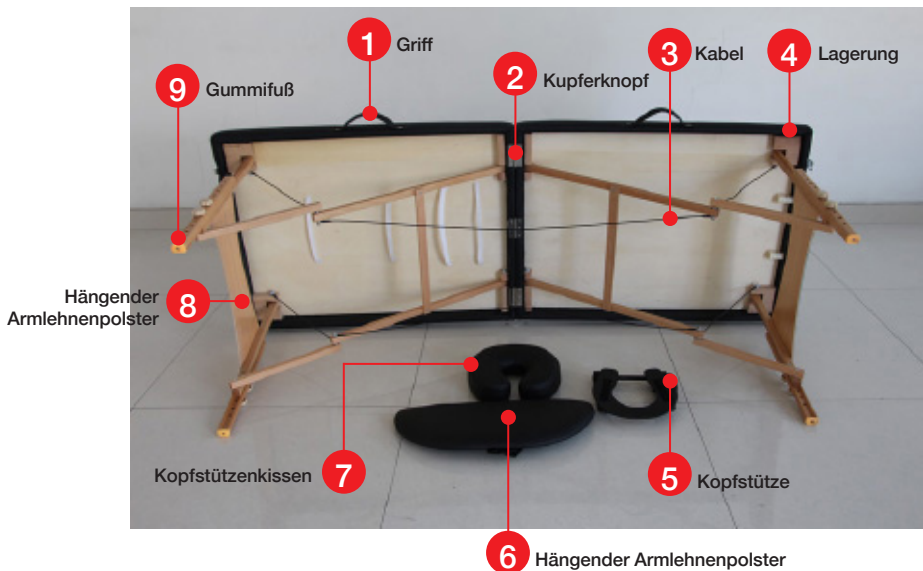

EINRICHTEN IHRES TISCHES

Gehen Sie folgendermaßen vor:



1



2



3



4



5



6

1. Den Verschluss öffnen.
2. Den Tisch auf die Seite mit den zwei Gummifüßen am Boden legen, den Tisch so öffnen, dass alle vier Füße so weit wie möglich geöffnet sind. Das gesamte Zubehör abnehmen.
3. Den Tisch anheben und auf alle vier Füße auf den Boden stellen.
4. Das Zubehör in die entsprechenden Halterungen einsetzen, die hängenden Armlehnenpolster festziehen oder auf der Kopfstütze befestigen.
5. Den seitlichen Griff lösen und so lange drücken, bis die Kopfstütze in die gewünschte Position gebracht wurde.
6. Nun ist der Tisch einsatzbereit.

Durch Drehen der Knöpfe auf den Füßen kann die Höhe des Tisches eingestellt werden. Hierzu die beweglichen Füße herausziehen und in den entsprechenden Löchern einrasten lassen. Danach den Fuß wieder einsetzen und die Knöpfe festziehen. Alle vier Füße können auf die gleiche Weise eingestellt werden. Sicherstellen, dass alle vier Füße in der gleichen Höhe eingestellt werden.

SCHLIESSEN UND TRANSPORT DES TISCHES

1. Die Rückenlehne in die oberste Position bringen und danach nach unten drücken und die Verriegelung schließen.
2. Das gesamte Zubehör abnehmen.
3. Den Tisch so auf den Boden legen, dass die beiden Gummifüße am Boden aufliegen.
4. Alle Zubehörteile unter das elastische Band unterhalb der Liegefläche legen.
5. Durch Drücken auf die entsprechenden Stützarme die Tischfüße umklappen.
6. Den Tisch zusammenfalten und den Verschluss schließen.
7. Der Tisch kann dank des Griffs wie ein Koffer getragen werden.



Warnung: Wenn der Rahmen / die Füße / die Tischstruktur in irgendeiner Weise beschädigt sind, darf der Tisch nicht verwendet werden. Sollte der Tisch trotz Beschädigung verwendet werden, kann dies zu Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Patienten führen. Es muss sofort repariert werden.



GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.