



1.

DK ⚠ Bemærk!

Sikkerhedsinformationer til opbevaring og håndtering af hæmoglobin-mikrocuvetter

Hæmoglobin-mikrocuvetter er udelukkende beregnet til analyse af hæmoglobin i kapillær og venøst blod og til brug i følgende apparater: Hemo_Control, Hemo_Control Manager, Hemo_Vet og Hemo_Vet Manager. De må kun anvendes af kvalificerede fagfolk.

Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til det pågældende apparat.

Cuvetterne skal altid opbevares i original emballage ved 15°C til 30°C. Dåser med original forsegling kan anvendes til den påtrykte holdbarhedsdato. Efter åbning af dåsen er cuvetterne ved korrekt håndtering under de angivne betingelser stabile i 3 måneder.

Tag kun en cuvette ad gangen ud af dåsen. Luk dåsen omhyggeligt igen straks efter at cuvetten er taget ud (se fig. 1.). Kontrollér at cuvettedåsens låg altid er lukket hele vejen rundt (se fig. 2.).

Er dåsen ikke helt lukket (se fig. 3.), kan der trænge fugt ind i dåsen, hvilket kan ødelægge reagenserne i cuvetten. Brugen af en sådan cuvette kan medføre forkerte resultater. Brug aldrig cuvetter fra en dåse, der ikke har været lukket korrekt.



2.



3.

