




**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com  
export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**REF** 27735 - 27737  
27740 - 27741

 **Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in Italy



IT - Manuale d'uso  
GB - User instructions  
SI - Navodila za uporabo  
ES - Instrucciones de usuario  
PT - Instruções de montagem  
GR - Αλυσσηηθό ηηπαιέηαο  
DK - Brugervejledning  
PL - Instrukcja Użytkowania  
FR - Instructions de  
fonctionnement  
NL - Gebruikershandleiding  
DE - Gebrauchsanweisungen

M-27735-M-Rev.1.10.18

---

#### **DK - Monteringsvejledning**

Fastgør de 2 L-formede beslag til Gimatoiletsæde: vend toiletsædet på hovedet på et fladt underlag og isæt de L-formede beslag i hullerne. Pres forsigtigt på beslaget og drej grebet med uret indtil gevindet går i indgreb. Placer beslagene således at de nemt kan gå ned i toiletkummen.

Fjern det eksisterende toiletsæde og placer Gima sædet direkte på toiletkummen, idet beslagene placeres mod bagsiden af toiletkummen, og læben mod forsiden.

Drej grebet med uret indtil der mærkes modstand, og sædet ikke længere kan bevæges fra side til side. Det er vigtigt at sikre sig at sædet sidder korrekt før det benyttes.

**VIGTIGT!** Beslagene er designet således at sædet er nemt at montere. Stop derfor med at dreje når modstand mærkes.


#### Rengøringsvejledning

Alle dele kan rengøres med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel. Alternativt kan sædet dypes i vand og/eller kan steriliseres (uden beslag) i en autoklave i 1 minut ved 85°C.

#### Advarsler

Overskrid ikke maksimum bruger vægt: 225kg Det skal altid sikres at sædet er korrekt fastspændt før brug. Hold ikke på sædet for støtte når du sætter dig på hhv. løfter dig fra sædet.

Dettagli tecnici - Technical Details - Tehnicne lastnosti  
Datos técnicos - Especificações técnicas - Σεινικά υαρακρηριζία  
Techniske detaljer - Dane Techniczne - Détails techniques  
Technische info - Technische Daten

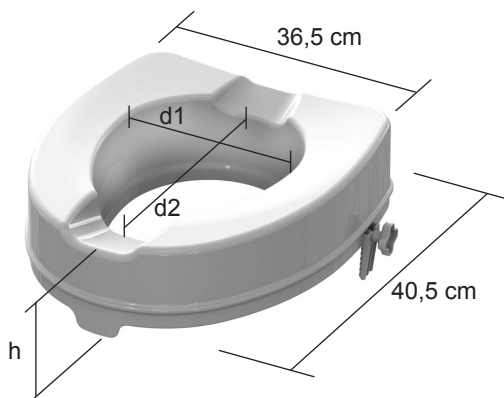

<b>h</b>	10 cm	14 cm
<b>d1</b>	20,5 cm	20,5 cm
<b>d2</b>	25,5 cm	25,5 cm