

SPUGNETTA STERILE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA
 STERILE DISPOSABLE CLEANING PAD FOR ELECTROSURGERY
 TAMPON STÉRILE À USAGE UNIQUE POUR ÉLECTROCHIRURGIE
 ELEKTRODEN-REINIGUNGS-PAD STERIL, ZUM EINMALGEBRAUCH
 ESPONJA ESTÉRIL MONOUSO PARA ELECTROCIRUGÍA
 ESPONJA ESTERILIZADA DESCARTÁVEL PARA A ELETRO-CIRURGIA
 СТЕРИЛЬНАЯ ГУБКА ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ
 СТЕРИЛНА ГЪБИЧКА ЕДНОКРАТНИ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ
 STERILNÍ HOUBÍČKA NA JEDNO POUŽITÍ PRO ELEKTROCHIRURGII
 STERIL SVAMP ENGANGSBRUG TIL ELEKTROKIRURGI
 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΙΑΣ ΝΟΝΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 STERIILNE TAMPOON ÜHEKORDELT KASUTATAVAD ELEKTROKIRURGIA TOOTED
 STERIILI SIENI KERTAKÄYTTÖINEN SÄKHÖKIRURGIAN VÄLINE
 STERILNA SPUŽVICA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU ZA ELEKTROKIRURGIJU
 STERIL SZIVACS EGYSZER FELHASZNÁLHATÓK ELEKTROSEBÉSZETBEN
 STERILA ŠVAMMĪTE VIENREIZ LIETOJAMI ELEKTROKIRURĢIJĀ
 STERILI VIENKARTINĒ ABRAZYVINĒ KEMPINĒLĒ
 STERIELE SPONS EENMALIG GEBRUIK VOOR ELEKTROCHIRURGIE
 GĄBKA STERYLNA DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W ELEKTROCHIRURGII
 BURETE STERIL PRODUSE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PENTRU ELECTROCHIRURGIE
 STERILNÁ HUBKA JEDNORAZOVÉ KOMPONENTY PRE ELEKTROCHIRURGIU
 STERILNE GOBICE ZA ENKRATNO UPORABO V ELEKTROKIRURGIJI
 STERIL SVAMP ENGÅNGSBRUK FÖR ELEKTROKIRURGI
 STERİL SÜNGER ELEKTROCERRAHİ İÇİN TEK KULLANIMLIK
 STERILNI SUNĐER JEDNOKRATNA OPREMA ZA ELEKTROHIRURGIJU
 STERIL SVAMP ENGANGSUTSTYR TIL ELEKTROKIRURGI

اسفنج معقم مكونات أحادية الاستخدام للجراحة الكهربائية

IT - ISTRUZIONI D'USO
 EN - INSTRUCTIONS FOR USE
 FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION
 DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
 ES - INSTRUCCIONES DE USO
 PT - INSTRUÇÕES PARA USO
 RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 BG - ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 CS - POKYNY K POUŽITÍ
 DA - ANVISNINGER
 EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
 ET - KASUTUSJUHEND
 FI - KÄYTTÖOHJEET
 HR - UPUTE ZA UPOTREBU

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
 LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
 NL - GEBRUIKSAANWIJZINGEN
 PL - INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
 RO - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
 SK - NÁVOD NA POUŽITIE
 SL - NAVODILA ZA UPORABO
 SV - BRUKSANVISNING
 TR - KULLANMA TALİMATI
 SR - UPUTSTVO ZA UPOTREBU
 NO - BRUKSANVISNING
 AR - تعليمات الاستخدام



ANVISNINGER**FORSKRIFTER**

Produktet er beregnet til engangsbrug og ethylenoxidsteriliseret. Genanvend ikke. Genanvendelse kan medføre: tilstedeværelsen af biologiske restaffald som kan fremprovokere overførelse af infektioner fra en patient til en anden; materialeforandringer; produktet mister sine oprindelige karakteristika.

Steriliteten garanteres ikke, hvis pakken er åben og/eller beskadiget.

Må ikke bruges efter udløbsdatoen. Steriliteten garanteres ikke.

Kontrollér, at pakken ikke er brudt, og kontrollér dens indhold. Brug ikke produktet, hvis der er tegn på skader eller synlige fejl, og send det tilbage til FIAB.

Anordningerne skal tilsluttes og anvendes af kvalificeret personale.

Vedrørende brug af generatoren, håndstykkerne, neutralpladerne, kablerne og det øvrige udstyr henvises til anvisningerne fra producenten.

Sygehusaffald skal bortskaffes med overholdelse af kravene i den gældende lovgivning.

ANGIVELSER

Rengøring af håndstykkets elektrode i forbindelse med elektrokirurgi.

FREMANGSMÅDE VED BRUG

Fjern beskyttelsesfilmen, og klæb svampens bagside fast på operationsklædet for at opnå en stabil placering og forenkle rengøringen af håndstykkets spids.

N.B.: For at hindre fjernet materiale i at falde ned i operationsfeltet må rengøringen af spidsen ikke finde sted i umiddelbar nærhed af feltet.

Det røntgentætte sporstof i produktet gør det muligt at lokalisere det ved hjælp af røntgenundersøgelse, hvis produktet tabes i operationsfeltet.

Det anbefales at udskifte svampen, hvis der i forbindelse med brug konstateres en reduktion af svampens slibe- og rengøringseffekt.

Kassér produktet hver gang efter brug.

OPBEVARING

Produktet skal opbevares i sin originale emballage i rum, der er præget af miljøforhold, temperatur og relativ fugtighed, der er angivet på etiketten på emballagen. Overlappende vægte på emballager kan beskadige produktet.

BORTSKAFFELSE

Afslag, der hidrører fra sundhedsstrukturer, skal bortskaffes i henhold til gældende forordning.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Hvis der sker en alvorlig hændelse under brugen af denne enhed eller som resultat af brugen af den, bedes det indberettet til producenten og til den nationale myndighed. Informer producentens kvalitetsservice for enhver funktionsfejl eller defekt ved enheden.

	(RU)	(BG)	(CS)	(DA)	(EL)	(ET)
	Соответствует действующему европейскому законодательству о медицинских устройствах	Съответства на действащото европейско законодателств о относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	Overholder gældende europæisk lovgivning om medicinsk udstyr	Συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα	Vastab kehtivatele Euroopa seadustele meditsiiniseadmete kohta
	Медицинское устройство	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinsk udstyr	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Meditsiiniseade
	Уникальный идентификатор устройства	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Unik udstyrsidentifikationskode	Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος	Kordumatu identifitseerimistunnus
	Обратитесь к инструкции по применению	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Læs brugsanvisning	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	Lugeda tähelepanelikult kasutusjuhendit
	Производитель	Производител	Výrobce	Producent	Κατασκευαστής	Tootja
	Каталожный номер	Καταложен номер	Katalogové číslo	Katalognummer	Αριθμός καταλόγου	Kataloogi number
	Код партии	Партиден номер	Číslo šarže	Varepartinummer	Αριθμός παρτίδας	Partii number
	Дата изготовления	Дата на производство	Datum výroby	Produktionsdato	Ημερομηνία παραγωγής	Tootmise kuupäev
	Использовать до	Използвай при	Spotřebujte do	Udløbsdato	Ημερομηνία λήξης	Kehtivusaeg
	Стерилизовано с использованием оксида этилена	Стерилизирано с этилен-оксид	Sterilizováno etylénoxidem	Steriliseret med etylenoxid	Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου	Steriliseeritud etüleenoksiidiga
	Единая стерильная барьерная система	Единична стерилна бариерна система	Jediný sterilní bariérový systém	Enkelt sterilt barrieresystem	Μονό αποστειρωμένο σύστημα φραγμού	Ühekordne steriilne tõkkesüsteem
	Не использовать повторно	Не се допуска повторно употреба	Nepoužívat opakovaně	Bør ikke genbruges	Μην επαναχρησιμοποιείτε	Ühekordseks kasutamiseks
	Не использовать, если упаковка повреждена	Не използвай, ако опаковката е нарушена	při poškozeném obalu nepoužívat	Må ikke bruges hvis emballagen er beskadiget	Να μην χρησιμοποιηθεί εάν η συσκευασία είναι φθαρμένη	Ärge kasutag, kui pakendis sisalduv material tundub olevat kahjustatud e
	Температурные ограничения	Τεμπεратурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturgrænser	Ορια θερμοκρασίας	Temperatuuri piirmäärad
	Ограничения по влажности	Οграничения на влажността	Omezení vlhkosti	Fugtighedsgrænser	Ορια υγρασίας	Niisukuse piirmäärad
	Беречь от солнечных лучей	Πазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Undgå direkte sollys	Διατηρείτε μακριά από το φως του ήλιου	Hoida eemal otsese päikesevalgusest
	Беречь от влаги	Παзи сухо	Udržujte v suchu	Opbevarer tørt	Διατηρήστε το στεγνό	Hoia kuivana
	Не содержит натурального латекса	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Indeholder ikke latex	Δεν περιέχουν φυσικό ελαστικό λατέξ	Ei sisalda lateksi
	Количество штук	Брой	Počet kusů	Antal	Ποσότητα κομματιών	Ühikite kogus