



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAMPADA FRONTALE MEDICA LED 70 KL GIMA 3W  
LAMPADA FRONTALE CHIRURGICA LED 50 KL GIMA 5W  
GIMA 70 KL LED MEDICAL HEADLIGHT 3W  
GIMA 50 KL SURGICAL LED HEADLIGHT 5W  
LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 3W, GIMA 70 KL  
LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED 5W, GIMA 50 KL  
LÁMPARA FRONTAL MÉDICA CON LUZ LED DE 3W, 70 KL DE GIMA  
LÁMPARA FRONTAL QUIRÚRGICA CON LUZ LED DE 5W, 50 KL DE GIMA  
LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 3W GIMA 70 KL  
LÂMPADA FRONTAL MÉDICA LED 5W GIMA 50 KL  
GIMA 70 KL MEDIZINISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 3W  
GIMA 50 KL CHIRURGISCHE LED-STIRNLAMPE MIT 5W  
CZOŁOWA LEDOWA LAMPA MEDYCZNA GIMA 70 KL 3W  
CZOŁOWA LEDOWA LAMPA CHIRURGICZNA GIMA 50 KL 5W  
GIMA 70 KL ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 3W  
GIMA 50 KL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED 5W  
70 KL LAMPĂ DE CAP CU LED PENTRU UZ MEDICAL 3W  
50 KL LAMPĂ DE CAP PENTRU UZ CHIRURGICAL 5W  
70 KL MEDICINSK PANNLAMPA MED LED 3W  
50 KL KIRURGISK PANNLAMPA MED LED 5W  
70 KL LED LEKÁRSKY SVETLOMET 3W  
50 KL CHIRURGICKÝ LED SVETLOMET 5W  
70 KL LED MEDICINSKO SVJETLO ZA GLAVU 3 W  
50 KL KIRURŠKO LED SVJETLO ZA GLAVU 5 W  
70 KL LED ORVOSI FEJLÁMPA 3 W  
50 KL LED SEBÉSZI FEJLÁMPA 5 W  
70 KL LED PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 3W  
50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

REF

KS-H1N (GIMA 30879) KS-W03 (GIMA 30936)

MD



Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd  
5th Floor and No.1 West Side Of 6th Floor, H5 Industrial  
Building, No.16 Lianjiang Road, Longhu District, Shantou,  
China - Made in China

EC REP

Kingsmead Service B.V.  
Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherland



Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



Alle alvorlige ulykker i forbindelse med det medicinske udstyr, vi har leveret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor dit registrerede kontor har hjemsted.

## 1. Introduktion

Lampen giver brugeren en lysstråle, som er meget ensartet og ikke udviser nogen farveændring i området for spottets dybdeskarphed. Pandelampen er indbygget i batterienheden og har trinløs justering af lysintensiteten. Det giver brugeren mulighed for præcis kontrol over lampens lysstyrke, så man kan se så mange detaljer som muligt.

## 2. Modeller

30879

70 KL LED PANDELAMPE TIL  
MEDICINSK BRUG 3W

Lige optisk bane Enkel optisk linse  
Intet indvendigt lysgitter



30936

50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE  
5W

L-formet optisk bane Multioptisk linse  
Indvendigt lysgitter



## 3. Tekniske data

LED-pandelampe						
Kode	LED-pære	Intensitet	Levetid for LED	Spotstørrelse	Batteriets opladningstid	Batteriets varighed
KS-H1N	3W	20000-70000 lux	50000 timer	40-90 mm ved 20-50 cm	2 timer	2-12 timer
KS-W03	5W	10000-50000 lux	50000 timer	50-100mmat 20-50cm	2 timer	2-12 timer

## 4. Illustration

30879

GIMA 70 KL Led pandelampe til medicinsk brug 3W er en model med en enkelt optisk linse. LED-lyshuset er lavet af aluminium, så det er holdbart og let. GIMA 70 KL Led pandelampe til medicinsk brug 3W er indbygget i batterienheden og har trinløs justering af lysintensiteten. Det giver brugeren mulighed for præcis kontrol over lampens lysstyrke, så

man kan se så mange detaljer som muligt.

### GIMA 70 KL LED PANDELAMPE TIL MEDICINSK BRUG 3W

1. Hygiejniske og komfortable læderpuder
2. Juster bredden på hovedbåndet
3. Genopladeligt batteri
4. LED-skærm viser batteriets volumen
5. Tænd/sluk
6. Lysstyrkeregulering



### 30936

GIMA 50 KL Led pandelampe til medicinsk brug 5W anvender L-formet optisk bane, som har god koaksialitet mellem lysstrålen og synet.

Mini og lav vægt kun 200 g.

Spotstørrelsen kan justeres med indvendigt minilysgitter.

Integreret ledningsfrit design med DC-strømforsyning og hurtig udskiftning.

Præcis lysafbildning med multioptisk linse, ensartet og tydelig uden lysforurening. Ledningsfri LED-pandelampe med et enkelt batteri.

### GIMA 50 KL KIRURGISK LED-PANDELAMPE 5W

1. Juster højden på pandebåndet
2. Juster bredden på pandebåndet
3. Genopladeligt batteri
4. LED-skærm viser batteriets volumen
5. Tænd/sluk
6. Lysstyrkeregulering
7. Justering af lysspot
8. Justering af lygtehovedets højde
9. Hygiejniske og komfortable læderpuder



## 5. Pakkeliste

Pakkeliste til pandelampe:

1. LED-pandelampe: 1 hver
2. Adapter: 1 hver
3. Batteri: 1 hver eller 2 (hvis konfigureret)
4. EPE-karton Pakkekasse: 1 hver Aluminiumshus: (ekstraudstyr)

## 6. Justering

Juster hovedbåndets højde og omkreds efter individuelle forhold.

## 7. Advarsler

Vær opmærksom på LED-lyset, undgå at rette det direkte mod øjnene. Hold enheden tør, og brug den ikke på våde steder.

Fastgør ikke det optiske glas med noget hårdt eller med hånden. Tør ikke glasset af med

noget hårdt eller snavset.

Kig ikke direkte ind i solen, når du har medicinsk loupe på.

## **8. Vedligehold**

1. Første gang den bruges, eller hvis man ikke har brugt den i lang tid, skal den oplades i mere end 6 timer.
2. Brug den originale adapter for at undgå beskadigelse af dele.
3. Brug en våd og ren blød klud til at rengøre denne enhed, og brug derefter en tør klud til at fjerne vandet.
4. Apparatet må ikke bades eller opbevares ved høj temperatur eller højt tryk.
5. Batteriaffald: skal behandles i henhold til de relevante bestemmelser og må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
6. Læg enheden i kassen, når du er færdig med at bruge den.
7. Når glasset er snavset, skal det rengøres med en blød klud eller hårbørste.
8. Brug alkohol til at rengøre det optiske glas og justere skruelede;

## **9. Eftersalg**

Garantitid: 12 måneder efter købet. Garantitid for batteri: 3 måneder efter købet.















I garantiperioden tilbyder vi gratis reparation og udskiftning, hvis produktet bruges og vedligeholdes korrekt, og hvis der opstår en fejl, som skyldes produktets kvalitet.

Gratis vedligeholdelse vil ikke blive tilbudt under følgende omstændigheder:

1. Nedbrud forårsaget af installationsfejl og forkert betjening.
2. Skader forårsaget af demontering af en af vores virksomhed ikke-autoriseret vedligeholdelsestekniker.
3. Skader forårsaget af kundens u hensigtsmæssige konservering og vedligeholdelse.
4. Nedbrud og skader forårsaget af force majeure.
5. Loupen er skrøbelig, ingen garanti.

## **10. Arbejdsbetingelser**

1. Omgivende temperatur: 5°C~40°C
2. Relativ luftfugtighed: ≤ 80 %
3. Atmosfærisk tryk: 50 kPa~106 kPa

Symboler			
	Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745		Produktkode
	Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt		Batchnummer
	Følg brugsvejledningen		Fabrikant
	Opbevares køligt og tørt		Må ikke udsættes for sollys
	Bortskaffelse af WEEE		Klasse II anvendt
	Fabrikationsdato		Medicinsk udstyr
	Importeret af		Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab



**Bortskaffelse:** Produktet må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Brugere skal bortskaffe dette udstyr ved at bringe det til et særligt genbrugssted for elektrisk og elektronisk udstyr.

## GIMA-GARANTIVILKÅR

Garanti på 12 måneder fra afsendelse.