

Brugsanvisning

Hud- og ekstremitetssensorer

Placer sensoren på hud eller ekstremitet, f.eks. finger eller tå, og fastgør med et stykke plaster. Undgå kompression og tilsikre at målingen ikke bliver forstyrret af kabelbevægelser. Fikser kablet i en blød sløjfe til huden med et plaster at . Måling kan påbegyndes når visningen er stabil efter ca. 3 min.

Centralsensorer

Anvend kun vandbaserede cremer. Temperaturen kan blive målt centralt i øsofagus, næsesvælg, rektum eller trommehinde. Måling kan påbegyndes når visningen er stabil efter ca. 3 min.

Målinger i øsofagus

Sensorspidsen bør placeres i den nederste fjerdedel af øsofagus.

Målinger i næsesvælget

Den rigtige position er nået når sensorspidsen møder modstand for yderligere passage og hermed begynder at bøje let.

BEMÆRK: Der er risiko for næseblødning under denne placering.

Rektalmålinger

Den korrekte placering er opnået når sensoren har passeret lukkemuskulaturen og hermed fastholdes i denne position. Anvend engangsovertræk PC1.

Målinger i øret

Sensorspidsen føres frem til trommehinden. placér vat omkring ledningen for at fastholde sensoren og lukke øregangen.

Rengøring

Sensoren borttages forsigtigt fra målestedet. Fjern eventuelle taperester med rensebenzin. Herefter kan den rengøres med en let sæbeopløsning. Anvend et blødt stykke stof eller en blød børste.

Undgå at stikket bliver vådt - aftør det med et rent stykke stof, gerne med lidt rensebenzin.

Desinficering

Desinficér den rengjorte sensor med f.eks. ethanol, isopropylalkohol 70%

Sterilisering i autoklave

Ved 121°C i 20 min cyklus.

MAX. 121°C

Kemisk sterilisering

Med ethylenoxyd.

MAX. 80°C

Sikkerhed

Anvend ikke beskadigede sensorer.

EXACON

Temperature Probes
Temperatursonden
Sondes de température
Temperatuursensoren
Sonde di temperatura
Sondas de temperatura
Temperatursensorer
Temperaturprober

*Instructions for use
Hinweise zum Gebrauch
Instructions d'utilisation
Algemene informatie
Istruzioni per l'uso
Instruções para su uso
Informação Geral
Brugsanvisning
Bruksanvisning*



Medical Device Directive 93/42/EEC
Annex II, section 3.2 - Class IIb
QMS: EN ISO9001 & EN46001

Ordering information

Bestellinformation
Références de commande
Información para pedidos
Codici d'ordine
Bestillingsnumre

Ordering example:

Standard: **D-OS3JK**
Autoclave: **D-OS3A'**
HP: **D-OS3HP**
Siemens': "A"
SC6000: "SA"
SC9000: "SA"

Rectal / Rektal / Rectale / Recto / Rettale

D-RA5"+ Adults

D-RB4"+ Infants

Central / Zentral / Centrale / Centrali

D-OS4"+ Adults

D-OS3"+ Infants

D-OS2"+ Neonates

D-TM1"+ Tympanic

Skin / Haut / Cutanée / Piel / Cutanee

D-S18"+ Adults

D-S10"+ Infants

D-S06"+ Neonates

MAX. 80°C


ChemSter



D-RA5JK
D-RB4JK
D-OS4JK
D-OS3JK
D-S18JK
D-S10JK
D-OS2A / JK / HP / SA
D-S06A / JK / HP / SA
D-TM1A / JK / HP / SA

MAX. 121°C

ChemSter & Autoclave

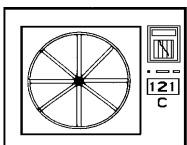

D-RA5A / HP / SA
D-RB4A / HP / SA
D-OS4A / HP / SA
D-OS3A / HP / SA
D-S18A / HP / SA
D-S10A / HP / SA

"JK"

"A"

"HP"

"SA"

MDD: 93/42/EEC Annex II, Sec. 3.2 Class IIa
QMS: EN ISO9001 & EN46001
Std: EN60601 / EN12470-4
Ref: 2252 ohm / 25°C
Tol: 0-25°C: ±0,2°C; 25-50°C: ±0,1°C
Pwr: Max 100 µW RA5-RB4-OS4-OS3-S18-S10
Max 70 µW OS2 - S06 - TM1



