

**Koncentreret instrumentrens
med proteolytiske enzymer****ADVARSEL****Egenskaber**

GERMOCID ENZIMATICO er et proteolytisk enzymatisk rengøringsmiddel til rengøring og rensning af medicinske og dentale instrumenter. Det virker effektivt på organisk affald, selv tørt, og genstridigt snavs: det kan bruges på glas, plast og metalmaterialer. TIL PROFESSIONEL BRUG, egnet til manuel vask og også til brug i ultralydsapparater.

Brugsanvisning: Fortynd GERMOCID ENZIMATICO med 0,6-10% i en liter vand fra hanen, helst varmt, og bland grundigt. Før instrumenterne lægges i blød i den forberedte opløsning, anbefales det at dekontaminere dem med et specifikt produkt, derefter skylle dem med koldt vand og nedsænke dem i GERMOCID ENZIMATICO-opløsningen i 10 minutter. Hvis der er tørre rester eller genstridigt snavs, forlænges nedsænkningen til 1 time og eventuelt bruges en tandbørste.

Sammensætning: ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 15-30%; anioniske overfladeaktive stoffer 5-15%; enzymer; parfume (limonen, citral), konserveringsmiddel (benzisothiazolinon).

Advarsler: H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H315 Forårsager hudirritation. EUH208 Indeholder: CITRAL Kan forårsage allergisk reaktion. P264 Vask hænder grundigt efter håndtering. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305-P351-P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at fjerne. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Indeholder: Polymeralkoxyleret fedtalkohol. Til professionel brug. Opbevares køligt, tørt og væk fra varmekilder. Efter åbning, hvis produktet opbevares korrekt, bevarer det den gyldighed, der er angivet på etiketten.

Rengøringsmiddel i overensstemmelse med EF-forordning nr. 648/2004

Gyldighed: 3 år

Parti og udløbsdato: se emballagen

EF MEDICINSK Udstyr

Producent:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tlf. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

FREMSTILLET I ITALIEN