

**Koldsteriliseringsmiddel
til invasivt medicinsk udstyr
pereddikesyrepulver****FARE****Egenskaber**

GERMOCID POLVERE indeholder en forløber til pereddikesyre, som aktiveres efter at have fortyndet pulveret i varmt vand. Pulveret opløses fuldstændigt uden at efterlade bundfald og uden skum på overfladen. Den oprindeligt blå væske vil blive farveløs efter cirka femten minutter, den tid, der er nødvendig for udviklingen af den aktive ingrediens (pereddikesyre) for at gøre opløsningen klar til brug, som således vil have et højt bakteriedræbende potentiale. GERMOCID POLVERE kan bruges som dekontamineringsmiddel, desinfektionsmiddel, sporicid, koldsteriliseringsmiddel til invasivt medicinsk udstyr på hospitaler, lægeklিনikker og tandkirurgiske klinikker. Produktet kan også bruges inden for det æstetiske område på ikke-invasive enheder. GERMOCID POLVERE er også effektivt som dekontamineringsmiddel og til desinfektion og hurtig koldsterilisering af varmfølsomme materialer såsom: endoskoper, optiske fibre, transducere osv. Den absolutte kompatibilitet med komponenterne gør, at GERMOCID POLVERE også kan bruges med endoskopvaskemaskiner. Efter brug kan opløsningerne bortskaffes som ufarligt affald.

Anvendelse: Klargøring af opløsningen til nedsækning: klargør den nødvendige mængde lunkent vand i den specielle bakke, og kontrollér, at temperaturen er omkring 35 °C for at lette opløsningen af pulveret. Hæld den nødvendige dosis i baseret på den ønskede aktivitet. Bland opløsningen indtil der opnås en klar blå opløsning; vent 15 minutter, før du bruger opløsningen. **Dekontaminering/desinfektion:** Brug 8 g pr. liter vand og nedsæk instrumenterne i opløsningen i 10 minutter. I tilfælde af stædige organiske rester, vask med et passende vaskemiddel. Efter nedsækning, fjern redskabet og skyl. Til den beskrevne aktivitet forbliver opløsningen aktiv i maksimalt 7 dage fra klargøringen (afhængig af mængden af behandlede instrumenter). **Sporedræbende aktivitet:** brug 8 g pr. liter vand og nedsæk redskaberne i opløsningen i 10 minutter. Til den beskrevne aktivitet forbliver opløsningen aktiv i maksimalt 24 timer fra klargøring. **Højniveaudeinfektion/koldsterilisering:** brug 16 g pr. liter vand og nedsæk redskaberne i opløsningen i 10 minutter. Efter nedsækning, fjern instrumenterne og skyl med sterilt vand. Tør og opbevar aseptisk. Til den beskrevne aktivitet forbliver opløsningen aktiv i maksimalt 24 timer fra klargøring.

Sammensætning: 100 gram produkt indeholder: Tetraacetylenhydramin 25,00 g; Natriumpercarbonat 42,00 g; hjælpestoffer op til 100,00 g.

Signalord: H302 Farlig ved indtagelse. **H318** Forårsager alvorlig øjenskade. **P264** Vask hænder grundigt efter brug. **P280** Bær øjen- og ansigtsbeskyttelse. **P305-P351-P338** VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. **P310** Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. **Indeholder:** NATRIUMPERCARBONAT. Må ikke bruges til redskaber af aluminium og nikkellegering. Følg brugsanvisningen. Brug ikke metalbakker. Til professionel brug.

Kompatibilitet med materialerne: GERMOCID POLVERE har en høj kompatibilitet med de fleste af de materialer, som de forskellige enheder, der bruges på hospitaler og i sundhedsvæsenet, er fremstillet af. Forenelighedsundersøgelser af GERMOCID POLVERE/Medicinsk udstyr viser ingen nedbrydning af det medicinske udstyr efter brug af GERMOCID POLVERE under de anbefalede brugsbetingelser.
Holdbarhed og opbevaring: Produktet er gyldigt i 2 år fra produktionsdatoen, hvis det opbevares i original emballage. Hvis emballagen åbnes og lukkes korrekt ved afslutningen af hver udtagning af materiale, uden at restindholdet bliver forurenet af eksterne stoffer og/eller midler, bevarer præparatet sin holdbarhed, indtil produktet er opbrugt. Produktet skal beskyttes mod fugt. Skal opbevares køligt, tørt og væk fra varmekilder. Må ikke bruges hvis emballagen er beskadiget.
Parti og udløbsdato: se emballagen
CE 0546 MEDICINSK UDSTYR iht. det Europæiske direktiv 93/42EØF
Producent: GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tlf. 02 663 01 938 www.germo.it - info@germodis.com MADE IN ITALY
Advarslerne kan variere som følge af opdateringer af produksikkerhedsdatabladet