

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. KONSULTÉR LÆGEN FØR BRUG.

KONTRAINDIKATIONER: Ikke beregnet til personer over 110 kg (242 lbs). - Ikke beregnet til brug på is eller glatte underlag. - Ikke beregnet til personer med latexallergi.

BRUGSVEJLEDNING: For at folde stokken ud skal du holde fast i håndtaget og lade de sammenklappelige skafsegmenter folde sig ud mod gulvet. For at undgå fald skal du altid kontrollere, at de enkelte skafsegmenter (Fig. 1) er låst korrekt på plads.

ADVARSEL Skil ikke stokkens struktur ad. Stokken indeholder en elastisk snor. Ukontrolleret frigivelse af den elastiske snor kan forårsage alvorlige skader på ubeskyttede kroppsdele, især øjnene. Hvis den elastiske snor skæres over, flosses eller beskadiges, skal du ophøre med at bruge stokken.

Stræk IKKE snoren mere end nødvendigt for at adskille eller samle segmenterne.

SÅDAN JUSTERER DU HØJDEN PÅ STOKKEN: Løsn drejelåsen ved at dreje den flere omgange med uret. Tryk på låseknappen og træk håndtaget opad for at forlænge stokken, eller tryk håndtaget nedad for at forkorte den. Husk at stramme drejelåsen igen, når du har justeret stokken til den ønskede højde.

ADVARSEL For at undgå fald skal du altid sikre dig, at de enkelte skafsegmenter er låst korrekt på plads, og at låseknappen er helt i indgreb. Sørg altid for, at stokkens drejelige fod er skruet fast til stokken for at undgå fald.

SÅDAN SAMMENKLAPPES STOKKEN: Din stok kan nemt foldes sammen til en praktisk rejsestørrelse ved at adskille de 4 enkelte skafsegmenter fra hinanden. Hold hvert sæt skafsegmenter tæt på samlingen og træk dem fra hinanden. De enkelte skafsegmenter foldes pænt sammen.



SÅDAN BRUGER DU LYSENE PÅ DIN STOK: Knappen øverst på stokkens håndtag tænder lysene. Tryk én gang på knappen for at tænde lyset foran på stokken, tryk igen for at tænde det røde lys i bunden af håndtaget, og tryk en tredje gang for at slukke dem. Det forreste lys kan drejes, så det kan rettes mod det sted, hvor du har brug for det.

SOS-SIGNAL: For at aktivere SOS-signalet skal du trykke på knappen på siden af håndtaget, så lyset i bunden blinker, og stokken afgiver en alarmlyd.

UDSKIFTNING AF BATTERIER: Åbn batterirummet bag på håndtaget. Fjern eventuelle brugte batterier og bortskaf dem korrekt. Brug 2 AAA-batterier, og sæt dem i med korrekt polaritet (positiv pol udad, hvor fjederen er placeret). Luk batterirummet. Kontrollér regelmæssigt stokken for tegn på slidage, herunder flosser på den elastiske snor eller slid på gummifødderne. Hvis du ser tegn på slidage, skal du straks stoppe med at bruge stokken.

ADVARSEL Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (kulstofzink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.

GIMA-GARANTIVILKÅR: Gimas 12 måneders standard B2B-garanti gælder.

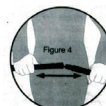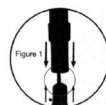

Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Довезено от/Dovezeno od/Importat de/
af/importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geïmporteerde door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

